

# Jump beta

---

## ERSATZTEILKATALOG



[SORG Rollstuhltechnik](#)

Revision: 03.06.2024 10:16:25



Sehr geehrter Kunde,  
auf den folgenden Seiten finden Sie eine komplette Liste aller Einzelteile aus denen dieser Rollstuhl gebaut wird. Um eine korrekte Ersatzteillieferung zu gewährleisten ist es notwendig, dass Sie uns bei der Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer folgende Informationen vom Typenschild zukommen lassen.  
Für eine Beschreibung zum Typenschild und wo es an Ihrem Rollstuhl zu finden ist, folgen Sie einfach diesem Link:  
[https://sorgrollstuhltechnik.de/wp-content/uploads/2017/07/Typenschild\\_finden.pdf](https://sorgrollstuhltechnik.de/wp-content/uploads/2017/07/Typenschild_finden.pdf)

### 1. Seriennummer des Rollstuhls

Die Seriennummer ermöglicht uns, auf die Rollstuhlkonfiguration der ursprünglichen Rollstuhllieferung zuzugreifen.

### 2. Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe

Die Maße auf dem Typenschild beziehen sich auf die Konfiguration der Ursprungslieferung. Sofern Maße nach der Lieferung verändert wurden, beispielsweise durch Stuhlverbreiterung, benötigen wir die aktuellen Maße.

### 3. Unterschenkelänge

Wir benötigen die Unterschenkelänge um die korrekte Version einiger Anbauteile auswählen zu können, die an das Maß der Unterschenkelänge gebunden sind.

### 4. Rahmenfarbe

Bitte spezifizieren Sie die Rahmenfarbe des Rollstuhls wenn Sie ein pulverbeschichtetes Ersatzteil bestellen. Bitte geben Sie auch an, ob die Beschichtung matt oder glänzend ist.

### 5. Andere Änderungen nach der Auslieferung (Anbauartikel etc.)

Wir können von Änderungen die nach der Lieferung durchgeführt wurden nichts wissen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Änderungen Einfluss auf benötigte Ersatzteile haben, informieren Sie uns bitte detailliert.

#### Abkürzungen:

Pos.	Positionsnummer
Art.-Nr.	Artikelnummer
M/1	erforderliche Menge pro Rollstuhl bzw. Baugruppe
SB	Sitzbreite
ST	Sitztiefe
RH	Rückenhöhe
alt.	alternativ

#### Erläuterungen:

Es können nur Artikel bestellt werden, die in der Spalte **Art.Nr.** einen Nummerneintrag haben.

Bitte beachten Sie in der Spalte **Variante** die erforderlichen Bestellangaben, ohne die Ihre Bestellung nur mit Verzögerung bearbeitet werden kann.

Die Angaben **Links/Rechts** sind immer auf die Fahrtrichtung bezogen.

Bei Unklarheiten oder Fragen rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.

#### **SORG Rollstuhltechnik GmbH Co.KG**

Benzstraße 3-5

68794 Oberhausen-Rheinhausen

Fon 07254 – 9279 0

Fax 07254 – 9279 10

[info@sorgrollstuhltechnik.de](mailto:info@sorgrollstuhltechnik.de)

<http://www.sorgrollstuhltechnik.de>

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 8.00 – 16.30 Uhr

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Preise auf Nachfrage

## Inhaltsverzeichnis

### **Rahmen**

Rahmen Sport	1
Rahmen BSA	3
Sicherheitsrad	5
Ankipphilfe	7
Stockhalter	8

### **Beinstützen**

Beinstützenhalter abschwengbar und abnehmbar (ab 09/2023)	9
Beinstütze hochschwenkbar und abnehmbar (nur mit abduziertem Rahmen möglich)	12
Wadenauflage für Beinstütze hochschwenkbar	13
Beinstütze durchgehend seitlich hochklappbar, Anbau innen 403601	14
Beinstütze durchgehend seitlich hochklappbar, Anbau außen 403610	16
Beinstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, wegschwenkbar, Anbau außen 403611	18
Beinstütze geteilt, seitlich hochklappbar, Anbau außen 403612	20
Beinstütze geteilt, seitlich hochklappbar, Anbau innen 403602	22
Fußschale	23
Wadenband	24

### **Sitz**

Kreuzstrebe + Sitzbespannung	25
Sitzfix + Sitzverlängerung	27
Sitzkissen	28
Abduktionskeil	29
Therapietisch Variante 1 seitlich wegklappbar	30
Therapietisch Variante 2 an Armpolster gesteckt	31

### **Rücken**

Rückenrohr Standard	32
Rücken winkelverstellbar / winkeleinstellbar	34
Rücken mit Gasdruckfederverstellung	37
Stabilisierungsstange am Rückenrohr	38
Stabilisierungsstange für ausziehbare Schiebegriffe	39
Schiebegriffe	40
Schiebestange	41
Rückenbespannung Standard	42
Rückenbespannung anpassbar	43
Muldenrücken	44
Rückenverlängerung	47
Kissen für Muldenrücken	48
Seitenpelotte	49
Kopfstütze	52
Rückenschalenanbindung	53

## Inhaltsverzeichnis

### **Seitenteil**

Seitenteil Standard	55
Armpolster für Seitenteil Standard	56
Kleiderschutz	57
Desk-Seitenteil	58
Kleiderschutz Desk-Seitenteil	60
Armpolster für Desk-Seitenteil	61
Langes Seitenteil	62
Armpolster für langes Seitenteil	64
Desk/langes Seitenteil, Aufnahme vorne	66
Rasterarmlehne	67
Seitenteil für Gasdruckfeder-Rücken	68
Desk-Seitenteil für Gasdruckfeder-Rücken	69
Langes Seitenteil für Gasdruckfeder-Rücken	70

### **Lenkrad**

Lenkradadapter	71
Adapter für niedrige Sitzhöhen	73
Lenkradgabel	74
Lenkräder	75

### **Antriebsrad**

Lochplatte Antriebsrad Standard	76
Lochplatte Trommelbremsrad	78
Radstandsverlängerung 0°, 3°, 7°	79
Antriebsräder	81
Doppelgreifreifen Standard	82
Doppelgreifreifen Trommelbremse	84
Bereifung	86
Greifringe	87
Greifringüberzüge	88
Speichenschutz	89

### **Bremse**

Kniehebelbremse	91
Seilzugbremse Bremskörper/Andrückteil	92
Seilzugbremse Benutzerbedienteil	94
Bremsgriff bei Trommelbremse	95
Bremshebelverlängerungen	96




## Inhaltsverzeichnis

### Zubehör

Caddy	97
2-Punkt-Beckengurt mit Kunststoffschloss	98
2-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss	99
4-Punkt-Beckengurt mit Kunststoffschloss	100
4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss	101
Brustschultergurt	102

## Rahmen Sport


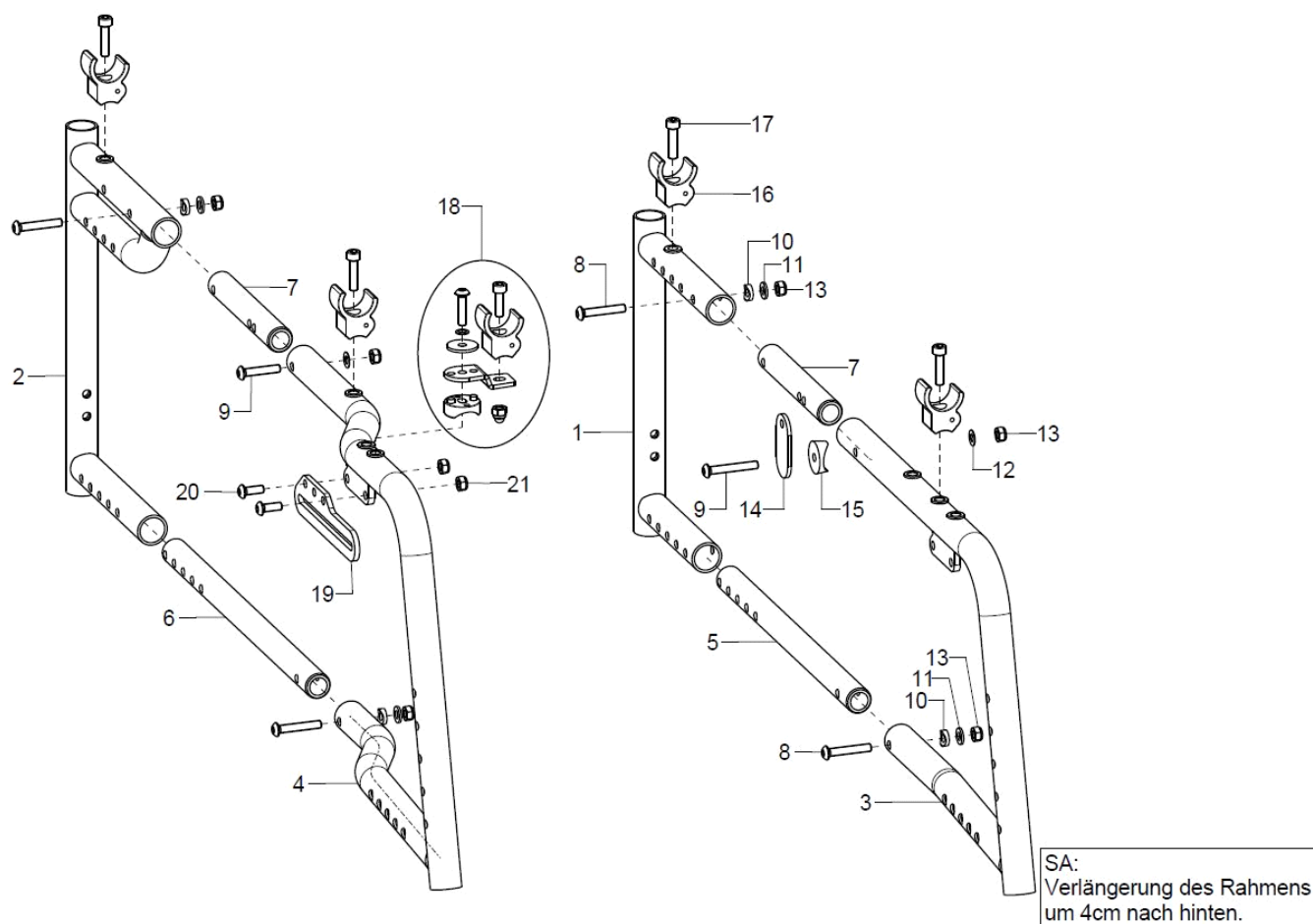


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	2	59751501	Rahmenteil hinten Sport	Farbe / Bei geradem Rahmen ab ST44 / bei abdu. Rahmen ab St48
o.B.	2	59751502	Rahmenteil hinten Sport SA	Farbe / Bei geradem Rahmen ab ST48
2	2	59751701	Rahmenteil hinten XL	Farbe
o.B.	2	59751702	Rahmenteil hinten XL SA	Farbe
3	1	59750402	Rahmenteil vorne Sport gerade, Gr.4 rechts (bis ST34-42)	Farbe, ST
o.B.	1	59750401	Rahmenteil vorne Sport gerade, Gr.4 links (bis ST34-42)	Farbe, ST
o.B.	1	59750502	Rahmenteil vorne Sport gerade, Gr.5 rechts (ST44/46)	Farbe, ST
o.B.	1	59750501	Rahmenteil vorne Sport gerade, Gr.5 links (ST44/46)	Farbe, ST
o.B.	1	59750602	Rahmenteil vorne Sport gerade, Gr.6 rechts (ST48/50)	Farbe, ST
o.B.	1	59750601	Rahmenteil vorne Sport gerade, Gr.6 links (ST48/50)	Farbe, ST
4	1	59750102	Rahmenteil vorne Sport abduziert, Gr.4 rechts (ST34-42)	Farbe, ST
o.B.	1	59750101	Rahmenteil vorne Sport abduziert, Gr.4 links (ST34-42)	Farbe, ST
o.B.	1	59750202	Rahmenteil vorne Sport abduziert, Gr.5 rechts (ST44/46)	Farbe, ST
o.B.	1	59750201	Rahmenteil vorne Sport abduziert, Gr.5 links (ST44/46)	Farbe, ST
o.B.	1	59750302	Rahmenteil vorne Sport abduziert, Gr.6 rechts (ST48/50)	Farbe, ST
o.B.	1	59750301	Rahmenteil vorne Sport abduziert, Gr.6 links (ST48/50)	Farbe, ST
o.B.	1	59751102	Rahmenteil vorne rechts Jump beta Sport XL gerade (bis ST 50 cm)	
o.B.	1	59751101	Rahmenteil vorne links Jump beta Sport XL gerade (bis ST 50 cm)	
o.B.	1	59751104	Rahmenteil vorne rechts Jump beta Sport XL gerade (ST 52/54 cm)	
o.B.	1	59751002	Rahmenteil vorne rechts Jump beta Sport XL abdu (bis ST 50 cm)	
o.B.	1	59751103	Rahmenteil vorne links Jump beta Sport XL gerade (ST 52/54 cm)	
o.B.	1	59751001	Rahmenteil vorne links Jump beta Sport XL abdu (bis ST 50 cm)	



o.B.	1	59751004	Rahmenteil vorne rechts Jump beta Sport XL abdu (ST 52/54 cm)	
o.B.	1	59751003	Rahmenteil vorne links Jump beta Sport XL abdu (ST 52/54 cm)	
5	2	59751801	Gelenkrohr unten - für Kreuzstrebe "Sport" Variante	
6	2	59751803	Gelenkrohr unten - für Kreuzstrebe "XL" Variante	
7	2	59751804	Gelenkrohr oben Gr. 4/5/XL	XL , Sport Gr. 4+5
8-15	2	45250199	Montageset Rahmen mit Standard-Seitenteil	
8-13+16+17	2	46250199	Montageset Rahmen mit Desk/langem Seitenteil	
8	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35	
9	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40	
altern	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30	
10	2		Sattelscheibe ø12/6,2x2,5	
11	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
12	1		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
13	3		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
14	1	45250111	Stützscheibe schwarz, oval	
15	1		Sattelscheibe schwarz Nenn-ø 24/6	
16-17	2	58260201	Auflagebock inkl. Montageschraube	
17	2		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x25 mit Tuflockfleck	
18	1	58260202	Auflagebock bei abduziertem Rahmen ohne Desk/langem Seitenteil bei ST ab 44cm	
19-21	1	59752501	Bremsschiene kurz, inkl. Montagematerial	Rahmengröße 4+5+XL
o.B.	1	59752502	Bremsschiene lang anschraubbar, inkl. Montagematerial	Rahmengröße 6
o.B.	1	35007602	Bremsschiene rechts bei Radstandsverl., inkl. Montagematerial	Bei Radstandsverlängerung
o.B.	1	35007601	Bremsschiene links bei Radstandsverl., inkl. Montagematerial	Bei Radstandsverlängerung
20	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
21	2		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6	
o.B.	1		Faltfixierband kpl. 210 (180)	

## Rahmen BSA

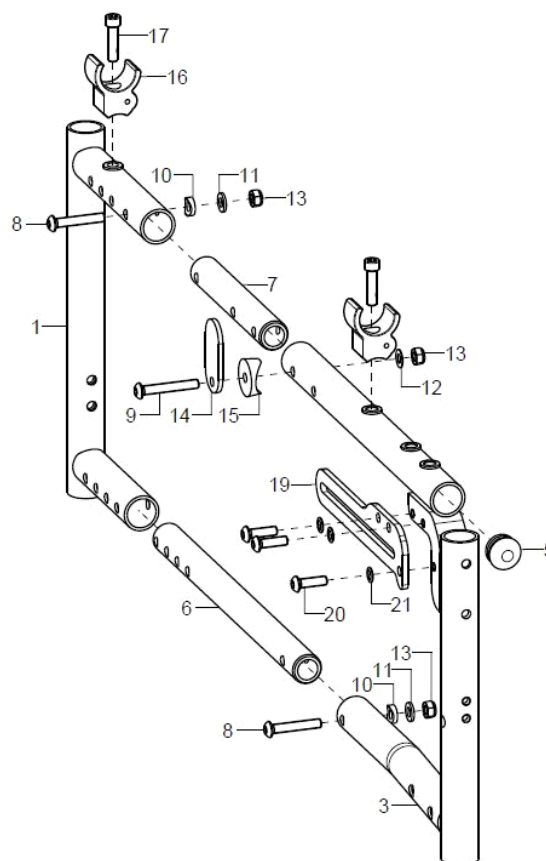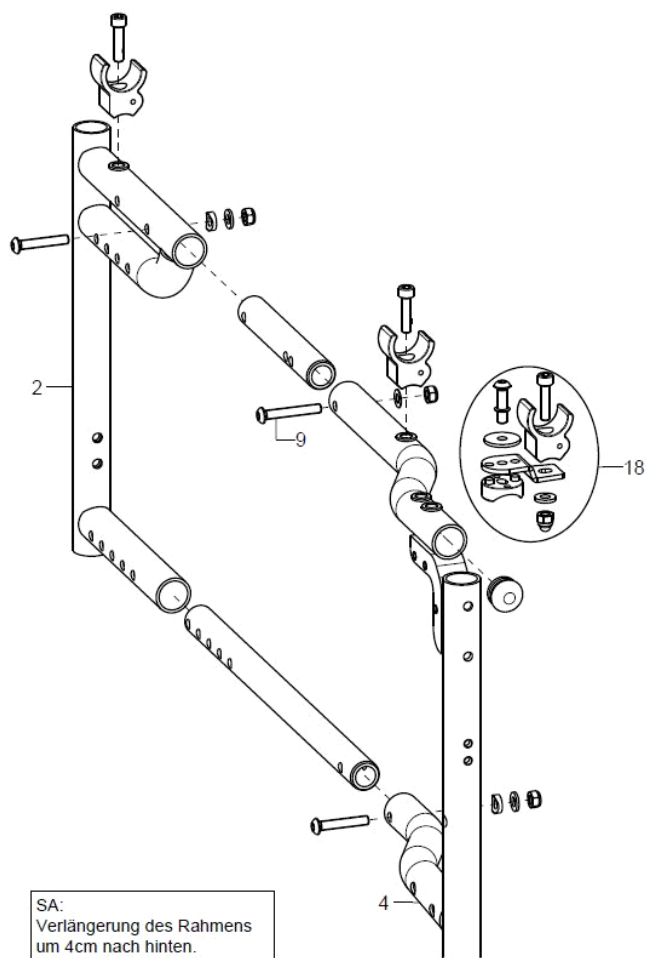


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	2	59751601	Rahmenteil hinten BSA	Farbe, ST
o.B.	2	59751501	Rahmenteil hinten Sport	Farbe / Bei geradem Rahmen ab ST44 / bei abdu. Rahmen ab St48
o.B.	2	59751602	Rahmenteil hinten BSA SA	Farbe, ST
o.B.	2	59751502	Rahmenteil hinten Sport SA	Farbe / Bei geradem Rahmen ab ST48
2	2	59751701	Rahmenteil hinten XL	Farbe
o.B.	2	59751702	Rahmenteil hinten XL SA	Farbe
3+5	1	59750902	Rahmenteil vorne BSA gerade, rechts (bis ST42)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59750901	Rahmenteil vorne BSA gerade, links (bis ST42)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59750904	Rahmenteil vorne BSA gerade, rechts (ST44/46)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59750903	Rahmenteil vorne BSA gerade, links (ST44/46)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59750906	Rahmenteil vorne BSA gerade, rechts (ST48/50)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59750905	Rahmenteil vorne BSA gerade, links (ST48/50)	Farbe, ST
4+5	1	59750802	Rahmenteil vorne BSA abduziert, rechts (bis ST46)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59750801	Rahmenteil vorne BSA abduziert, links (bis ST46)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59750804	Rahmenteil vorne BSA abduziert, rechts (ST48/50)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59750803	Rahmenteil vorne BSA abduziert, links (ST48/50)	Farbe, ST
3+5	1	59751302	Rahmenteil vorne XL BSA gerade, rechts (ST44/46)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59751301	Rahmenteil vorne XL BSA gerade, links (ST44/46)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59751304	Rahmenteil vorne XL BSA gerade, rechts (ST48/50)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59751303	Rahmenteil vorne XL BSA gerade, links (ST48/50)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59751306	Rahmenteil vorne XL BSA gerade, rechts (ST52/54)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59751305	Rahmenteil vorne XL BSA gerade, links (ST52/54)	Farbe, ST





4+5	1	59751202	Rahmenteil vorne XL BSA abduziert, rechts (ST44/50)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59751201	Rahmenteil vorne XL BSA abduziert, links (ST44/50)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59751204	Rahmenteil vorne XL BSA abduziert, rechts (ST52/54)	Farbe, ST
o.B.+5	1	59751203	Rahmenteil vorne XL BSA abduziert, links (ST52/54)	Farbe, ST
5	1		Stopfen mit Lamellen für Rohr ø22x1-2, schwarz	
6	2	59751802	Gelenkrohr unten - für Kreuzstrebe "BSA" Variante	
o.B.	2	59751803	Gelenkrohr unten - für Kreuzstrebe "XL" Variante	
7	2	59741202	Gelenkrohr oben Gr. 2/3	BSA
o.B.	2	59751804	Gelenkrohr oben Gr. 4/5/XL	XL , Sport Gr. 4+5
8-15	2	45250199	Montageset Rahmen mit Standard-Seitenteil	
8-13	2	46250199	Montageset Rahmen mit Desk/langem Seitenteil	
8	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35	
9	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40	
altern.	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30	
10	2		Sattelscheibe ø12/6,2x2,5	
11	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
12	1		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
13	3		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
14	1	45250111	Stützscheibe schwarz, oval	
15	1		Sattelscheibe schwarz Nenn-ø 24/6	
16+17	2	58260201	Auflagebock inkl. Montageschraube	
17	2		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x25 mit Tuflockfleck	
18	1	58260202	Auflagebock bei abduziertem Rahmen ohne Desk/langem Seitenteil bei ST ab 44cm	
o.B.	1		Faltfixierband kpl. 210 (180)	
19-21	2		BSA-Bremsschiene Gr.1 (Langloch 141mm)	
o.B.	2		BSA-Bremsschiene Gr.2 (Langloch 171mm)	
o.B.	2		BSA-Bremsschiene Gr.3 (Langloch 196mm)	
20	3		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20	
21	3		Sicherungsscheibe S6 - FST	

## Sicherheitsrad

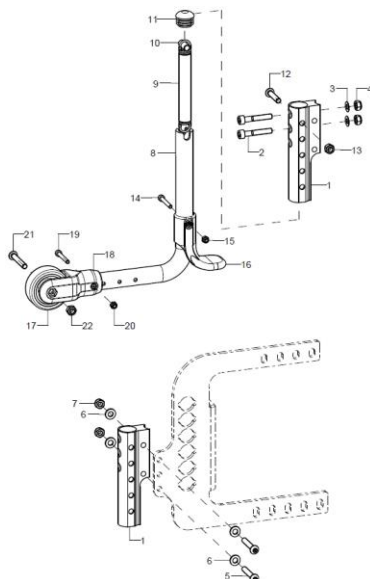


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1+2-4+8-22	1	721501	Sicherheitsrad 90° Form, wegschwenkbar 16", 20/22" (186/205) incl. Halter und Montagematerial	bei 22" Antriebsrad, rechts/links
1+2-4+8-22	1	721502	Sicherheitsrad 90° Form, wegschwenkbar 24", 22"(M) (186/225) incl. Halter und Montagematerial	bei 24" Antriebsrad, rechts/links
1+2-4+8-22	1	721503	Sicherheitsrad 90° Form, wegschwenkbar 26" (210/250) incl. Halter und Montagematerial	bei 26" Antriebsrad, rechts/links
1+5-22	1	721505	Sicherheitsrad bei Radstandverlängerung, kpl.	bei 22" Antriebsrad, rechts/links
1+5-22	1	721506	Sicherheitsrad bei Radstandverlängerung, kpl.	bei 24" Antriebsrad, rechts/links
1+5-22	1	721507	Sicherheitsrad bei Radstandverlängerung, kpl.	bei 26" Antriebsrad, rechts/links
1	1	72150106	Kippschutzhalter Aluminium, schwarz, für Sicherheitsrad	
2-4	1	7215010699	Montageset für Kippschutzhalter	
2	2		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x35	
3	3		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
4	3		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
5-7	1	7215020699	Montagezubehör Kippschutzhalter Radstandverlängerung	
5	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35	
6	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
7	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
8-17	1	72150001	Sicherheitsradbügel 90° Form, (186/205) für 20/22 Zoll, vormontiert, incl. Feder, Auftritt und Rad ø50mm	
8-17	1	72150002	Sicherheitsradbügel 90° Form, (186/225) für 22"(M)/ 24 Zoll, vormontiert, incl. Feder, Auftritt und Rad ø50mm	
8-17	1	72150003	Sicherheitsradbügel 90° Form, (210/250) für 26 Zoll, vormontiert, incl. Feder, Auftritt und Rad ø50mm	
8	1		Kippschutzbügel	Größe Antriebsrad
9-15	1	72150107	Zugfeder für Sicherheitsrad 13,5x2x113 kpl. (incl. Buchse, Stopfen, Befestigungsmaterial kpl. oben und unten )	
10	1		Distanzhülse 18,4mm	
11	1		Stopfen mit Lamellen für Rohr ø22x1-2, schwarz	
12	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30	
13	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
14	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M4x30	
15	1		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M4	
16	1	72150104	Auftritt Kippschutz Kunststoff, schwarz	




17+21-22	1	720004	Rad für Kippschutz ø50, Nabenbreite18 mm, PU-grau incl. Montagematerial
18+19-20	1	72150101	Halter Sicherheitsrad (Kunststoff schwarz) für Rad ø50 mm, incl. Montagematerial
19	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M4x30
20	1		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M4
21	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40
22	1		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6

## Ankipphilfe

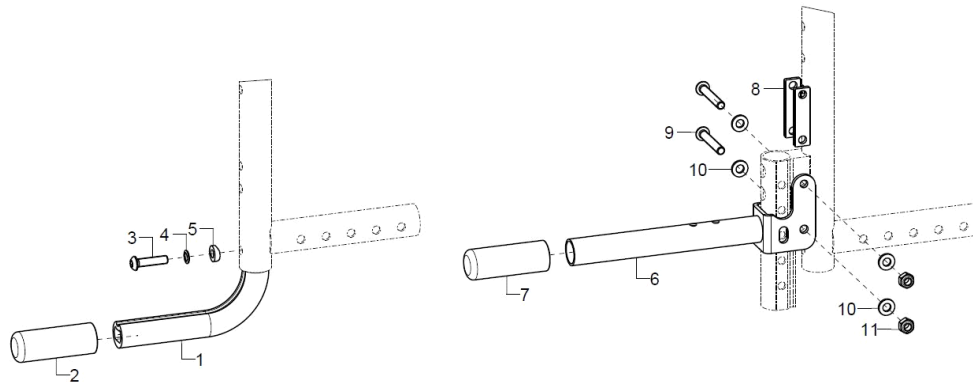


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-5	1	7401	Ankipphilfe kpl.	
1	1		Ankipphilfe	
2	1	740102	Tauchkappe	(5er Set)
3-5	1	74000099	Montagezubehör Ankipphilfe	
3	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25	
4	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	
5	1		Sattelscheibe ø12/6,2x2,5	
6-11	1	7404	Ankippbügel bei doppeltem Sicherheitsrad, kpl.	
7	1	740102	Tauchkappe	(5er Set)
8	2		Distanz Ankippbügel bei doppeltem Si.-Rad	
9	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40	
10	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
11	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	

Stockhalter

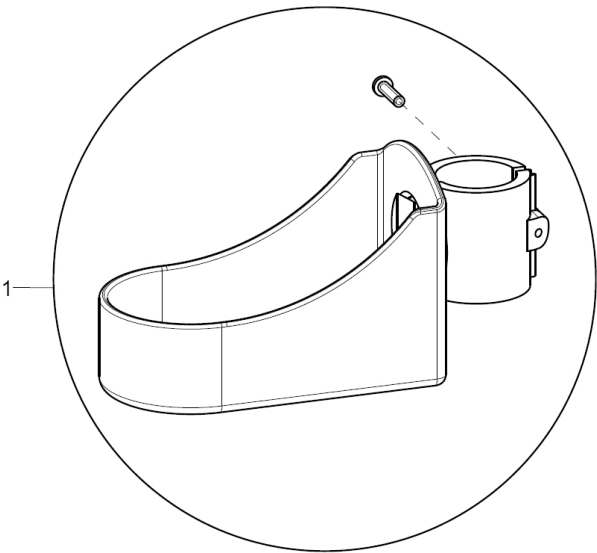

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	7101	Stockhalter mit Klemmschelle inkl. Montagezubehör	


# Beinstützenhalter abschwenkbar und abnehmbar (ab 09/2023)

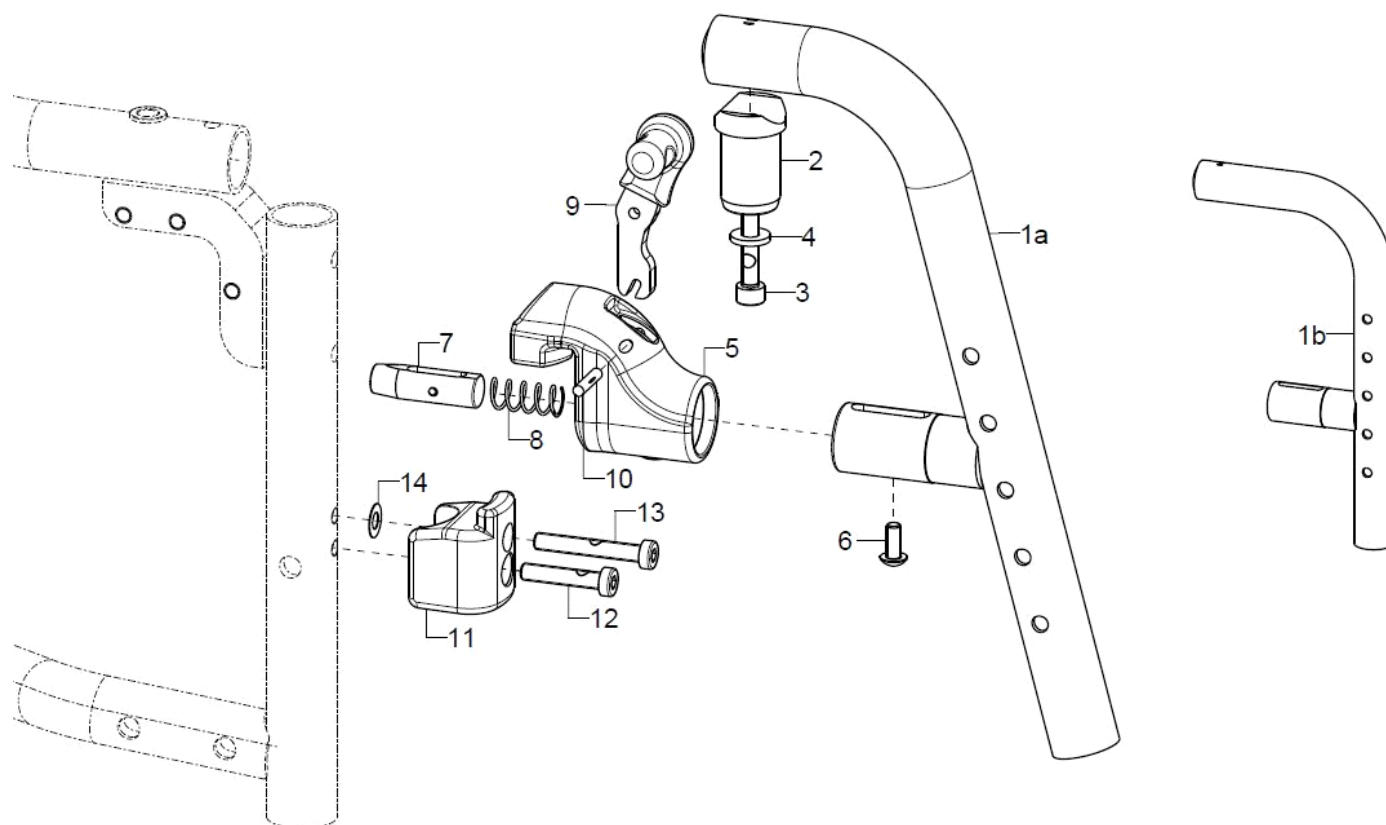

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1a-4	1	40370802	Beinstützenhalter BSA 105°, rechts incl. Aufnahmezapfen	Farbe
o.B.	1	40370801	Beinstützenhalter BSA 105°, links incl. Aufnahmezapfen	Farbe
1a-4	1	40370902	Beinstützenhalter XL-BSA 105°, rechts incl. Aufnahmezapfen	Farbe
o.B.	1	40370901	Beinstützenhalter XL-BSA 105°, links incl. Aufnahmezapfen	Farbe
1b-4	1	40370804	Beinstützenhalter BSA 90°, rechts incl. Aufnahmezapfen	Farbe, ST34/36 (ST34-40 bei SA-Version)
o.B.	1	40370803	Beinstützenhalter BSA 90°, links incl. Aufnahmezapfen	Farbe, ST34/36 (ST34-40 bei SA-Version)
2-4	1	40370103	Zapfen BSA inkl. Montagematerial	
3	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x30	
4	1		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	
5-10	1	40380808	Verriegelungset rechts für BSA/BSH (Aufnahme, Bolzen, Feder, Hebel, Stifte, Schraube)	
o.B.	1	40380807	Verriegelungset links für BSA/BSH (Aufnahme, Bolzen, Feder, Hebel, Stifte, Schraube)	
5	2		BS-Riegel	
6	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x12 Tuflock	
7	1		Rastbolzen inkl. Zylinderstift	
8	1		Druckfeder, 1x9/11x26	
9	1		Beinstützen-Verriegelungshebel verklebt, (links/rechts angeben)	rechts/links
10	1		Kerbstift ISO 8742 - 4x20	
11-14	2	40370810	Verriegelungshalter BSA incl. Montagematerial	
12	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x30, Tuflock	
13	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x40, Tuflock	



Beinstütze hochschwenkbar und abnehmbar (nur mit abduziertem Rahmen möglich)

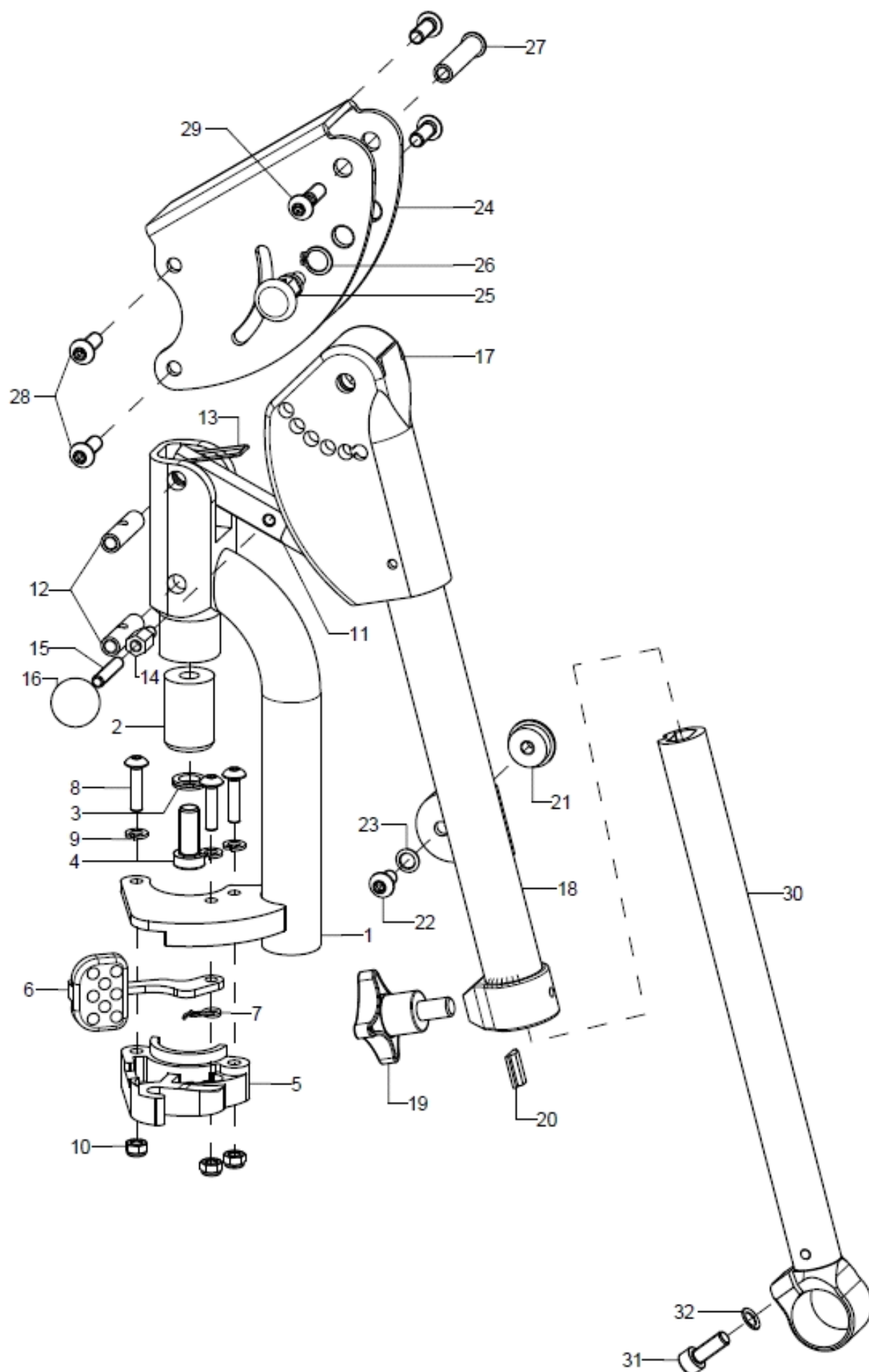




Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-30	1	40370502	Beinstützenhalter im physiologischen Drehpunkt hochschwenkbar rechts, kpl.	Farbe, Rahmen standard oder XL
o.B.	1	40370501	Beinstützenhalter im physiologischen Drehpunkt hochschwenkbar links, kpl.	Farbe, Rahmen standard oder XL
1	1	40371002	Beinstützenaufnahme rechts für BSH	
o.B.	1	40371001	Beinstützenaufnahme links für BSH	
altern.	1	40371004	Beinstützenaufnahme, rechts für BSH XL mit physiologischem Drehpunkt	
o.B.	1	40371003	Beinstützenaufnahme, links für BSH XL mit physiologischem Drehpunkt	
2-4	1	40370617	Zapfenteil BSH	
3	1		Sicherungsscheibe Nord-Lock M8	
4	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x20	
5-10	1	40370122	Verriegelungsmechanismus rechts für BSW/BSH	
o.B.	1	40370121	Verriegelungsmechanismus links für BSW/BSH	
6	1		Bedienhebel	
7	1		Schenkelfeder rechts	
o.B.	1		Schenkelfeder links	
8	3		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x20	
9	3		Federring DIN 127 - A 5	
10	3		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5	
11-16	1	40370623	Rastbolzen BSH	
12	2		Gewindebuchse M6x29,5	
13	1		Schenkelfeder Doppelarm	
14	1		Distanz 6-kt I-A-Gewinde 6/8 M5x10	
15	1		Gewindestift mit Innensechskant ISO 4026 (DIN 913), M6x8	
16	1		Kugelknopf DIN319 Ø20/M5, Form C, schwarz	
17-20	1	40370627	Rasterteil mit Bügelhalterrohr für BSH	links/rechts, Farbe
17	1	40370622	Rasterteil für BSH inkl. Montagematerial und Zugschnapper	
18-20	1	4037060502	Bügelhalterrohr rechts für BSH	Farbe
o.B.	1	4037060501	Bügelhalterrohr links für BSH	Farbe
altern.	1	4037060602	Bügelhalter BSH XL rechts	Farbe
o.B.	1	4037060601	Bügelhalter BSH XL links	Farbe
19-20	1	40370521	Klemmstück+ Kreuzgriff M8x14, für Beinstütze hochschwenkbar	
19	1		Kreuzgriff M8x14	
20	1		Klemmstück	
21-23	1	40301004	Abdeckung Konusaufnahme	
22	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x10	
23	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	
24-29	1	40370621	Verbindungsblech für BSH	
25	1	690101	Zugschnapper ø6/M10x1x31 mit Arretierung	
26	1		Sicherungsring 10, DIN 471	
27	1		Gewindebuchse M6x36 vormontiert	
28	4		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
29	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x22 Tuflockfleck	
30-32	1	40370526	Beinstützenrohr BSH verklebt, 265 mm	
altern.	1	40370525	Beinstützenrohr BSH verklebt, 335 mm	
31	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x16	
32	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	

Die geeigneten Fußauflagen inklusive Halterungen finden Sie unter dem Kapitel „Beinstütze geteilt, nach außen abschwinkbar und abnehmbar“


## Wadenauflage für Beinstütze hochschwenkbar

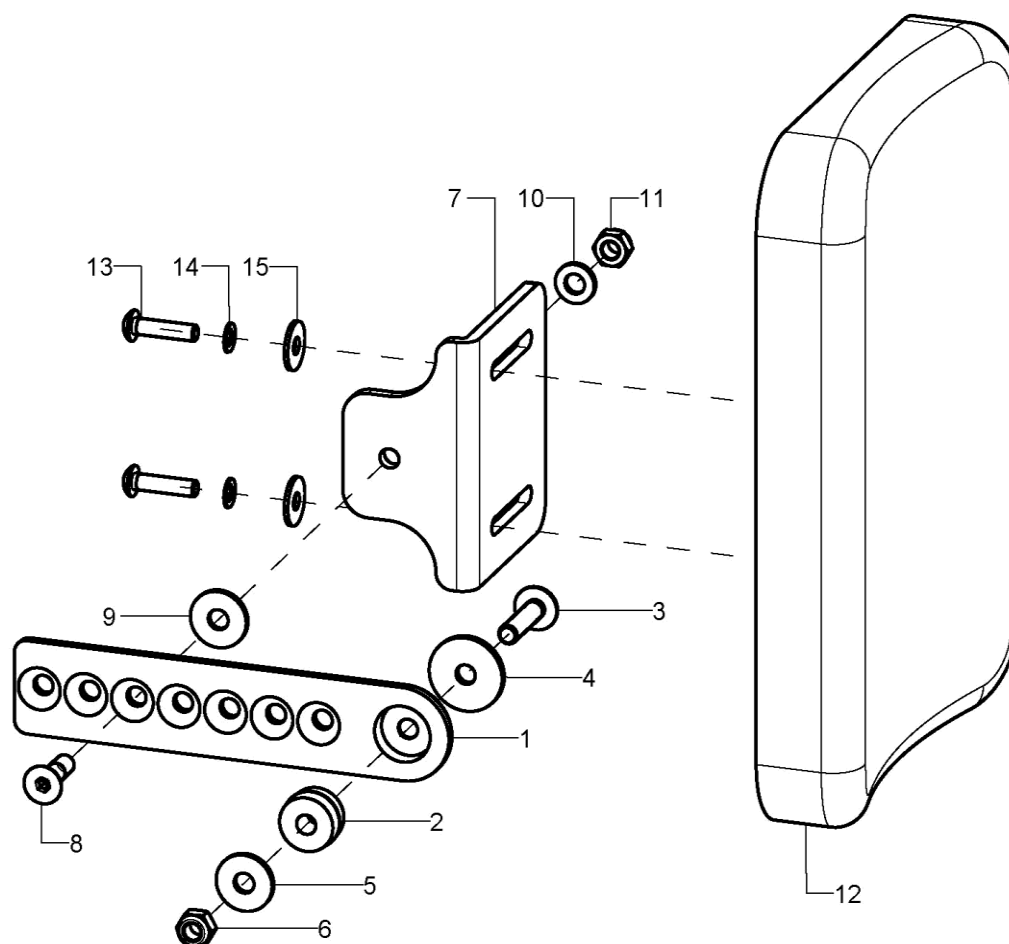

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-15	1	403006	Wadenauflage, kpl	links/rechts
1-6	1	40301003	Konus Gelenklasche BSH	
2	1		Doppelkonus	
3	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25	
4	1		Scheibe 23,5x6,2x2, schwarz eloxiert	
5	1		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4	
6	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
7-11	1	40300604	Haltewinkel für Wadenauflage inkl. Montagezubehör	
8	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x20	
9	1		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 - PA	
10	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
11	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
12-15	1	40300610	Wadenauflage 150x120x30 PU schw. Inkl. Montagezubehör	
o.B.	1	40300611	Wadenauflage 211x153x30 PU schw. inkl. Montagezubehör	
13	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x20	
14	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
15	2		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3	

## Beinstütze durchgehend seitlich hochklappbar, Anbau innen 403601

Für Unterschenkellänge minus Sitzkissen: Standard-Höhe 4,5 bis 32cm, XL-Höhe 8,5 bis 36cm, Bei Rahmen gerade erst ab SB28

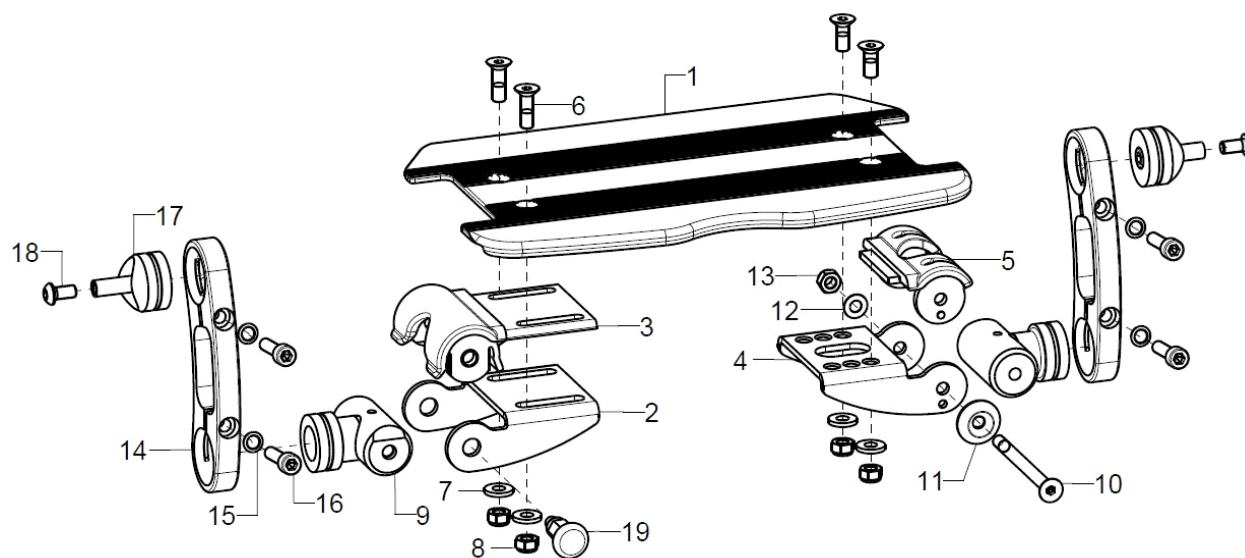


Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-18	1	403601	Beinstütze durchgehend Standard, Anbau innen, kpl.	SB, Farbe, USL, Zugschnapper, Rahmenvariante: abduziert, gerade
1	1	40360710	Fußplatte 8mm durchgehend	Bis SB38, Farbe, Anbau innen, Rahmenvariante: abduziert, gerade, SB
altern.	1	40280100	Fußplatte 8mm durchgehend	SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade
2+3+9+ 14-21	1	40362001	Anbau Innen rechts, kpl.	USL
4+5+9- 18	1	40362101	Anbau Beinstütze Innen links, Gelenkseite kpl	USL
2-3	1	40360106	Einstellteil rechts inkl. Arretierteil	
3	1	40360101	Arretierteil	
4-5	1	40360501	Einstellteil links für Anbau innen incl. Rastteil	
5	1	40360102	Rastteil für Fußplatte	
6-8	2	40360599	Montageset Einstellteil	
6	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x20	
7	2		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	
8	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
9	2	40360204	Adapter für Anbau innen, durchgehend inkl. Montagezubehör	
10-13	1	40360299	Montageset Einstellteil	
10	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x75	
11	1		Rosettenring Ø22/6x4,5, schwarz	
12	1		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
13	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
14	2	40390101	Positionierlasche FI 12x125x41,9 kurz	Bis USL 28cm
altern.	2	40390110	Positionierteil FI 12 x 175 x 42,1	Ab USL 29cm
15-16	2	40390199	Montageset Positionierteil	
15	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
16	2		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x25	
17	2	40390103	Fußbrettanbindung	
17-18	2	40390399	Montageset Fußbrettanbindung	
17	1		Gewindehülse M6x22 verklebt	
18	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12	



19	1	690101	Zugschnapper ø6/M10x1x31 mit Arretierung	
2+19	1	400902	Verriegelung kpl. für Beinstützen - Innenanbau - für durchgehende Fußplatte	links/rechts

## Beinstütze durchgehend seitlich hochklappbar, Anbau außen 403610

Für Unterschenkellänge minus Sitzkissen: Standard-Höhe 31,5 bis 48cm, XL-Höhe 35,5 bis 52cm, Bei Rahmen gerade erst ab SB 28

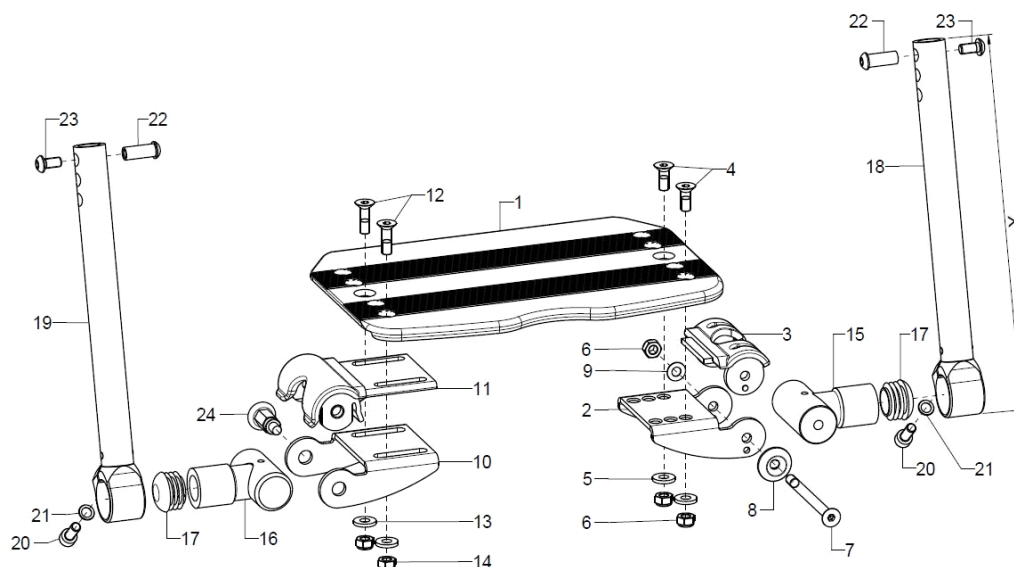


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-23	1	403610	Beinstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, Anbau außen, kpl.	SB, Farbe, Zugschnapper Rahmenvariante: abduziert, gerade, Länge: X
1	1	40280100	Fußplatte 8mm durchgehend	SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade
2-3	1	40360105	Einstellteil links inkl. Rastteil	
3	1	40360102	Rastteil für Fußplatte	
4-9	1	40360299	Montageset Einstellteil	
4	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x16	
5	2		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	
6	3		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
7	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x75	
8	1		Rosettenring ø22/6x4,5, schwarz	
9	1		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
10-11	1	40360106	Einstellteil rechts inkl. Arretierteil	
11	1	40360101	Arretierteil	
12-14	1	40360599	Montageset Einstellteil	
12	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x20	
13	2		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	
14	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
15+17	1	40360111	Gelenk D6 inkl. Stopfen	
16+17	1	40360110	Gelenk inkl. Stopfen	
o.B.	1	40360112	Gelenk für Zugschnapper inkl. Stopfen	Bei Zugschnapper
17	2		Stopfen mit Lamellen für Rohr ø25x1-2, schwarz	
18+20+21	1	40360121	Beinstützenrohr verklebt 235 mm links, inkl. Montageschraube	Länge: X
o.B.	1	40360131	Beinstützenrohr verklebt 305 mm links, inkl. Montageschraube	Länge: X
19+20+21	1	40360122	Beinstützenrohr verklebt 235 mm rechts, inkl. Montageschraube	Länge: X
o.B.	1	40360132	Beinstützenrohr verklebt 305 mm rechts, inkl. Montageschraube	Länge: X
20	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x16	
21	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	
22-23	2	40390299	Montageset Beinstützenrohr	
22	1		Gewindehülse M6x22 verklebt	



23	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12
24	1	690101	Zugschnapper ø6/M10x1x31 mit Arretierung
10+16+ 24	1	400903	Verriegelung kpl. für Beinstützen - Aussenanbau - für durchgehende Fußplatte links/rechts

## Beinstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, wegschwenkbar, Anbau außen 403611

Für Unterschenkelhöhe minus Sitzkissen: Standard-Höhe 31,5 bis 48cm, XL-Höhe 35,5 bis 52cm, Bei Rahmen gerade erst ab SB 28

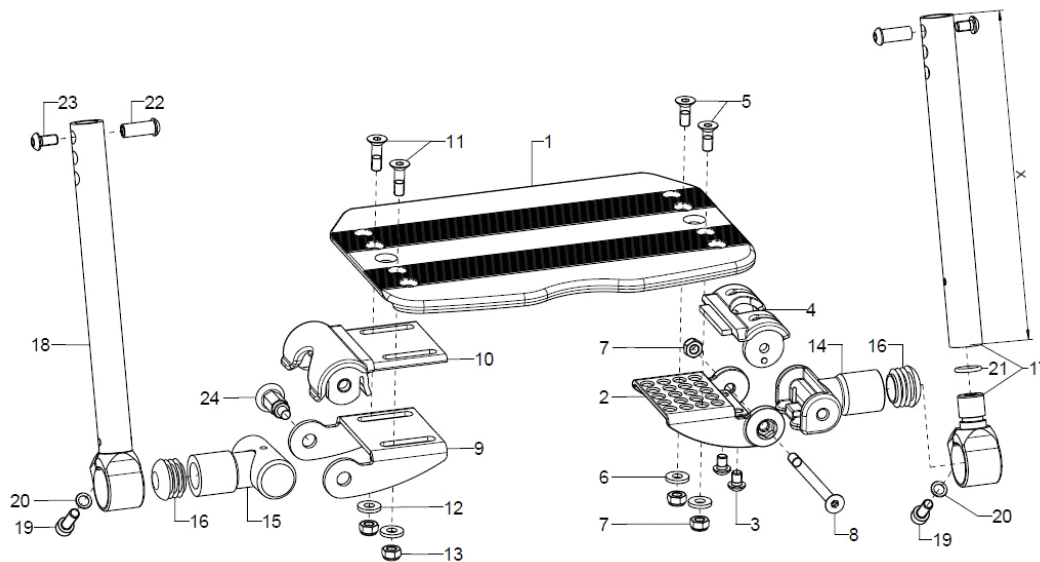

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-23	1	403611	Beinstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, wegschwenkbar, Anbau außen, kpl.	SB, Farbe, Zugschnapper Rahmenvariante: abduziert, gerade, Länge: A
1	1	40280100	Fußplatte 8mm durchgehend	SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade
2-4	1	40361020	Einstellteil geteilt inkl. Rastteil	
3	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x8	
4	1	40360102	Rastteil für Fußplatte	
5-8	1	40360299	Montageset Einstellteil	
5	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x16	
6	2		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	
7	3		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
8	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x75	
9-10	1	40360106	Einstellteil rechts inkl. Arretierteil	
10	1	40360101	Arretierteil	
11-13	2	40360599	Montageset Einstellteil	
11	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x20	
12	2		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	
13	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
14+16	1	40360205	Adaptergelenk, schwarz für geteilte/wegschwenkbare Beinstütze (Anbau aussen) incl. Stopfen	
15+16	1	40360110	Gelenk inkl. Stopfen	
altern.	1	40360112	Gelenk für Zugschnapper inkl. Stopfen	Bei Zugschnapper
16	2		Stopfen mit Lamellen für Rohr Ø25x1-2, schwarz	
17+19-21	1	40360320	Beinstützenrohr abschw. 235mm kpl.	Länge: X
o.B.	1	40360330	Beinstützenrohr abschw. 305mm,	Länge: X
18-20	1	40360122	Beinstützenrohr verklebt 235 mm rechts, inkl. Montageschraube	Länge: X
o.B.	1	40360132	Beinstützenrohr verklebt 305 mm rechts, inkl. Montageschraube	Länge: X
19	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x16	
20	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	
21	1		O-Ring 12x2,2 mm, schwarz	
22-23	2	40390299	Montageset Beinstützenrohr	
22	1		Gewindehülse M6x19,5 verklebt	




23	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12	
24	1	690101	Zugschnapper ø6/M10x1x31 mit Arretierung	
9+15+2 4	1	400902	Verriegelung kpl. für Beinstützen - Innenanbau - für durchgehende Fußplatte	links/rechts



## Beinstütze geteilt, seitlich hochklappbar, Anbau außen 403612

Für Unterschenkelhöhe minus Sitzkissen: Standard-Höhe 31,5 bis 48cm, XL-Höhe 35,5 bis 52cm, Bei Rahmen gerade erst ab SB 28

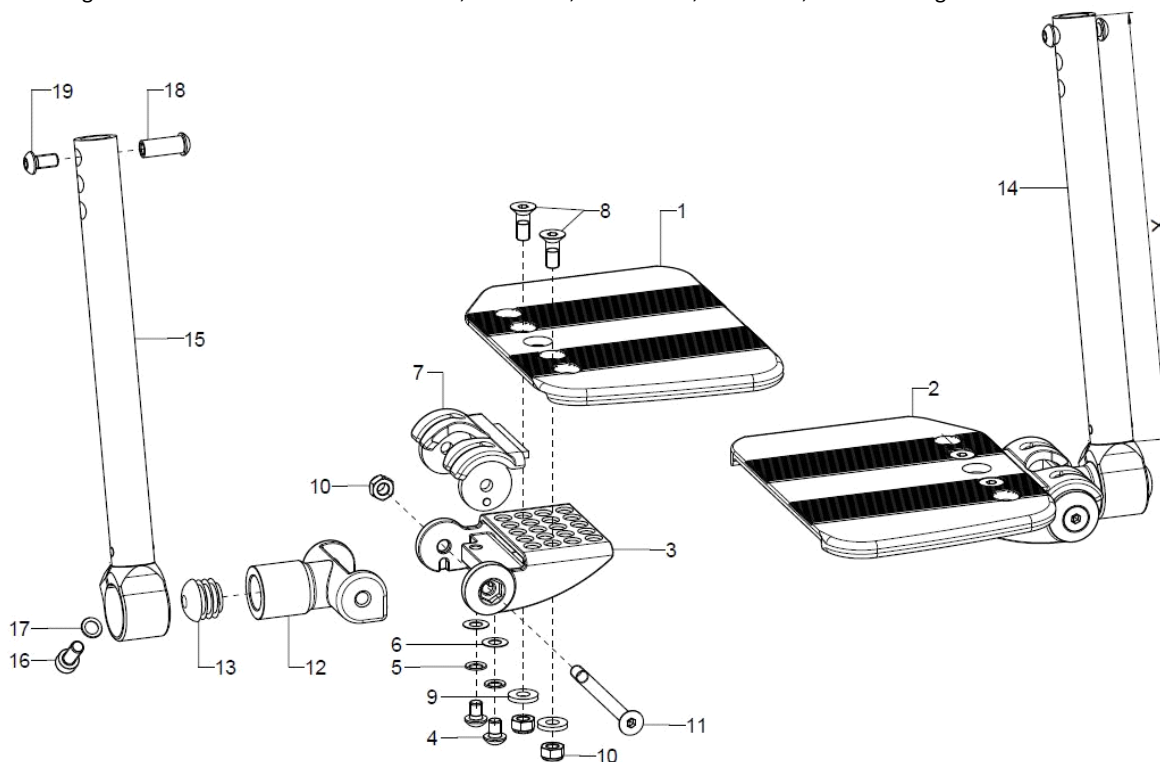


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-19	1	403612	Beinstütze, geteilt, seitlich hochklappbar, Anbau außen, kpl.	SB, Farbe, Rahmenvariante: abduziert, gerade, USL
1	1	40361000	Fußplatte 8mm geteilt, rechts	SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade
2	1	40361100	Fußplatte 8mm geteilt, links	SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade
3-7	2	40361020	Einstellteil geteilt inkl. Rastteil	
4	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x8	
5	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	
6	2		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,3 - A2	
7	1	40360102	Rastteil für Fußplatte	
8-11	1	40360299	Montageset Einstellteil	
8	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x16	
9	2		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	
10	3		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
11	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x75	
12-13	2	40360205	Adaptergelenk, schwarz für geteilte/wegschwenkbare Beinstütze (Anbau aussen) incl. Stopfen	
13	1		Stopfen mit Lamellen für Rohr Ø20x1-2, schwarz	
14+16+17	1	40360121	Beinstützenrohr verklebt 235 mm links, inkl. Montageschraube	Länge: X
o.B.	1	40360131	Beinstützenrohr verklebt 305 mm links, inkl. Montageschraube	Länge: X
15+16+17	1	40360122	Beinstützenrohr verklebt 235 mm rechts, inkl. Montageschraube	Länge: X
o.B.	1	40360132	Beinstützenrohr verklebt 305 mm rechts, inkl. Montageschraube	Länge: X
16	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x16	
17	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	
18-19	2	40390299	Montageset Beinstützenrohr	
18	1		Gewindehülse M6x19,5 verklebt	
19	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12	




## Beinstütze geteilt, seitlich hochklappbar, Anbau innen 403602

Für Unterschenkellänge minus Sitzkissen: Standard-Höhe 4,5 bis 32cm, XL-Höhe 8,5 bis 36cm, Bei Rahmen gerade erst ab SB 30

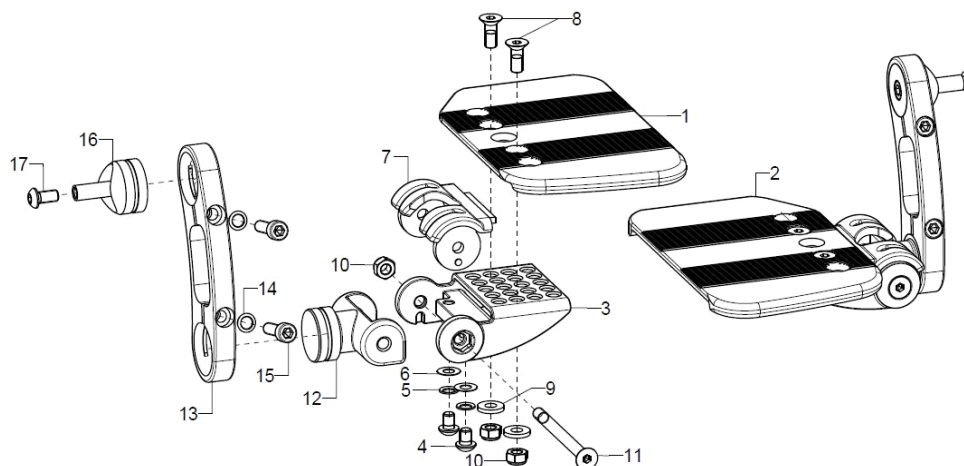


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-17	1	403602	Beinstütze, geteilt, seitlich hochklappbar, Anbau innen, kpl.	SB, Farbe, Rahmenvariante: abduziert, gerade
1	1	40361000	Fußplatte 8mm geteilt, rechts	SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade
2	1	40361100	Fußplatte 8mm geteilt, links	SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade
3-17	2	40362002	Anbau Beinstütze geteilt Innen, kpl. (Einstellteil, Arretierteil, Gelenk, Positionierteil (Angabe Länge), Anbindungskonus, Montagezubehör)	
3-7	2	40361020	Einstellteil geteilt inkl. Rastteil	
4	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x8	
5	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
6	2		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,3 - A2	
7	2	40360102	Rastteil für Fußplatte	
8-11	2	40360299	Montageset Einstellteil	
8	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x16	
9	2		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	
10	3		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
11	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x75	
12	2	40360400	Adapter Anbau innen geteilt	
13	2	40390101	Positionierlasche FI 12x125x41,9 kurz	Bis USL 28cm
altern.	2	40390110	Positionierteil FI 12 x 175 x 42,1	Ab USL 29cm
14-15	2	40390199	Montageset Positionierteil	
14	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
15	2		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x25	
16-17	2	40390399	Montageset Fußbrettanbindung	
16	1		Gewindehülse M6x22 verklebt	
17	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12	

## Fußschale

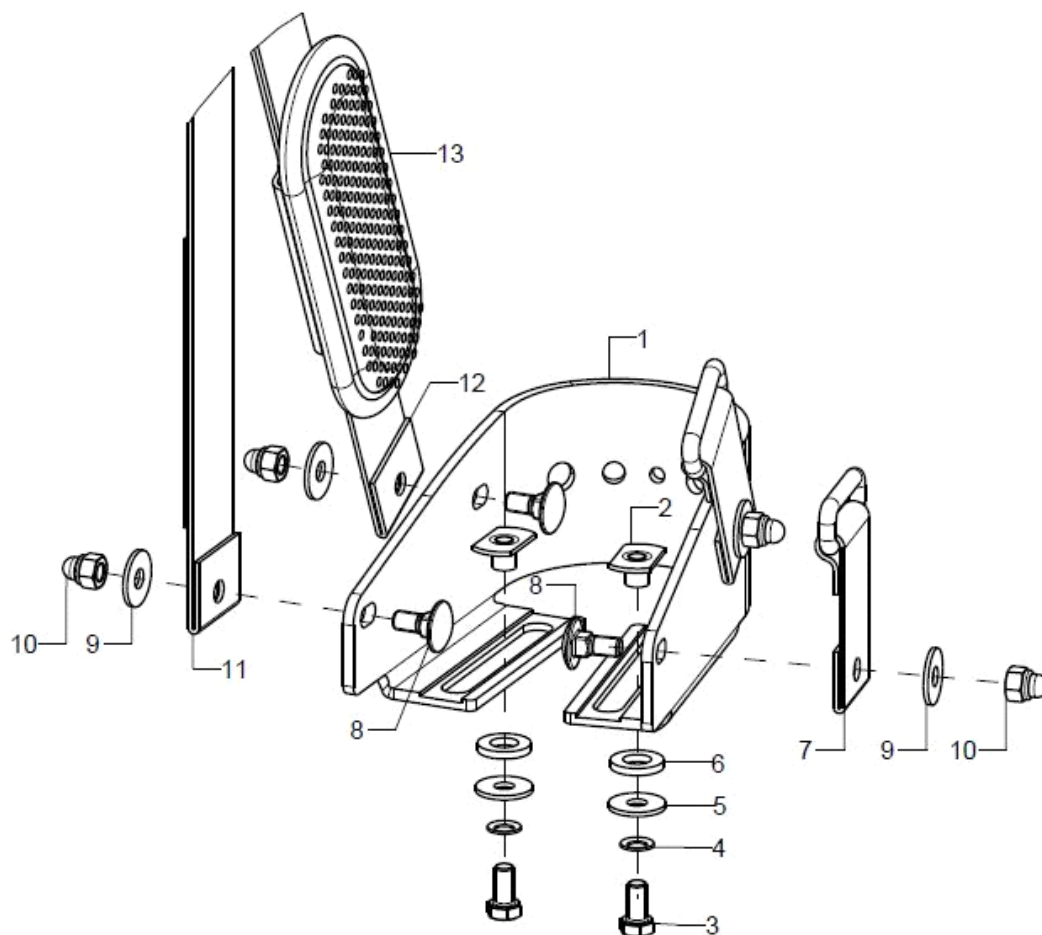


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-6	2	40551501	Fußschale Größe 1 (125x80) bis ca. Fußbreite 6,5 cm, schwarz incl. Montagematerial	
altern.	2	40551502	Fußschale Größe 2 (145x100) bis ca. Fußbreite 8 cm, schwarz incl. Montagematerial	
altern.	2	40551503	Fußschale Größe 3 (165x120) bis ca. Fußbreite 9,5 cm, schwarz incl. Montagematerial	
2	1		Anschweißmutter C - M5x7,5	
3	1		Sechskantschraube ISO 4017 (DIN 933) - M5x10	
4	1		Sicherungsscheibe S5 - FST	
5	1		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4	
6	1		Scheibe verstärkt D14/d7,4x2	
7-13	2	40201501	Fußschalengurt Gr.1 vorne/hinten (2-teilig komplett mit Polster) incl. Montagematerial zur Montage an Fußschale	
altern.	2	40201502	Fußschalengurt Gr.2 vorne/hinten (2-teilig komplett mit Polster) incl. Montagematerial zur Montage an Fußschale	
altern.	2	40201503	Fußschalengurt Gr.3 vorne/hinten (2-teilig komplett mit Polster) incl. Montagematerial zur Montage an Fußschale	

Wadenband

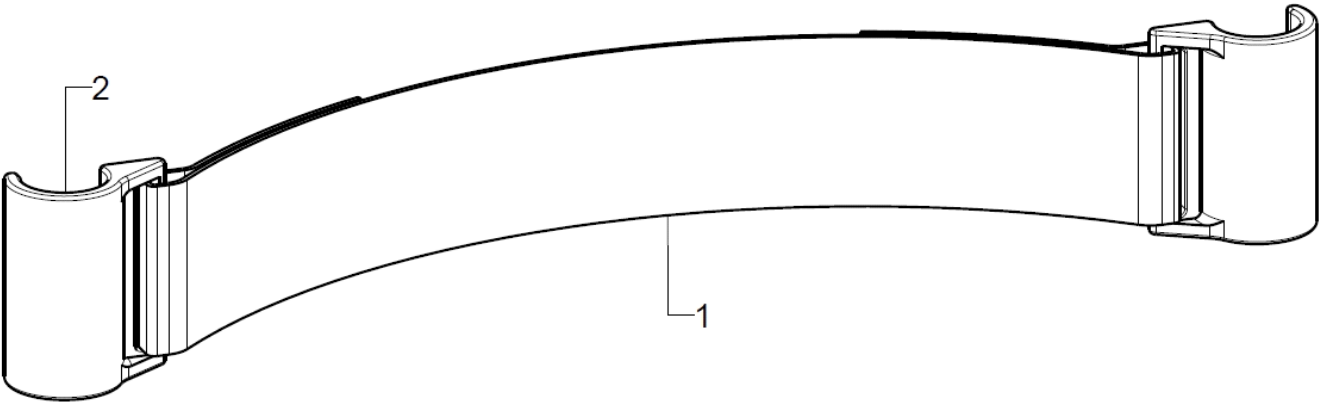

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-2	1	4041	Wadenband kpl.	SB, Rahmenvariante: abduziert, gerade
1	1	404108	Wadenbandgurt	SB, Rahmenvariante: abduziert, gerade
2	2	404106	Wadenbandhalter R12, schwarz	

# Kreuzstrebe + Sitzbespannung

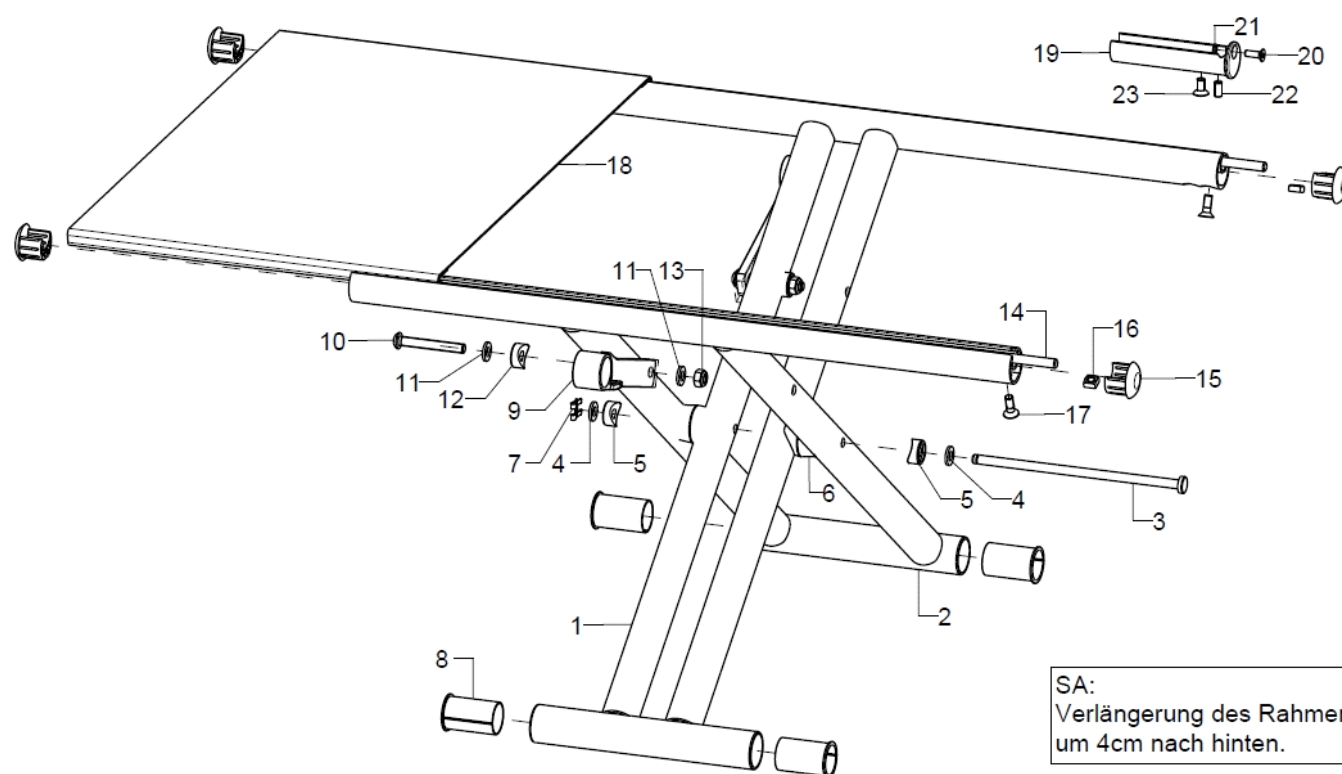


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-17	1	582701	Kreuzstrebe kpl. Jump beta Sport	SB, ST, Farbe
o.B.	1	582702	Kreuzstrebe kpl. Jump beta Sport mit Sitzschalenaufbau	SB, ST, Farbe
o.B.	1	582704	Kreuzstrebe kpl. Jump beta BSA	SB, ST, Farbe
o.B.	1	582705	Kreuzstrebe kpl. Jump beta BSA mit Sitzschalenaufbau	SB, ST, Farbe
o.B.	1	582706	Kreuzstrebe kpl. Jump beta XL	SB, ST, Farbe
o.B.	1	582707	Kreuzstrebe kpl. Jump beta XL mit Sitzschalenaufbau	SB, ST, Farbe
1	1		Kreuzstrebenteil rechts	Rahmenvariante, SA, XL, SB, ST, Farbe
2	1		Kreuzstrebenteil links	Rahmenvariante, SA, XL, SB, ST, Farbe
3-8	1	58260298	Montageset Kreuzstrebe	
3	1		Bolzen ähnlich DIN 1435	
4	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
5	2		Sattelscheibe Ø16, R11	
6	4		Sattelscheibe schwarz Nenn-ø 24/6	
7	1		SL Sicherung für Bolzen und Wellen 6	
8	4	582604	Klemmbuchse d/D=20/22 (35 mm) für Handbremshebel bei Rundrohr / Anbau Kreuzstrebe	
9-13	2	582603	Kreuzstrebenlasche inkl. Montageset	SB, XL?
10-13	2	58260399	Montageset Kreuzstrebenlasche	
10	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45	
11	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
12	1		Sattelscheibe Ø16, R11	
13	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
14-17	2	191408	Bespannungsstange inkl. Montageschraube	ST
15	2	58260501	Endstopfen für Sitzprofil	Set (2 Stück)
16	1		Vierkantmutter DIN 557 – M5	
17	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x14	



18	1	1914	Sitzbespannung	SB, ST
19-23	2	582605	Sitzverlängerung inkl. Montagezubehör	
20	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M4x12	
21	1		Sicherungsscheibe S4 - FST	
22	1		Gewindestift mit Innensechskant ISO 4026 (DIN 913), M5x10	
23	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x10	

## Sitzfix + Sitzverlängerung

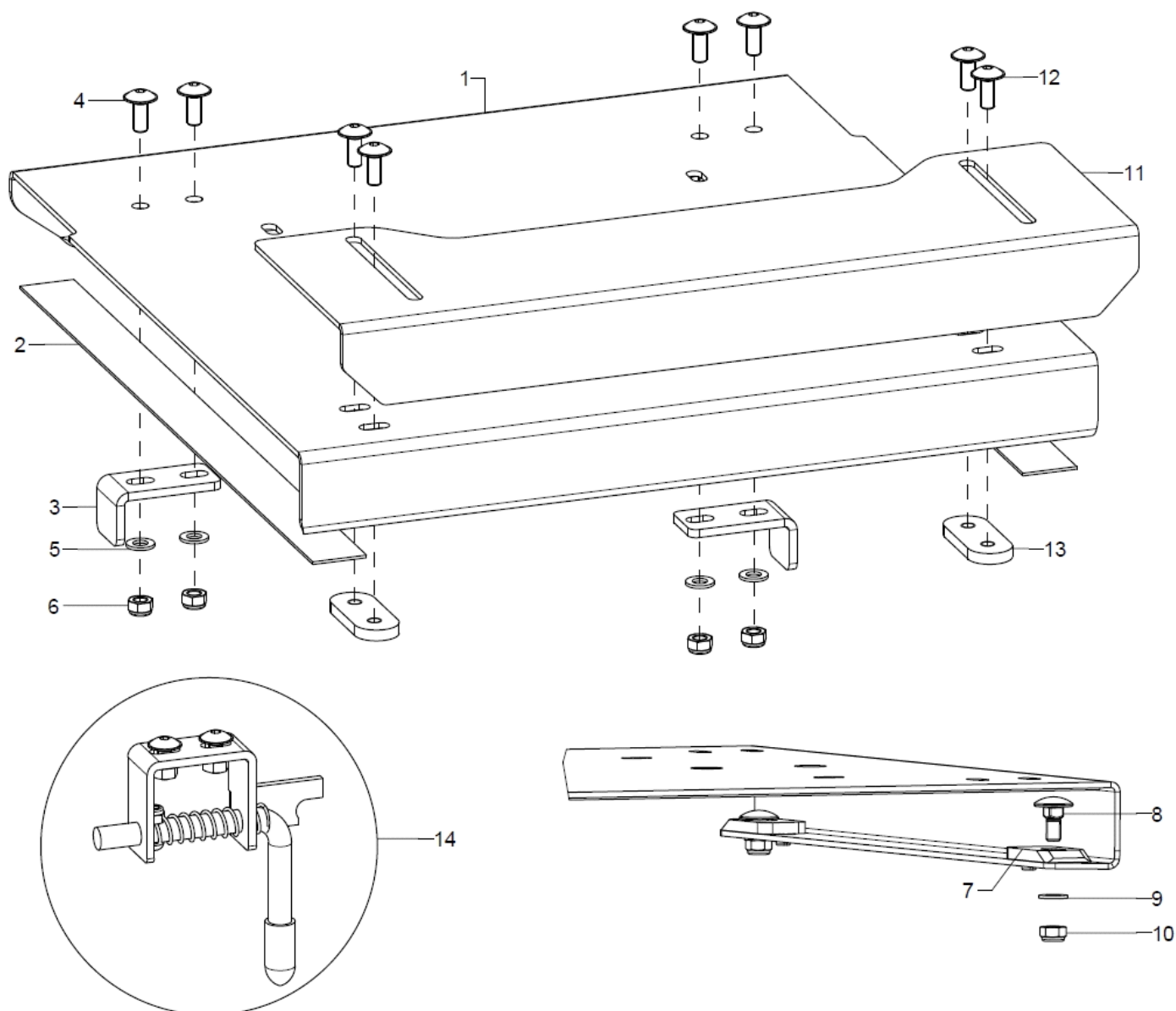

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-10	1	1926	Sitzfix Jump, inkl. Flauschband	SB, ST, Farbe
2	2		Flauschband selbstklebend 25mm, schwarz	
3-6	2	191103	Fixierwinkel inkl. Montagezubehör	
4	4		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x12	
5	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3	
6	4		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5	
7-10	2	192601	Keil inkl. Montagezubehör	
8	4		Flachrundschauben DIN 603 M5x12	
9	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3	
10	4		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5	
11-13	1	191107	Sitzverlängerung inkl. Montagezubehör	SB, Farbe
12	4		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x10	
13	2		Lasche 4x16x40	
14	2	192021	Sitzverriegelung, kpl.	Links/rechts






Sitzkissen

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
o.B.	1	891002	Sitzformteil, anatomisch geformt, incl. Bezug	SB, ST, Bezugsfarbe
o.B.	1	891001	Sitzformteil, anatomisch geformt, ohne Bezug	SB, ST
o.B.	1	891003	Wechselbezug für Sitzformteil, anatomisch geformt	SB, ST, Bezugsfarbe
o.B.	1	891004	Inkontinenzbezug für Sitzformteil, anatomisch geformt	SB, ST
o.B.	1	8003	Sitzkissen, Verbundschaum 3 cm mit Bezug	SB, ST, Bezugsfarbe
o.B.	1	8005	Sitzkissen, Verbundschaum 5 cm mit Bezug	SB, ST, Bezugsfarbe
o.B.	1	8103	Sitzkissen, Relaxschaum 3 cm mit Bezug	SB, ST, Bezugsfarbe
o.B.	1	8105	Sitzkissen, Relaxschaum 5 cm mit Bezug	SB, ST, Bezugsfarbe
o.B.	1	800050	Bezug Sitzkissen Trevira	SB, ST, Dicke Sitzkissen, Bezugsfarbe
o.B.	1	8603	Inkontinenzbezug für Standardkissen 3 cm (vom Umtausch ausgeschlossen)	SB, ST
o.B.	1	8605	Inkontinenzbezug für Standardkissen 5 cm (vom Umtausch ausgeschlossen)	SB, ST


Stoffmuster	XX
schwarz	30
grau	31
nachtblau	32
ultramarinblau	33
petrol	34
applegreen	35
bordeauxrot	36
rot	37
pink	38

## Abduktionskeil

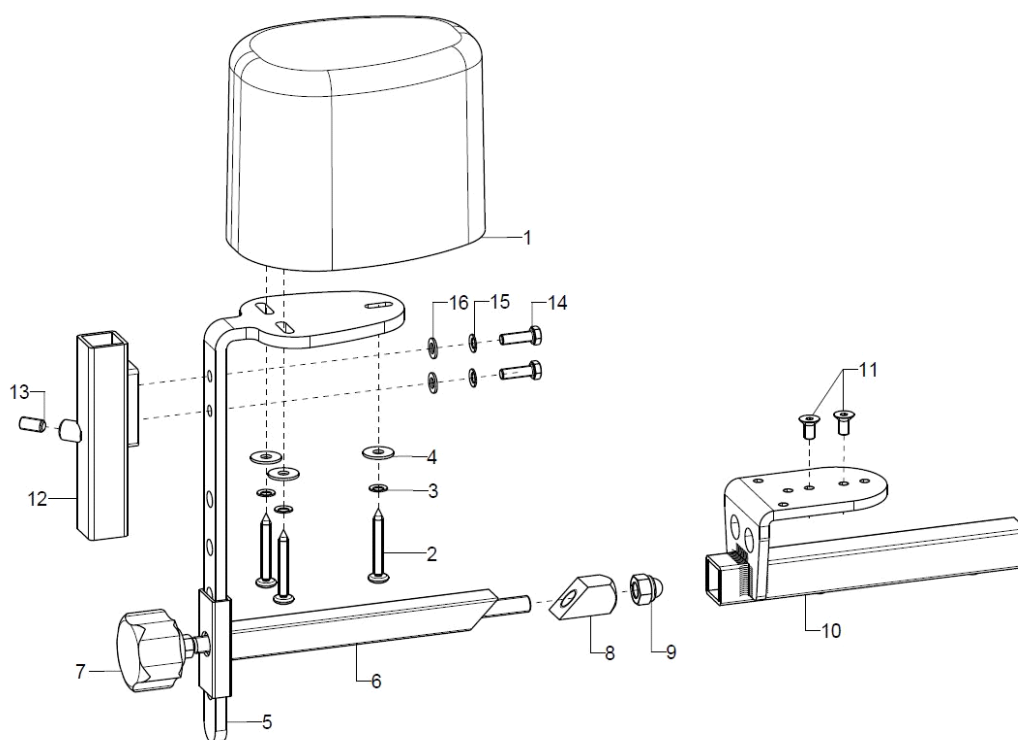


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-10	1	1952	Abduktionskeil Größe S, kpl., Halter mit Polster inkl. Montageteile	
o.B.	1	1953	Abduktionskeil Größe M, kpl., Halter mit Polster inkl. Montageteile	
o.B.	1	1954	Abduktionskeil Größe L, kpl., Halter mit Polster inkl. Montageteile	
1	1	195002	Abduktionskeilpolster Größe S (93x66x90 mm) incl. Montageschrauben	LxBxH 93x66x90 mm
o.B.	1	195003	Abduktionskeilpolster Größe M (113x82x100 mm) incl. Montageschrauben	LxBxH 113x82x100 mm
o.B.	1	195004	Abduktionskeilpolster Größe L (128x92x100 mm) incl. Montageschrauben	LxBxH 128x92x100 mm
2-4	1	19500299	Montagezubehör Abduktionskeil an Haltewinkel	
2	3		Spanplattensch. Flachrund m. Kreuzschl. 5x35 vz	
3	3		Sicherungsscheibe S5 - FST	
4	3		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3	
5-11	1	1951	Halter für Abduktionskeil (ohne Keil), Aufnahme, Haltewinkel Einschubhalter mit Klemmung kpl. incl. Montagematerial	
5	1	195101	Haltewinkel für Abduktionskeilpolster, schwarz	
6	1	195103	Einschubhalter 15x15 mm für Abduktionskeilaufnahme, schwarz	
7-9	1	684004	Klemmset für Gesäßpelotte oder Abduktionskeil	
7	1		Gewindestange M6/M8 kpl.	
8	1		Klemmteil - Gesäßpelotte, 4kt 15x15x30	
9	1		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M8	
10	1	195102	Schweißteil Aufnahme mit Flanschwinkel, inkl. Montagezubehör	
11	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x10	
12-16	1	400105	Adaptieraufnahme vierkant für Therapietisch 15x15x100, schwarz, incl. Montageschrauben und Klemmung	
13	1		Gewindestift mit Innensechskant ISO 4026 (DIN 913), M6x12	
14	2		Sechskantschraube ISO 4017 (DIN 933) - M5x16	
15	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
16	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3	

## Therapietisch Variante 1 seitlich wegklappbar

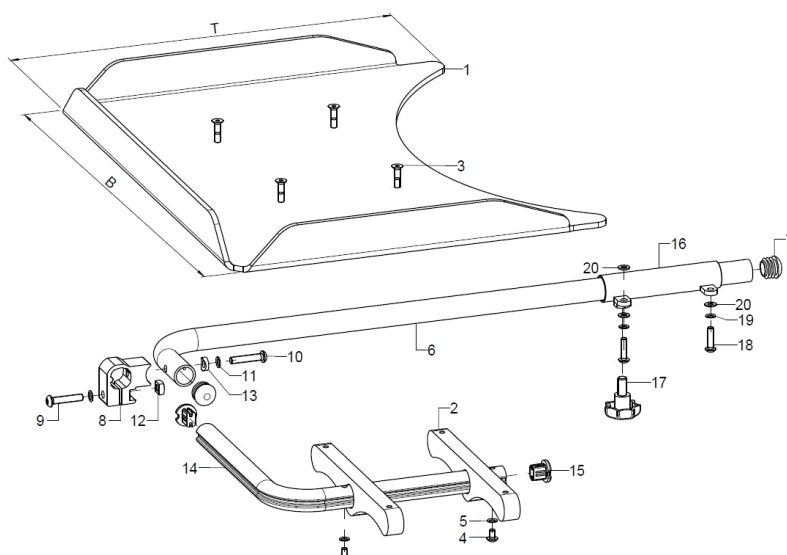


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-20	1	9204XX	Therapietisch Variante 1 seitlich wegklappbar kpl.,	Holz, Polycarbonat, Größe, Seitenteil
1	1	920030	Therapietisch aus Polycarbonat Gr.1, BxT 45x36 cm (ohne Montageset)	XX=10, Empfohlen SB28 –30
o.B.	1	920031	Therapietisch aus Polycarbonat Gr.2, BxT 59x45 cm (ohne Montageset)	XX=11, Empfohlen SB32 –40
o.B.	1	920032	Therapietisch aus Polycarbonat Gr.3 (B70xT50)	XX=12, Empfohlen >SB42
o.B.	1	920033	Therapietisch Gr.1 (B50xT40) Holz	XX=13, Empfohlen SB26 –30
o.B.	1	920034	Therapietisch Gr.2 (B60xT50) Holz	XX=14, Empfohlen SB32 –42
2-20	1	9204	Montagezubehör Therapietisch Variante 1 kpl. (ohne Tisch)	
2	2	920403	Tragkonsole umlegbar 15x35x200	
3-5	1	92040399	Montageset Tragkonsole	
3	4		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x20	
4	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x8	
5	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
6	1	920402	Zsb. Tragrohr inkl. Stopfen	
7	2		Stopfen mit Lamellen für Rohr ø20x1-2, schwarz	
8	1	92040403	Klemmteil inkl. Montagezubehör	
9-13	1	92040499	Montageset Klemmteil	
9	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30	
10	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35	
11	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
12	1		Vierkantmutter DIN 557 – M6	
13	1		Sattelscheibe ø 12/5x2.5	
14	1	920404	Klappbügelrohr inkl. Profilrohr-Endstopfen	
15	2	620105	Stopfen für Profilrohr	
16	1	920405	Rohraufnahme, Schweißteil, rechts inkl. Montagezubehör Rohraufnahme	Anbau rechts bei S-teil standard
o.B.	1	920406	Rohraufnahme, Schweißteil, links inkl. Montagezubehör Rohraufnahme	Anbau links bei S-teil standard
o.B.	2	920407	Rohraufnahme, Schweißteil inkl. Montageset	Bei Kleider- und Radschutz
17-20	2	92040599	Montagezubehör Rohraufnahme	
17	1		7-Sterngriff ø32 - M8x15 Außengewinde, schwarz	
18	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x20	
19	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
20	3		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3	

## Therapietisch Variante 2 an Armpolster gesteckt

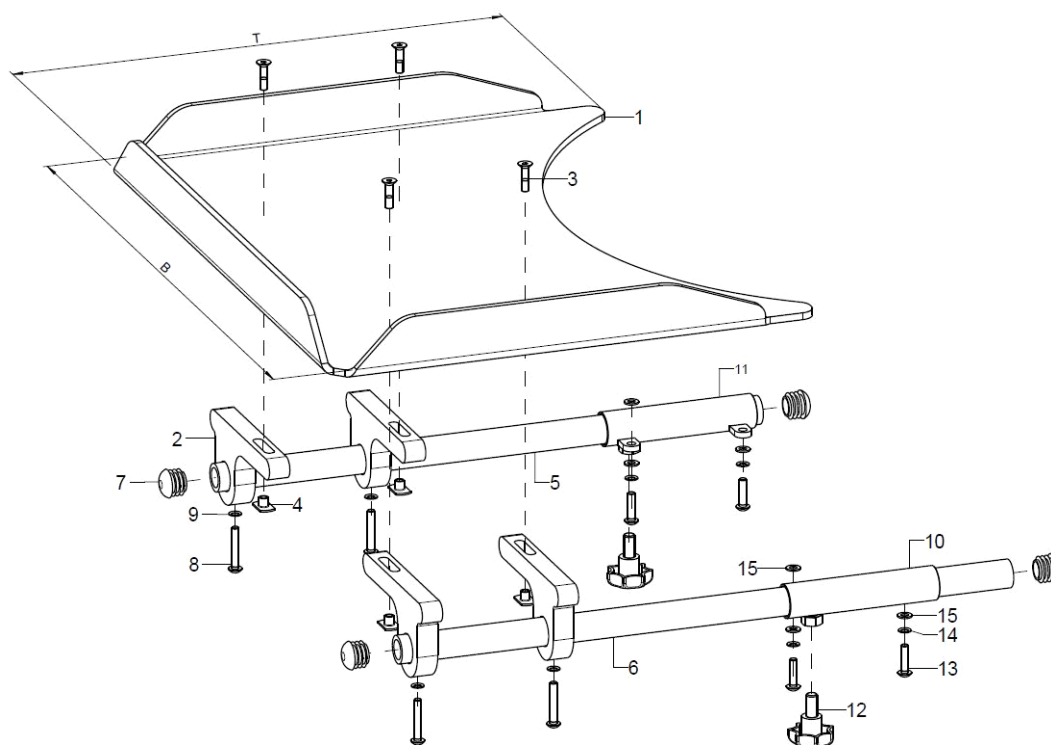




Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-15	1	9207XX	Therapietisch Variante 2 an Armpolster kpl.	Holz, Polycarbonat, Größe, Seitenteil
1	1	920030	Therapietisch aus Polycarbonat Gr.1, BxT 45x36 cm (ohne Montageset)	XX=10, Empfohlen SB28 –30
o.B.	1	920031	Therapietisch aus Polycarbonat Gr.2, BxT 59x45 cm (ohne Montageset)	XX=11, Empfohlen SB32 –40
o.B.	1	920032	Therapietisch aus Polycarbonat Gr.3 (B70xT50)	XX=12, Empfohlen >SB42
o.B.	1	920033	Therapietisch Gr.1 (B50xT40) Holz	XX=13, Empfohlen SB26 –30
o.B.	1	920034	Therapietisch Gr.2 (B60xT50) Holz	XX=14, Empfohlen SB32 –42
2-15		9207	Montagezubehör Therapytisch Variante 2 an Armpolster	
2	4	920705	Tragkonsole steckbar 15x61x120	
3-4	1	92070599	Montagezubehör Tragkonsole	
3	4		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x20	
4	4		Anschweißmutter C - M5x7,5	
5	1	920702	Tragrohr Ro 20x3x400 inkl. Montagezubehör	
6	1	920704	Tragrohr Ro 20x3x450 inkl. Montagezubehör	
7-9	2		Montageset Tragrohr	
7	2		Stopfen mit Lamellen für Rohr ø20x1-2, schwarz	
8	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x30	
9	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
10	1	920703	Rohraufnahme, Schweißst., links inkl. Montagezubehör	Bei Seitenteil standard
11	1	920701	Rohraufnahme, Schweißst., rechts inkl. Montagezubehör	Bei Seitenteil standard
o.B.	2	920407	Rohraufnahme, Schweißst. inkl. Montageset	Bei Kleider- und Radschutz
12-15	2	92040599	Montagezubehör Rohraufnahme	
12	1		7-Sterngriff ø32 - M8x15 Außengewinde, schwarz	
13	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x20	
14	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
15	3		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3	

## Rückenrohr Standard

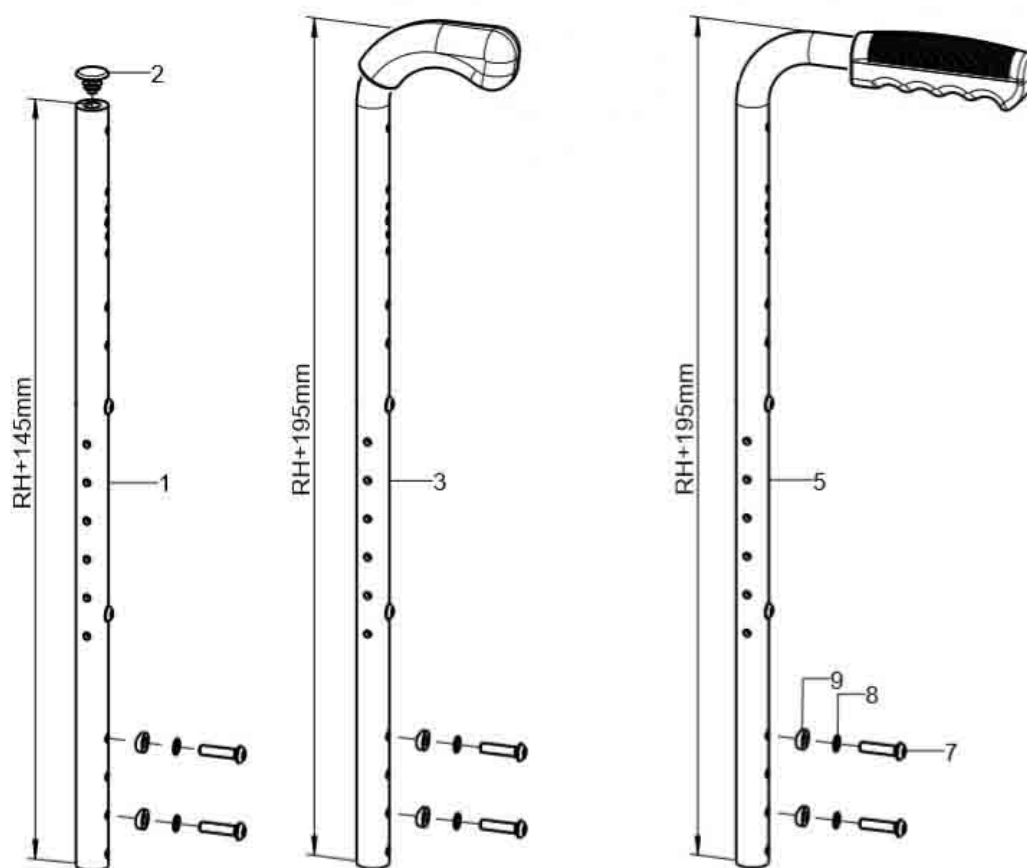


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-2	2	623705XX	Rückenrohr 90° standard inkl. Stopfen	XX=RH
o.B.	2	623707XX	Rückenrohr Stahl 90° standard inkl. Stopfen	XX=RH
2	1		Lamellenstopfen f. Ø20x5mm	
3	2	623806XX	Rückenrohr 90° standard, Griff kurz	XX=RH
o.B.	2	623807XX	Rückenrohr Stahl 90° standard, Griff kurz	XX=RH
5	2	623706XX	Rückenrohr 90° standard, Griff lang	XX=RH
o.B.	2	623708XX	Rückenrohr Stahl 90° standard, Griff lang	XX=RH
7-9	2	62370099	Montageset Rückenrohr	
7	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25	
8	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
9	2		Sattelscheibe ø12/6,2x2,5	

## Rücken winkelverstellbar / winkeleinstellbar

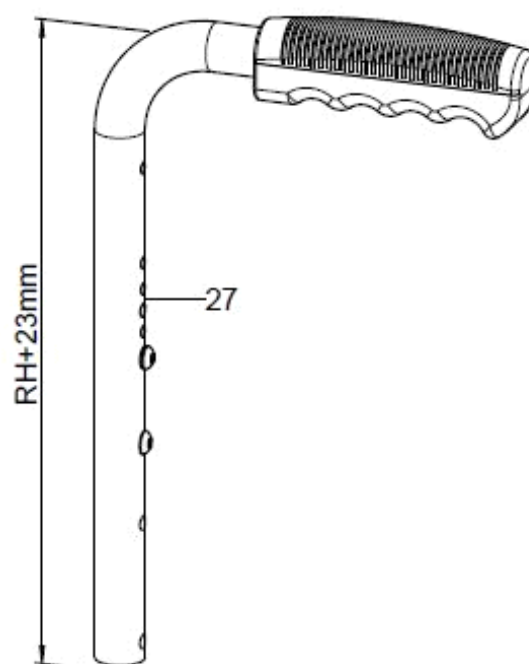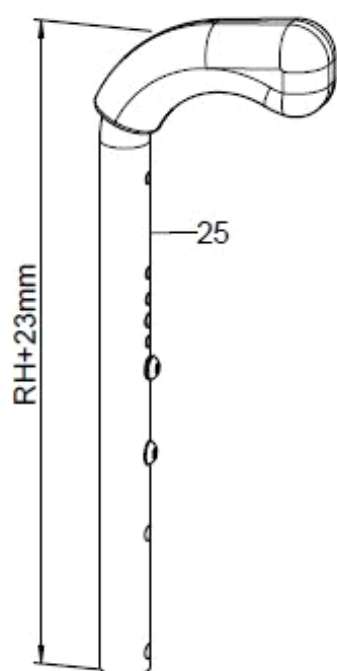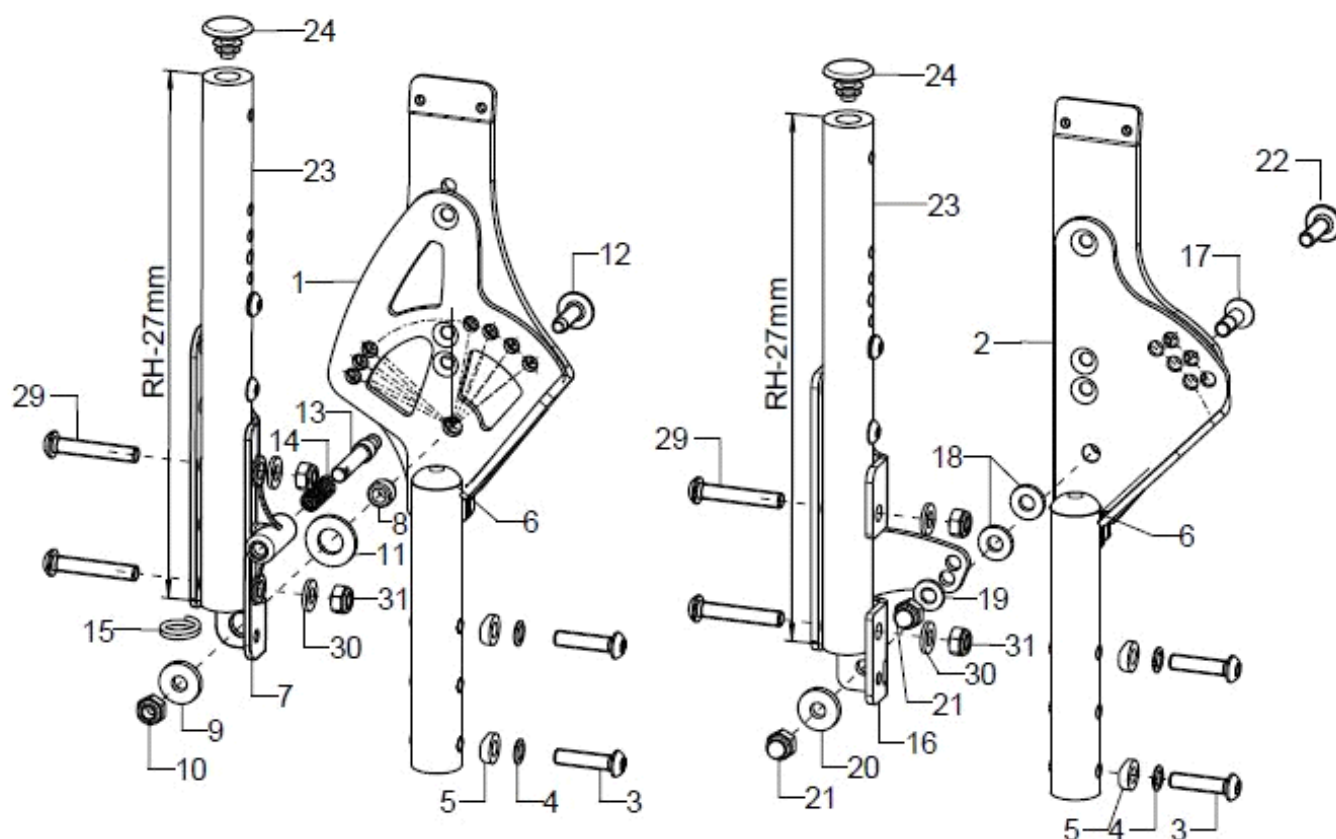




Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1a	1	62370202	Rückenwinkelverstellung, rechts	
o.B.	1	62370201	Rückenwinkelverstellung, links	
1b	1	61110202	Rückenwinkelverstellung rechts für Desk-/Langes Seitenteil, inkl. Kunststoffschrauben	Bei Desk/langem Seitenteil
o.B.	1	61110201	Rückenwinkelverstellung links für Desk-/Langes Seitenteil, inkl. Kunststoffschrauben	Bei Desk/langem Seitenteil
2a	1	61110102	Winkелеinstellung, rechts	
o.B.	1	61110101	Winkелеinstellung, links	
2b	1	61110104	Winkелеinstellung Desk, rechts, inkl. Kunststoffschrauben	Bei Desk/langem Seitenteil
o.B.	1	61110103	Winkелеinstellung Desk, links, inkl. Kunststoffschrauben	Bei Desk/langem Seitenteil
3-6	2	62370299	Montagezubehör Rückenwinkelverstellung	
3	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25	
4	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
5	2		Sattelscheibe ø12/6,2x2,5	
6	1		Stopfen mit Lamellen für Rohr ø18x1-2, schwarz	
7-12	1	62370204	Rückenrohrgelenk rechts kpl. inkl. Montagematerial	
o.B.	1	62370203	Rückenrohrgelenk links kpl. inkl. Montagematerial	
8-12	2	62370298	Montagezubehör U-Teil 137 mm	
8	1		Bundbuchse ø8/10x8,1	
o.B.	1		Passscheibe DIN 988 - 10x16x0,3	Bei Desk/langem Seitenteil und winkelverstellbar
o.B.	1		Passscheibe DIN 988 - 10x16x0,5	Bei Desk/langem Seitenteil und winkelverstellbar, bei großem Spiel
9	1		Scheibe DIN 7349 - 6,4	
10	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
11	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 10,5 - PA schwarz	
12	1		Flachkopfschraube m. Innensechskant und Schräge - M6x20	Bei Desk/langem Seitenteil
o.B.	1		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x20	
13-15	2	610109	Rastbolzen ø 8x44 für Rückenwinkel-verstellung incl. Feder und Drahtformring	
14	2		Druckfeder DIN 2098 0,7x7,65/9,05x21	
15	2		Schlüsselring ø25/20 mm flach, silber	
o.B.	1	61130601	Entriegelungsband winkelverstellbarer Rücken mit Schließer	SB
16	1	61110302	Rückenrohrgelenk U-Teil, schwarz, rechts für feste Winkелеinstellung incl. Montagematerial	
o.B.	1	61110301	Rückenrohrgelenk U-Teil, schwarz, links für feste Winkелеinstellung incl. Montagematerial	
17-22	2	61110399	Montagezubehör U-Teil für Winkelverstellung	
17	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x20	
18	2		Scheibe verstärkt ø14/6,2x2	
19	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
20	1		Scheibe DIN 7349 - 6,4	
21	2		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6	
22	1		Flachkopfschraube m. Innensechskant und Schräge - M6x20	Bei Desk/langem Seitenteil
o.B.	1		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x20	
23-24	2	623302XX	Rückenrohr winkelverstellbar inkl. Stopfen	XX=RH
o.B.	2	623304XX	Rückenrohr Stahl winkelverstellbar inkl. Stopfen	XX=RH
24	2		Lamellenstopfen f. ø20x5mm	
25	2	623403XX	Rückenrohr winkelverstellbar, Griff kurz	XX=RH
o.B.	2	623404XX	Rückenrohr Stahl winkelverstellbar, Griff kurz	XX=RH
27	2	623303XX	Rückenrohr winkelverstellbar, Griff lang	XX=RH
o.B.	2	623305XX	Rückenrohr Stahl winkelverstellbar, Griff lang	XX=RH

		Ersatzteilkatalog Jump beta		Rücken		Seite 35 von 102	
29-31	2	62330099	Montageset Rückenrohr winkelverstellbar an Rückenrohrgelenk				
29	2	Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35					
30	2	Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4					
31	2	Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6					




## Rücken mit Gasdruckfederverstellung

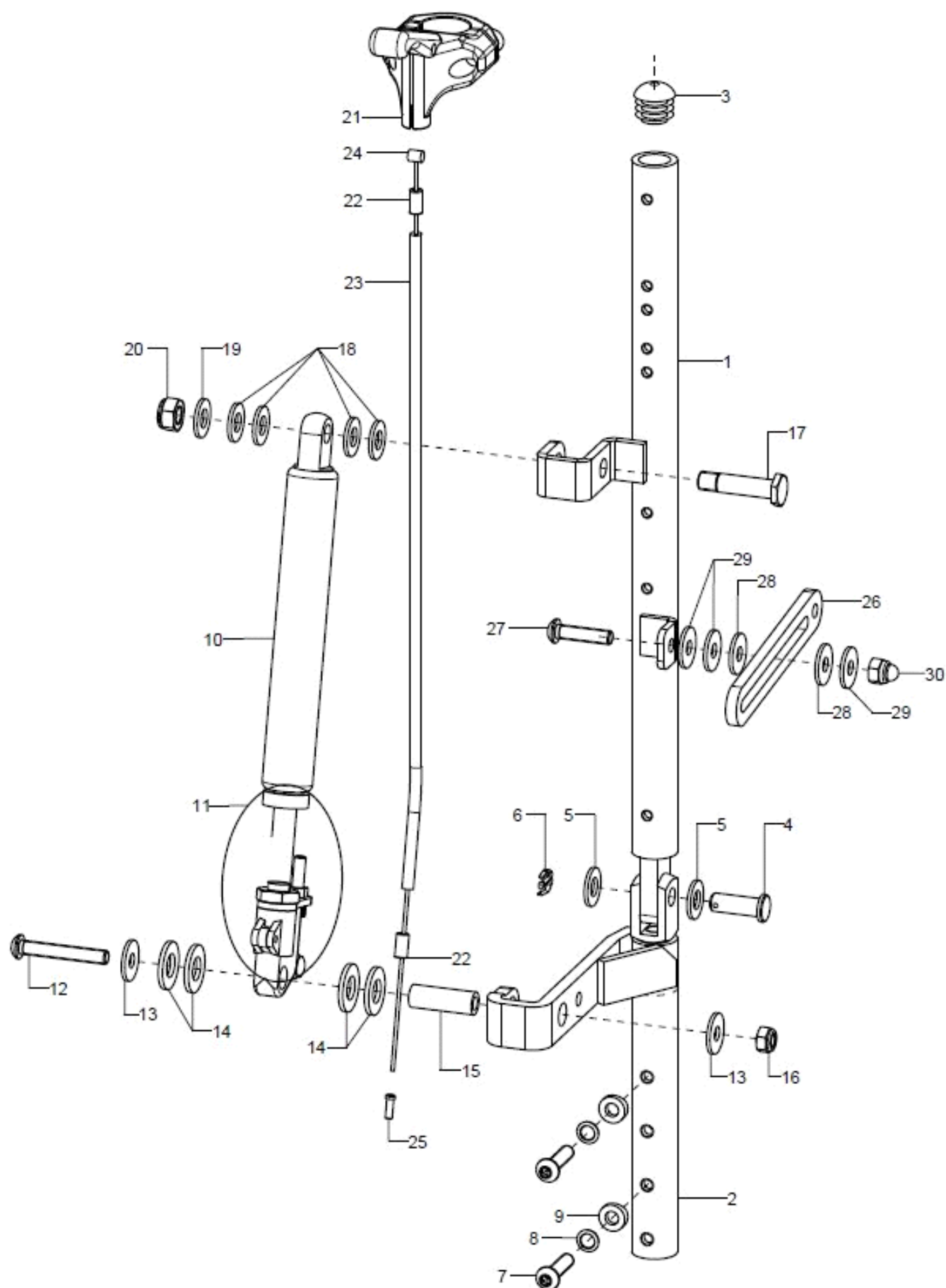



Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-30	1	6107	Rücken mit Gasdruckfederverstellung	RH
1+3-6	1	6107XX02	Rückenrohr für GDF-Rücken, rechts	XX=RH
o.B.	1	6107XX01	Rückenrohr für GDF-Rücken, links	XX=RH
2	1P	610710	Rückenrohr GDF Unterteil	links/rechts
3	1		Stopfen mit Lamellen für Rohr ø18x1-2, schwarz	
4	1		Bolzen DIN1434 kleiner Kopf ø8x23	
5	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4	
6	1		Splint DIN94 2x20	
7-9	2	62370299	Montagezubehör Rückenwinkelverstellung	
7	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25	
8	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
9	2		Sattelscheibe ø12/6,2x2,5	
10	2	190505	Gasdruckfeder 100N/40 mm Hub für GDF-Rücken	Bis SB36 und bis RH45
o.B.	2	190507	Gasdruckfeder 200N/40 mm Hub für GDF-Rücken	Ab SB38 und/oder ab RH50
11	2	190521	GDF-Auslösekopf kpl.	
12-16	2	19050599	Montageset Gasdruckfeder Auslösekopf (Schraube, Scheiben, Buchse, Mutter)	
12	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40	
13	2		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4	
14	3		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 10,5 - PA schwarz	
15	1		Distanzbuchse Ro 10x2x29	
16	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
17-20	1	190503	Passschraube M8x35 SW13 inkl. Montagezubehör	
18	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4 - PA schwarz	
19	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4	
20	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8	
21-25	1	190512	Bedieneinheit für GDF mit Auslösehebel kurz inkl. Zug, Hülle, Anschlussteile	
21	1	190513	Handauslösehebel für Gasdruckfeder ohne Feststeller	Standard
22	1	352412	Abschlußhülse gedreht aus Metall, ø5, Endkappen	
23	1	352013	Außenhülle für Bremszug schwarz, 150 cm lang	
24	1	190517	Innenzug für Gasdruckfeder ø1.3x2000, Einfachnippel	
25	1	352005	Endkappe für Innenzüge ø1-1,5 mm	Set 2 Stück
26-30	2	610703	Langlochasche 110	
27	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25	
28	2		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 - PA	
29	3		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4	
30	1		Sechskantmutter ISO 4032 (DIN 934) - M6	


Stabilisierungsstange am Rückenrohr

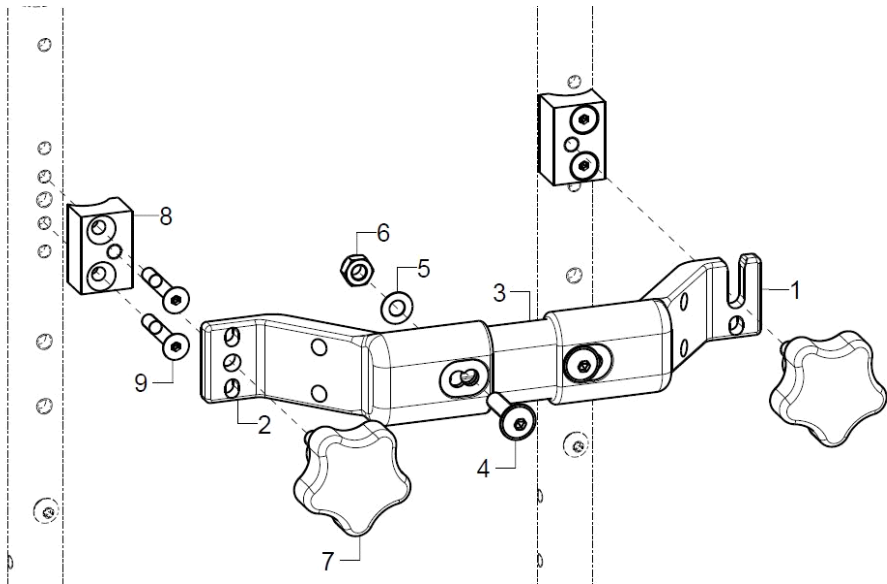

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-6		64090201	Stabilisierungsstange tief (50mm)/ABS für Faltrollstuhl	SB
1	1	64090102	Stabilisierungsstangenadapter, schwarz, tief, ABS	
2	1	64090101	Stabilisierungsstangenadapter, schwarz, tief/fest	
3-6	1	64090110	Stabilisierungsstangenrohr, schwarz	SB
4	2		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x25	
5	2		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
6	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
7	2		Distanz mit Sterngriff verklebt	
8+9	2	640701	Distanz für Stabilisierungsstange bei winkelverstellbarem Rücken	
9	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x30	

SB	L Stabilisierungsrohr	
	Rücken winkelverst.	Rücken Standard
30	155	175
32	175	195
34	195	215
36	215	235
38	235	255
40	255	275
42	275	295
44	295	315
46	315	335
48	335	355
50	355	375


# Stabilisierungsstange für ausziehbare Schiebegriffe

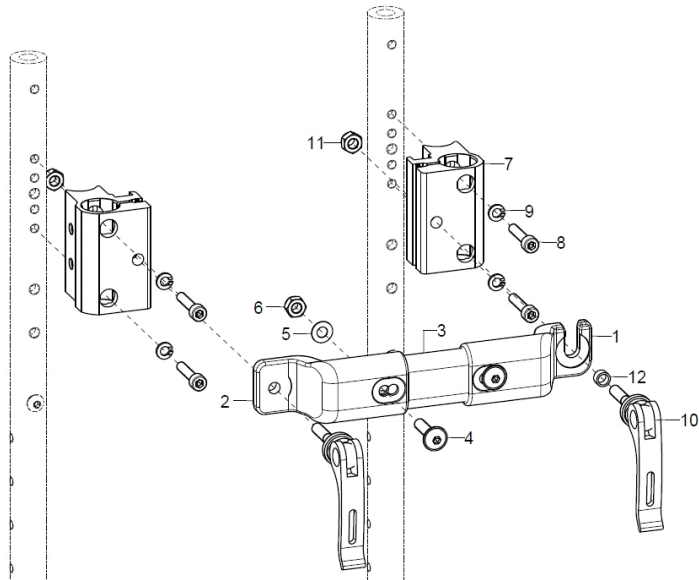

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-6	1	64090202	Stabilisierungsstange flach (30mm)/ABS für Faltrollstuhl	SB
1	1	64090104	Stabilisierungsadapter, schwarz, flach/ABS	
2	1	64090103	Stabilisierungsstangenadapter, flach/fest	
3	1	64090110	Stabilisierungsstangenrohr, schwarz	SB
4	2		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x25	
5	2		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
6	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
7-12	2	650051	Halter Schiebegriff 58mm/R10 incl. Montagematerial und Exzenterspanner	Montage an Rückenrohr (bei Rücken Standard 90°)
8	2		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M5x25	
9	2		Federring DIN 127 - A 5	
10	1	652225	Exzenterspanner Länge 35, M6x22, schwarz	
11	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
12	1		Buchse 8x6x4,5	


SB	L Stabilisierungsrohr
30	175
32	195
34	215
36	235
38	255
40	275
42	295
44	315
46	335
48	355
50	375

## Schiebegriffe

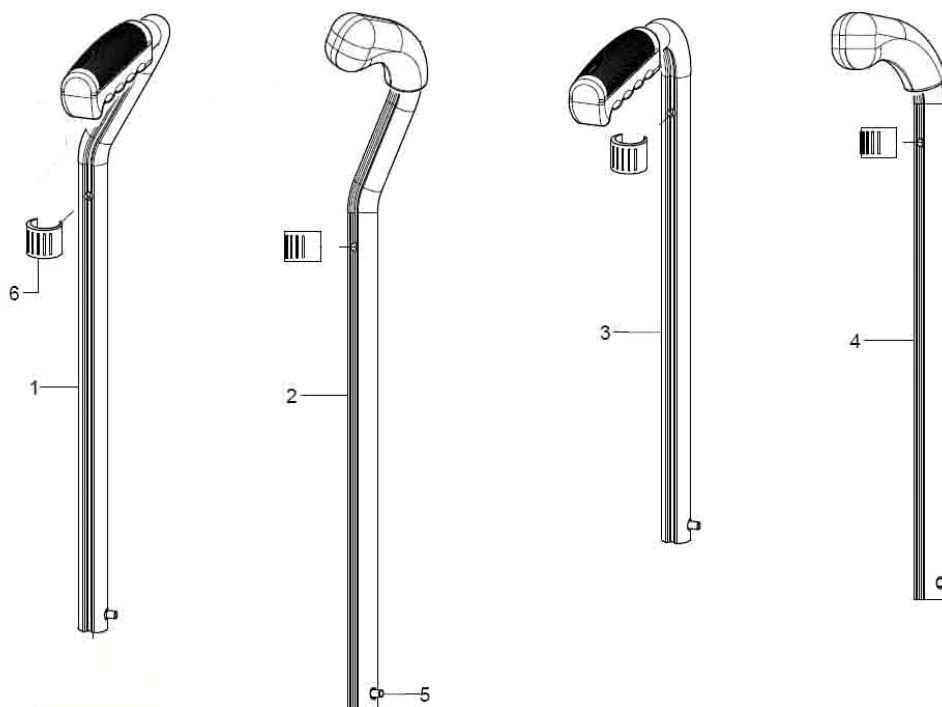

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1+5+6	1	650532	Schiebegriff 15 cm ausziehbar gekröpft -rechts- Handgriff lang incl. Stativfeder	
o.B.	1	650531	Schiebegriff 15 cm ausziehbar gekröpft -links- Handgriff lang incl. Stativfeder	
o.B.	1	650632	Schiebegriff 25 cm ausziehbar gekröpft -rechts- Handgriff lang incl. Stativfeder	
o.B.	1	650631	Schiebegriff 25 cm ausziehbar gekröpft -links- Handgriff lang incl. Stativfeder	
2+5+6	1	650552	Schiebegriff 15 cm ausziehbar gekröpft -rechts- Handgriff kurz incl. Stativfeder	
o.B.	1	650551	Schiebegriff 15 cm ausziehbar gekröpft -links- Handgriff kurz incl. Stativfeder	
o.B.	1	650554	Schiebegriff 25 cm ausziehbar gekröpft -rechts- Handgriff kurz incl. Stativfeder	
o.B.	1	650553	Schiebegriff 25 cm ausziehbar gekröpft -links- Handgriff kurz incl. Stativfeder	
3+5+6	2	650130	Schiebegriff, 15 cm ausziehbar gerade Handgriff lang incl. Stativfeder	
o.B.	2	650230	Schiebegriff, 25 cm ausziehbar gerade Handgriff lang incl. Stativfeder	
4+5+6	2	650251	Schiebegriff, 15 cm ausziehbar gerade Handgriff kurz incl. Stativfeder	
o.B.	2	650250	Schiebegriff, 25 cm ausziehbar gerade Handgriff kurz incl. Stativfeder	
5	2	650160	Stativfeder für Schiebegriffsicherung (2er Set)	2er Set
6	2	046350200010	Klemmschalengleiter schwarz, Nenn-ø 20-22	10 er Set


Schiebestange

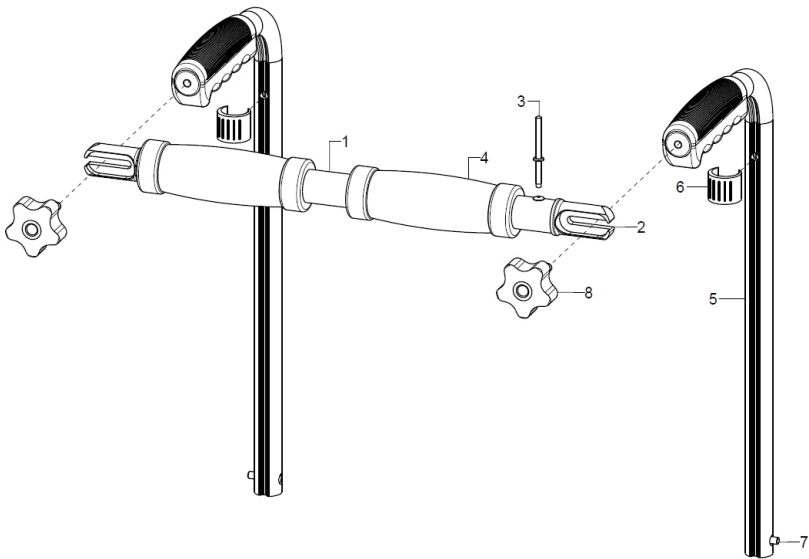

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-4	1	65500902	Schiebestangenrohr vormontiert mit Moosgummigriffen und Haltern	SB, Schiebegriff gerade - gekröpft, Standard- oder ausziehbare Schiebegriffe, Rücken standard - winkelverstellbar - GDF-winkelverstellbar
1	1		Schiebestangenrohr	
2+3	2	65500901	Halter Schiebestange abnehmbar	
3	1		Blindniet F4x18 Al/St	
4	2	655004	Griff Moosgummi 12cm	
o.B.	2	65500915	Griff Moosgummi 9cm	
5-7	2	650140	Schiebegriff 15 cm ausziehbar gerade, Handgriff für Schiebestange inkl. Stativfeder	
o.B.	2	650240	Schiebegriff 25 cm ausziehbar gerade, Handgriff für Schiebestange inkl. Stativfeder	
altern.	1	650542	Schiebegriff 15 cm ausziehbar gekröpft rechts, Handgriff für Schiebestange inkl. Stativfeder	
o.B.	1	650541	Schiebegriff 15 cm ausziehbar gekröpft links, Handgriff für Schiebestange inkl. Stativfeder	
altern.	1	650642	Schiebegriff 25 cm ausziehbar gekröpft rechts, Handgriff für Schiebestange inkl. Stativfeder	
o.B.	1	650641	Schiebegriff 25 cm ausziehbar gekröpft links, Handgriff für Schiebestange inkl. Stativfeder	
6	1	046350200010	Klemmschalengleiter schwarz, Nenn-ø 20-22	10 er Set
7	1	650160	Stativfeder für Schiebegriffsicherung (2er Set)	2er Set
6	2	65500904	Sterngriff Ø40-M6x25 mit Markierungsscheibe	

gerade Schiebegriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Griff Moosgummi 9 cm von SB30-34 cm</li> <li>- Griff Moosgummi 12 cm ab SB36 cm</li> </ul>
gekröpfte Schiebegriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Griff Moosgummi 12 cm</li> </ul>


## Rückenbespannung Standard

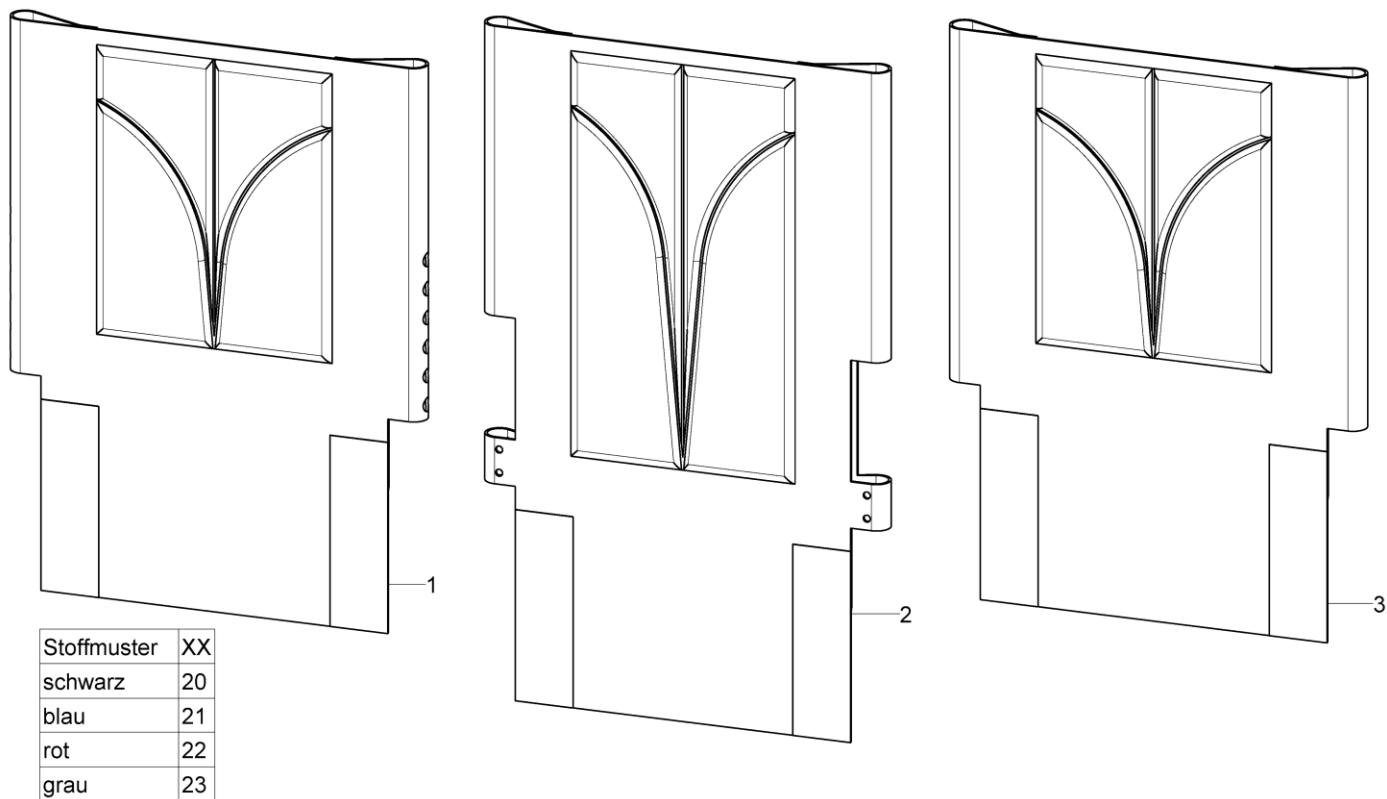

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	671102XX	Rückenbespannung standard, für Rücken 90° mit STD Seitenteil	SB, RH, XX=Farbe
2	1	671104XX	Rückenbespannung standard, für Rückenwinkelverstellung	SB, RH, XX=Farbe
3	1	671103XX	Rückenbespannung standard, für Rücken 90° mit DESK Seitenteil	SB, RH, XX=Farbe
o.B.	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16	
o.B.	2		Rosette ø13/6x2, schwarz	

## Rückenbespannung anpassbar

Alle Stoffmuster können unter [www.sorgrollstuhltechnik.de](http://www.sorgrollstuhltechnik.de) angesehen werden.

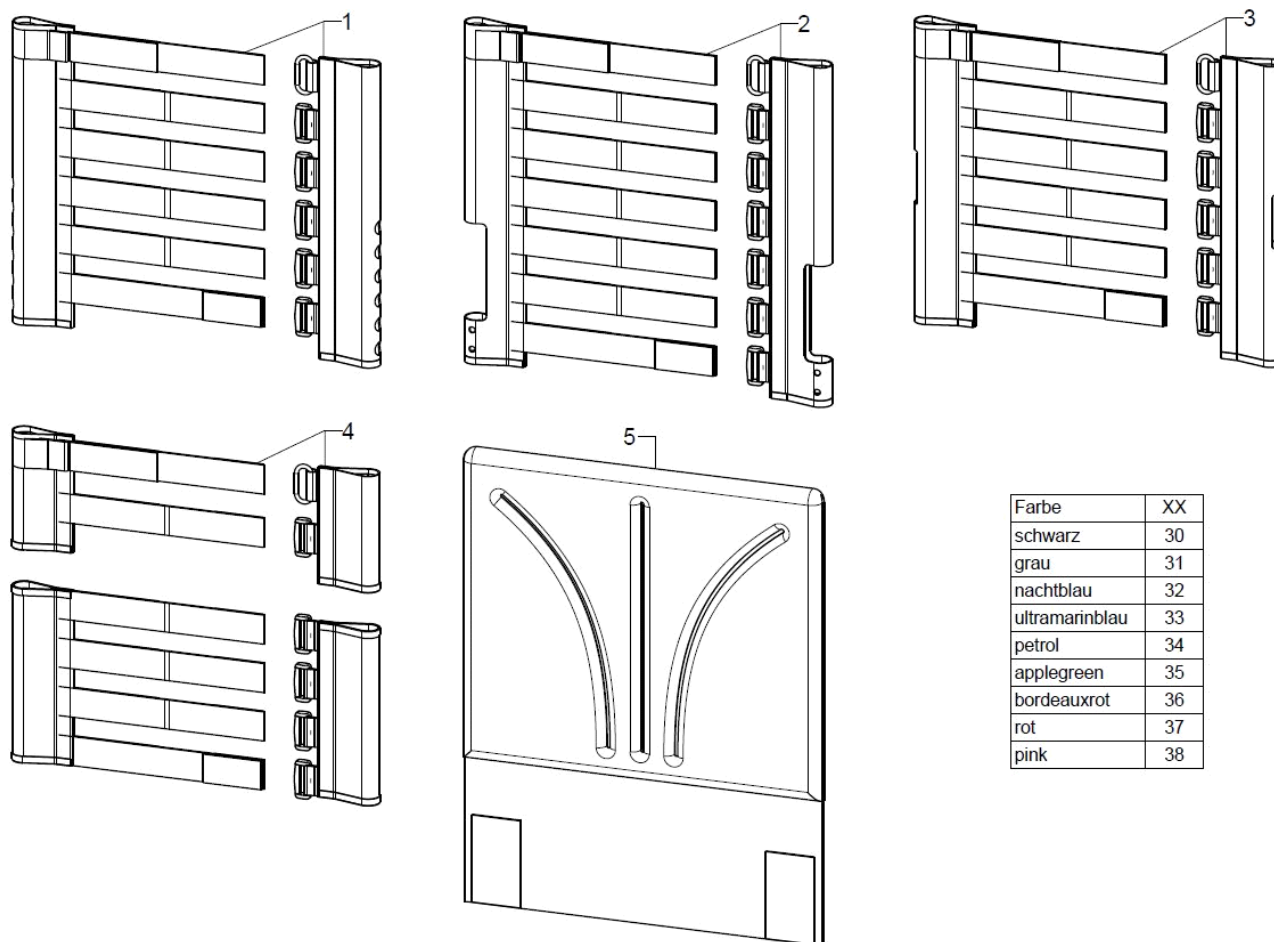


Farbe	XX
schwarz	30
grau	31
nachtblau	32
ultramarinblau	33
petrol	34
applegreen	35
bordeauxrot	36
rot	37
pink	38


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1+5	1	670102XX	Bespannung anpassbar 3-teilig, für Rücken 90° mit STD Seitenteil	SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden
2+5	1	670103XX	Bespannung anpassbar 3-teilig, für Rückenwinkelverstellung	SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden
3+5	1	610104XX	Bespannung anpassbar 3-teilig, für Rücken 90° mit Desk Seitenteil	SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden
4+5	1	610105XX	Bespannung anpassbar 5-teilig, für GDF-Rücken	SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden
1	1		Bespannung anpassbar, für Rücken 90° mit STD Seitenteil	SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden
2	1	670500	Unterteil 2-teilig der anpassbaren Rückenbespannung mit Gurtbändern	SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden
3	1		Bespannung anpassbar, für Rücken 90° mit Desk Seitenteil	SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden
4	1		Bespannung anpassbar, für GDF-Rücken 90°	SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden
5	1	670599	Überwurf Rückenbespannung universal nachspannbar mit Kissenfüllung	SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden
o.B.	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16	
o.B.	2		Rosette Ø13/6x2, schwarz	





## Muldenrücken

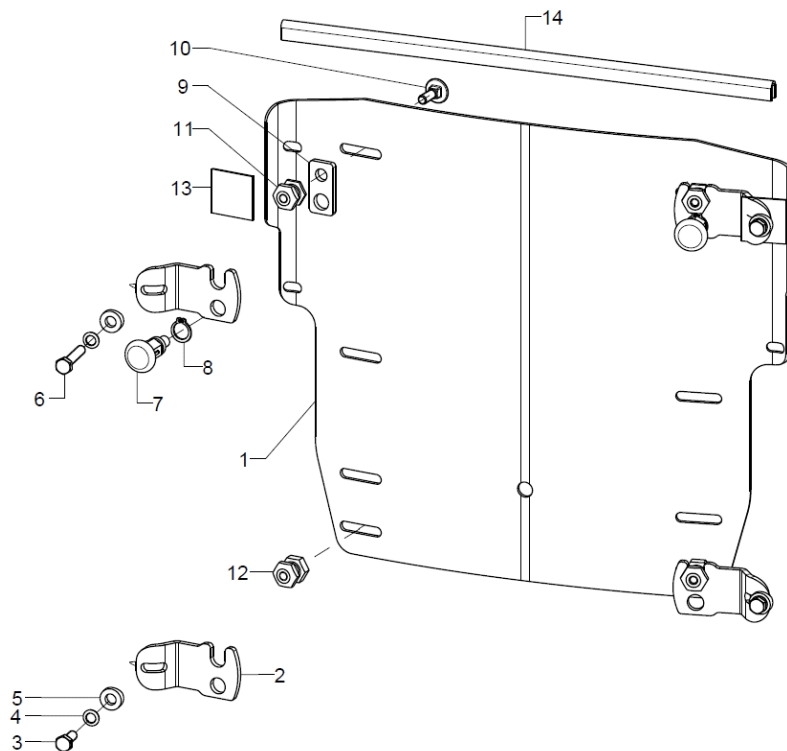

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
19	1	6930XX	Muldenrücken Modell 1, RH gerade verlängert um 2 cm	SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe
o.B.	1	6931XX	Muldenrücken Modell 2, RH gerade verlängert um 10 cm	SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe
o.B.	1	6932XX	Muldenrücken Modell 2, RH gerade verlängert um 20 cm	SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe
o.B.	1	6933XX	Muldenrücken Modell 3, RH gebogen verlängert um 5 cm	SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe
o.B.	1	6934XX	Muldenrücken Modell 3, RH gebogen verlängert um 10 cm	SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe
o.B.	1	6935XX	Muldenrücken Modell 3, RH gebogen verlängert um 15 cm	SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe
o.B.	1	6950XX	Muldenrücken Modell 1 winkelverstellbar, Rückenhöhe gerade verlängert um 2 cm	SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe
o.B.	1	6951XX	Muldenrücken Modell 2 winkelverstellbar, RH gerade verlängert um 10 cm	SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe
o.B.	1	6952XX	Muldenrücken Modell 2 winkelverstellbar, RH gerade verlängert um 20 cm	SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe
o.B.	1	6953XX	Muldenrücken Modell 3 winkelverstellbar, Rückenhöhe gebogen verlängert um 5 cm	SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe
o.B.	1	6954XX	Muldenrücken Modell 3 winkelverstellbar, Rückenhöhe gebogen, verlängert um 10 cm	SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe
o.B.	1	6955XX	Muldenrücken Modell 3 winkelverstellbar, RH gebogen verlängert um 15 cm	SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe
2+4-13	1	692594	Halterungsset fester Rücken, oben, abnehmbar (links/rechts)	
2-5+10+12	1	692595	Halterungsset fester Rücken, unten, abnehmbar (links/rechts)	
2	2	692500	Halteblech links offen für Verriegelung Fester Rücken	
o.B.	2	692501	Halteblech rechts offen für Verriegelung Fester Rücken	
3-5+1012	2	692596	Montageset für Halteblech offen, unten, für Verriegelung Fester Rücken	
4-11	2	692597	Montageset für Halteblech offen, oben, für Verriegelung Fester Rücken	
3	1		Sechskantschraube ISO 4017 (DIN 933) - M5x16	
4	1		Sicherungsscheibe S5 - FST	
5	1		Sattelscheibe ø 12/5x2.5	
6	1		Sechskantschraube ISO 4017 (DIN 933) - M5x25	
7	1		Zugschnapper ø 6/M10x1x31 mit Arretierung	
8	1		Sicherungsring 10, DIN 471	

		Ersatzteilkatalog Jump beta		Rücken	Seite 45 von 102
9	1	692502	Distanzblech fester Rücken rund		
10	2		Flachrundschrauben DIN 603 M5x16 - 4.6 vz		
11	1	692505	Einhängebolzen oben		
12	1	692506	Einhängebolzen unten		
13	1		Flauschband selbstklebend 25mm, schwarz		
14	1	450030	Kantenschutzprofil - Stahlklemmband, 1-2 mm, schwarz	1 m	

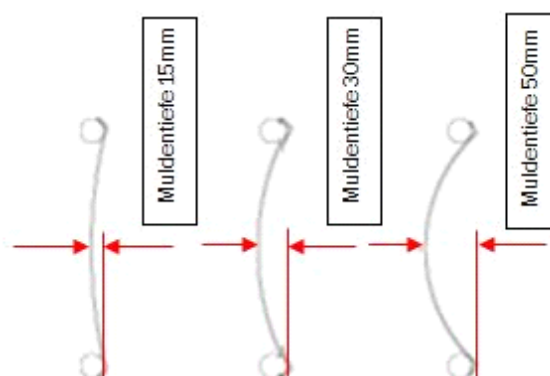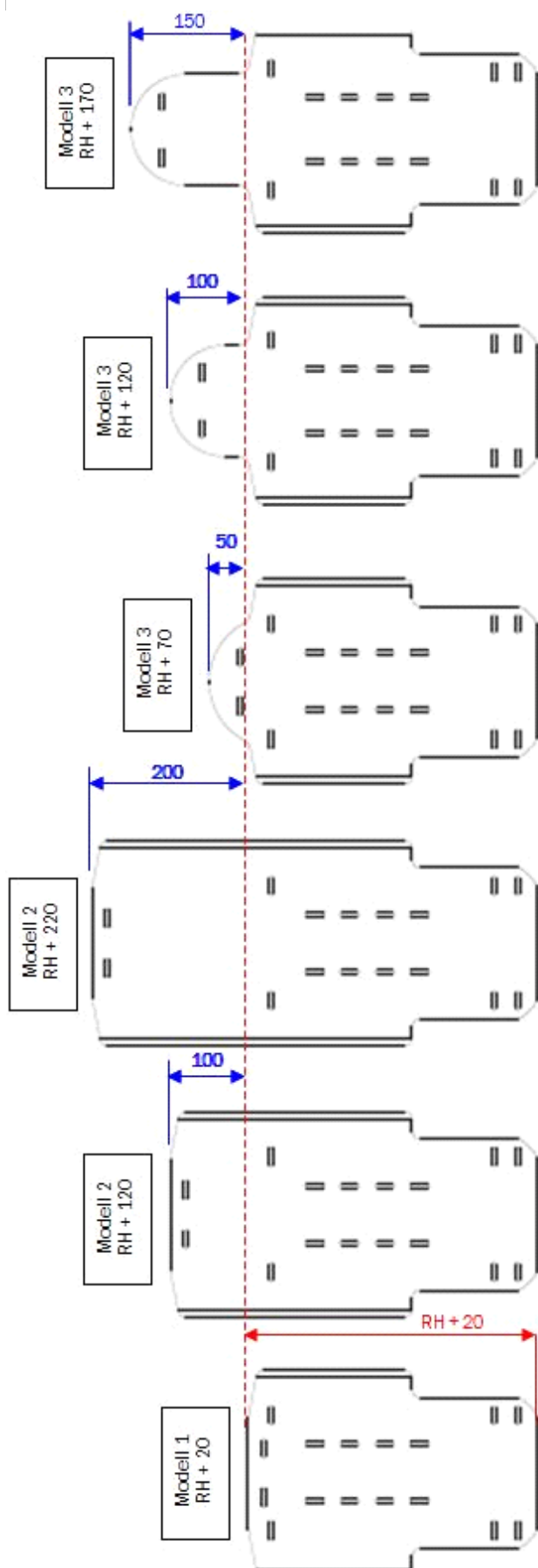


# Rückenverlängerung

Muldenrücken Modell 1: erst ab RH35cm

Muldenrücken Modell 3: erst ab RH30cm, nur mit RH+5cm

Wenn der Muldenrücken mit dem Halterungsset für Muldenrücken befestigt wird, ist eine Rückenverlängerung erst ab SB28 möglich.

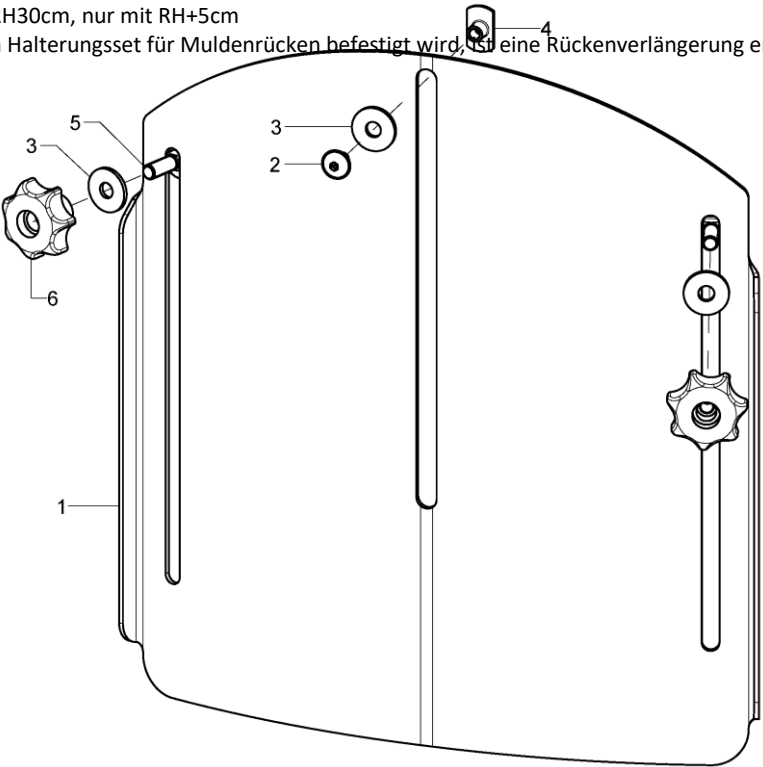

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	686091	Rückenverlängerung für Muldenrücken standard	SB, MT, Farbe
o.B.	1	686092	Rückenverlängerungsblech für winkelverstellbaren Muldenrücken incl. Montageset	SB, MT, Farbe
2-6	1	68607299	Montagezubehör Rückenverlängerung	
2	1		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x8	
3	3		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 - PA	
4	1		Anschweißmutter C - M5x7,5	
5	2		Flachrundschrauben DIN 603 M6x20	
6	2		7-Sterngriff ø32 - M6 Innengewinde durchgehend, schwarz	


Kissen für Muldenrücken

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
o.B.	1	8517	Rückenkissen, 3 cm Dicke, für Muldenrücken incl. Bezug	SB, RH, Modell, Bezugsfarbe
o.B.	1	8517XX	Bezug für Rückenkissen	SB, RH, Modell, XX=Bezugsstoff
o.B.	1	891104	Rückenformteil, anatomisch geformt, Muldentiefe 3 cm, incl. Bezug	SB, RH, Modell, Bezugsfarbe
o.B.	1	891106	Rückenformteil, anatomisch geformt, Muldentiefe 5 cm, incl. Bezug	SB, RH, Modell, Bezugsfarbe
o.B.	1	8911XX	Bezug für Rückenformteil	SB,RH, Modell, Muldentiefe, XX=Bezugsstoff
o.B.	1	68607201	Kopfstützenpolster inkl. Bezug für Rückenverlängerung	Farbe angeben

Stoffmuster	XX
schwarz	30
grau	31
nachtblau	32
ultramarinblau	33
petrol	34
applegreen	35
bordeauxrot	36
rot	37
pink	38

## Seitenpelotte

SORG-Pelottensystem nicht kompatibel mit Pelotten von Stealth. Betrifft Lieferungen vor Juni 2016.

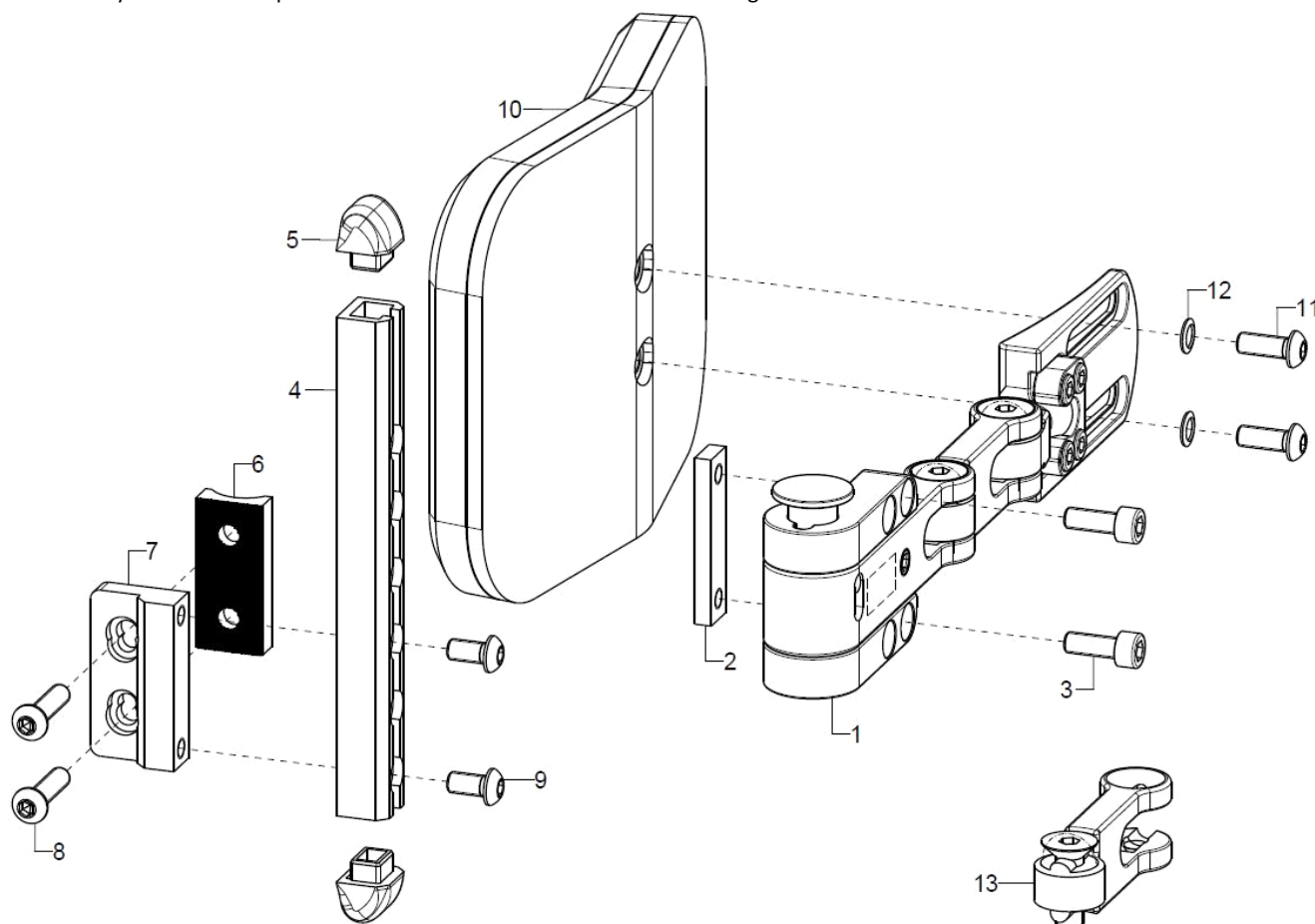


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	68590202	Halterung anpassbar Gr.2 für rechte Seite (ohne Polster)	
o.B.	1	68590201	Halterung anpassbar Gr.2 für linke Seite (ohne Polster)	
2-9	1	68590111	Anbindungset für abklappbare Seitenpelotten, montierbar an Rückenrohr, ab Rückenhöhe 35 bei STD-Rücken, ab RH 40 bei WVR-Rücken	WVR-Rücken ab RH40, STRD-Rücken ab RH35
2-5+9	1	68590112	Anbindungset für abklappbare Seitenpelotten, montierbar an SHG-Halter, ab Rückenhöhe 30 bei STD-Rücken, ab RH 35 bei WVR-Rücken	WVR-Rücken ab RH35, STRD-Rücken ab RH30
2	1		Gewindeplatte Gr.2	
3	2		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x16	
4-5+9	2	685811	C-Profilschiene, schwarz für Anbindung Seitenpelotte incl.Profil-Endstopfen, Montageschrauben M6	
5	2		C-Profil-Endstopfen	
6	1		Halbschale 45 R10	
7	1		Pelottenanbindung Std.	
8	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25	Bei Alu-Rückenrohren
o.B.	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30	Bei Stahl-Rückenrohren
9	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
o.B.	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16	
10-12	1	68590106	Polster inkl. Abnehmbarem Bezug für Halter Gr.1+2 (12 x 9 cm)	
o.B.	1	68590204	Polster inkl. Abnehmbarem Bezug für Halter Gr.2 (15 x 10 cm)	
o.B.	1	68590205	Polster inkl. Abnehmbarem Bezug für Halter Gr.2 (18 x 13 cm)	
11	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
12	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
13	1	68590203	Zusätzliches Verlängerungsgelenk (5,5 cm) für Halterung Gr.2	
1				






o.B.	2	68590230	Ummantelung schwarz, gepolstert, für Pelottenhalterung Gr.2, 105 mm incl. Befestigungsklettstreifen
o.B.	2	68590231	Ummantelung schwarz, gepolstert, für Pelottenhalterung Gr.2, 160 mm (mit Verlängerungsgelenk) incl. Befestigungsklettstreifen

## Kopfstütze

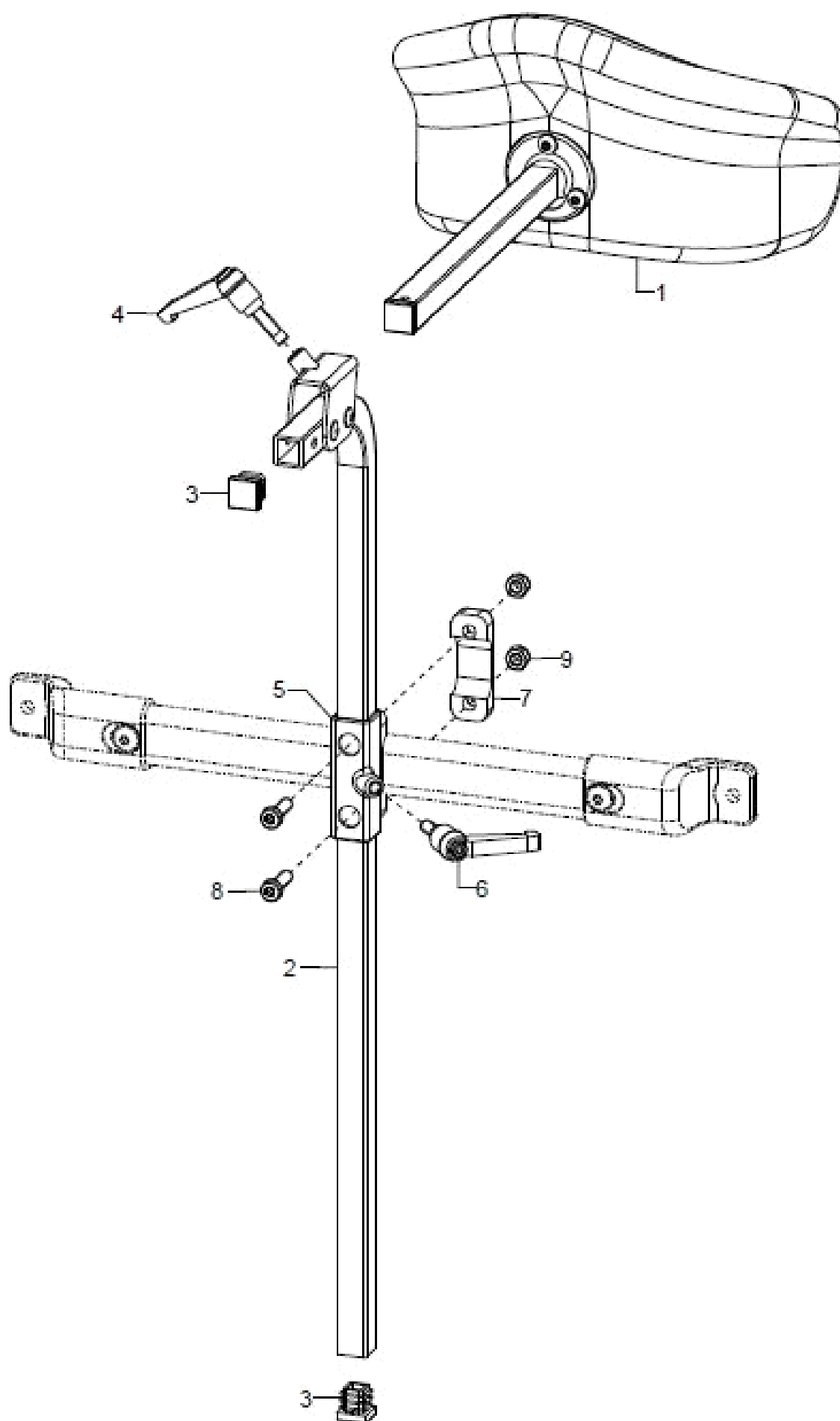




Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	686031	Kopfstützenpolster Modell 1, 213x145 mm muschelförmig kpl.	Nr. 21
altern.	1	686033	Kopfstützenpolster Modell 3, 225x100 bogenförmig kpl.	Nr. 23
altern.	1	686034	Kopfstützenpolster Modell 4, 300x150 bogenförmig kpl.	Nr. 24
o.B.	1	68605001	Kopfstützenbezug, wasch- und wechselbar aus Trevira (Bitte Kopfstützenmodell+Bezugsfarbe auswählen)	Kopfstützenform, Farbe
2-4	1	68600801	Haltestange 500mm für Kopfstützen	empfohlen bis RH45
o.B.	1	68600802	Haltestange 700mm für Kopfstützen	empfohlen ab RH50
3	2		Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15	
4	1	403110	Klemmhebel verstellbar M6x20, schwarz	
5-9	1	68600810	Stangenhalter an Profilrohr 15x15mm kpl., schwarz incl. Klemmhebel M6x15	
6	1	45320303	Klemmhebel verstellbar M6x15, schwarz	
7	1		Kopfstütze Klemmteil	
8	2		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x20	
9	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	

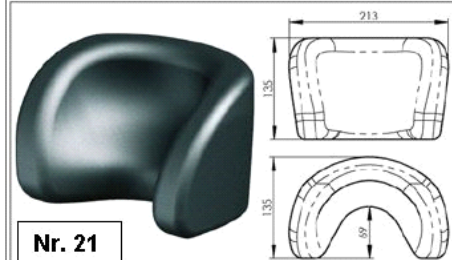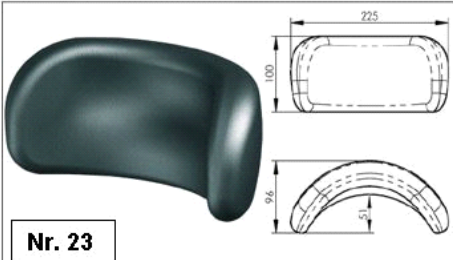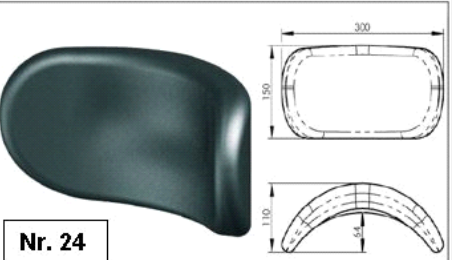Modell 1	Modell 3	Modell 4
 <div>Nr. 21</div>	 <div>Nr. 23</div>	 <div>Nr. 24</div>
muschelförmig	bogenförmig - klein	bogenförmig - groß


## Rückenschalenanbindung

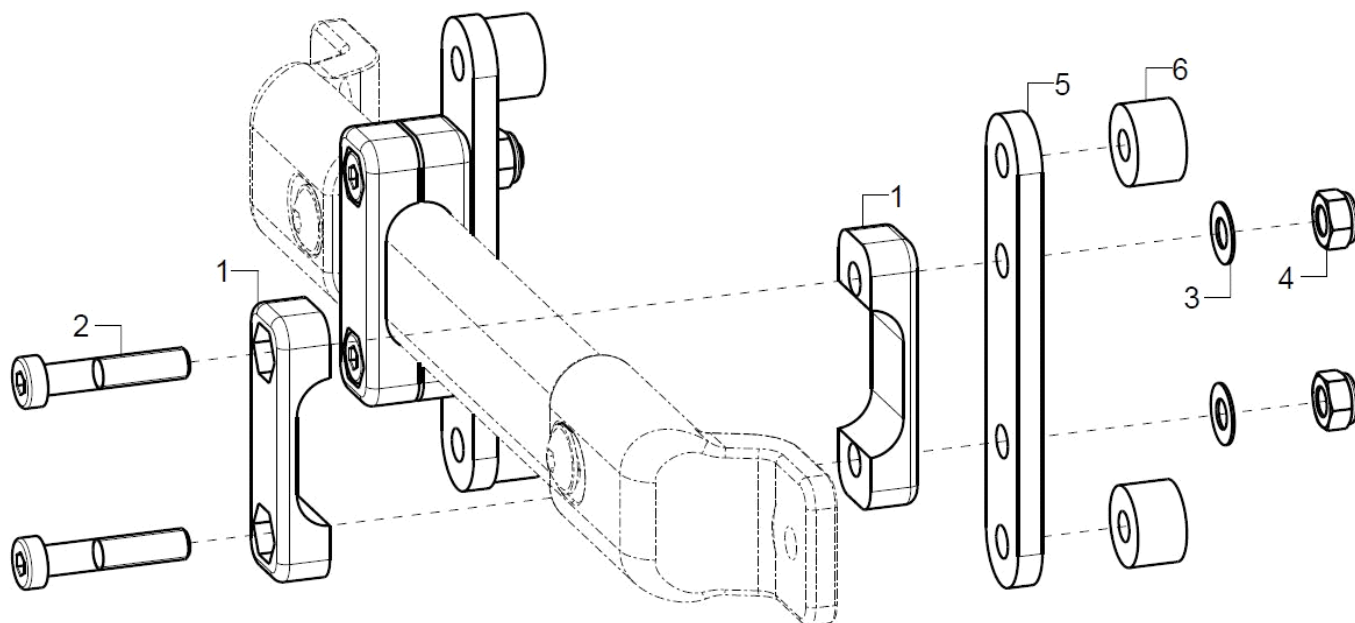


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-6	1/2		Rückenschalenanbindung kpl.	Immer zwei Anbindungen
1	2		Kopfstütze Klemmteil	
2	2		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x30	
3	2		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
4	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
5	1		Anbindelasche	
6	2	35310209	Distanzbuchse Alu, schwarz Ø14x10 (Set 2 Stück)	

# Seitenteil Standard


Verschraubung hinten bei Rücken Standard

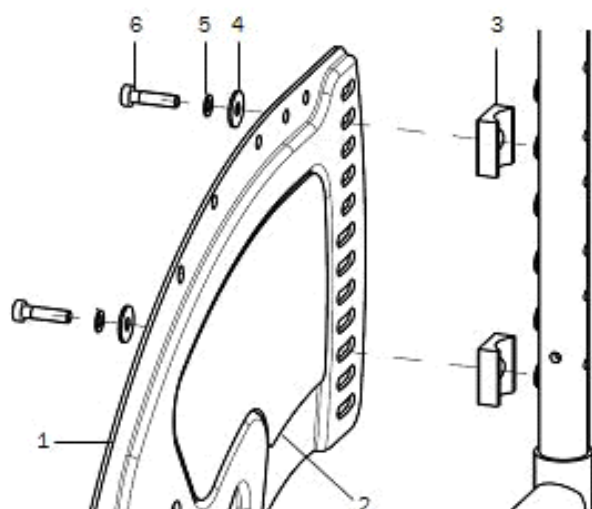


Verschraubung hinten bei Rücken winkelverstellbar

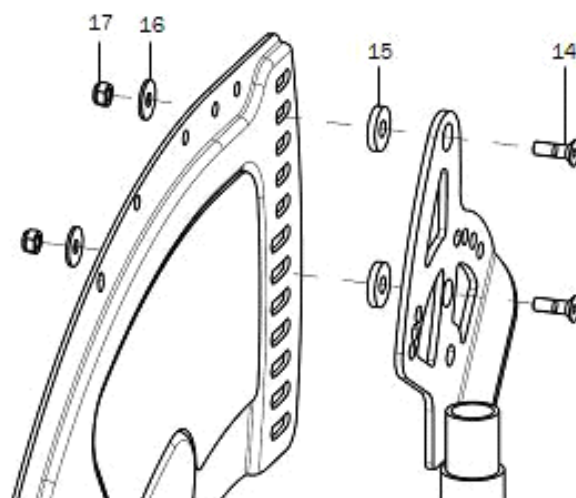


Verschraubung vorne

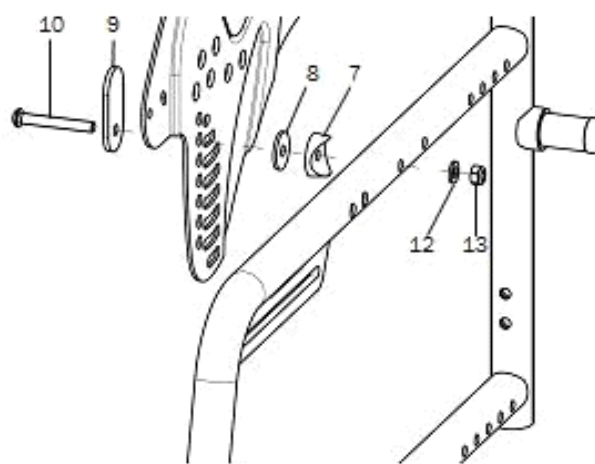

Seitenteilverlängerung

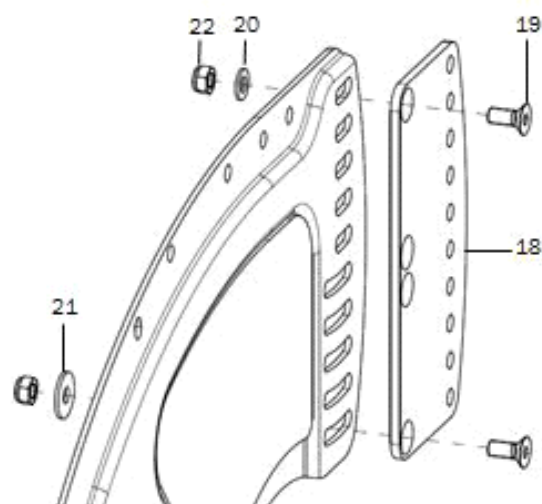


Adapter für 22° Seitenteil

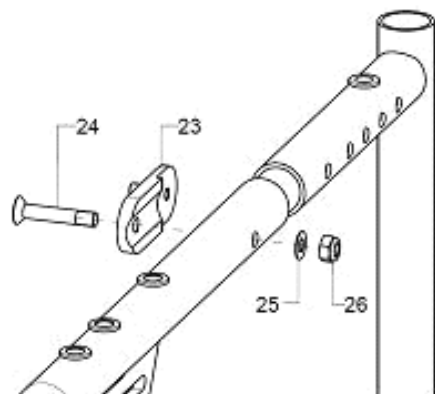




Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	45252202	Seitenteil 20/22", Aluminium geprägt, rechts	Farbe
o.B.	1	45252201	Seitenteil 20/22", Aluminium geprägt, links	Farbe
o.B.	1	45252402	Seitenteil 24", Aluminium geprägt, rechts	Farbe
o.B.	1	45252601	Seitenteil 26", Aluminium geprägt, links	Farbe
o.B.	1	45252401	Seitenteil 24", Aluminium geprägt, links	Farbe
o.B.	1	45252602	Seitenteil 26", Aluminium geprägt, rechts	Farbe
2	1	452522	Kälteschutz für Alu-Seitenteile 20-22" gesickt	Rechts/links
o.B.	1	452524	Kälteschutz für Alu-Seitenteile 24" gesickt	Rechts/links, auch bei 26"
3-13	2	452599	Montageset Seitenteil, Rücken Standard	
7-17	2	452598	Montageset Seitenteil, Rücken winkelverstellbar	
3	2		Halbschale 24, R10	
4	2		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3	
5	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
6	2		Zylinderkopfschraube niedriger Kopf DIN 6912 - M5x20	
7	1		Sattelscheibe schwarz Nenn-ø 24/6	
8	1		Scheibe ISO 7094 (DIN 440), 6.6x22x2	
9	1	45250111	Stützscheibe schwarz, oval	
10	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45	
12	1		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
13	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
14	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16	
15	2		Scheibe DIN 7349 - 6,4	
16	2		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3	
17	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5	
18-22	2	452502	Seitenteilverlängerung inkl. Montagematerial	Bei Rahmen für Aufbau Sitzschale
19	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x12	
20	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3	
21	1		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3	
22	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5	
23-26	2	45250501	Adapter für Montage 22" Seitenteil	
24	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x35	
25	2		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
26	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
o.B.	1	452550	Verbreiterungsset Seitenteil am Rücken Standard	
o.B.	6		Buchse D:25x6,2x10	
o.B.	4		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x35	
o.B.	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x55	
o.B.	1	452551	Verbreiterungsset Seitenteil am Rücken winkelver- bzw. einstellbar	
o.B.	6		Buchse D:25x6,2x10	
o.B.	4		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x25	
o.B.	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x55	

## Armpolster für Seitenteil Standard

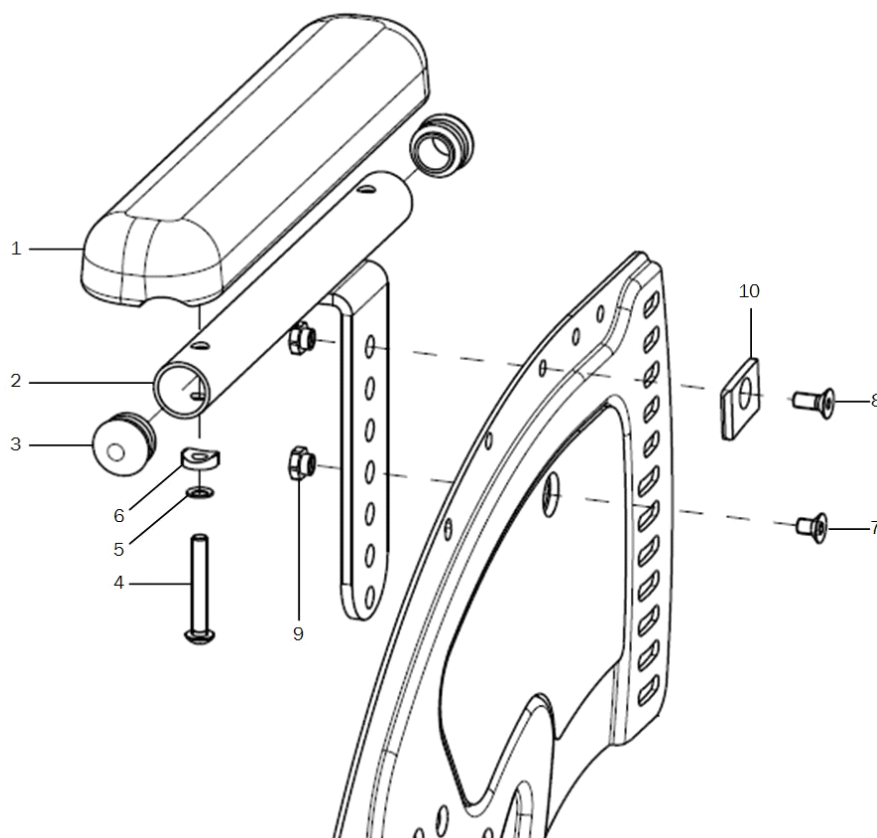


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-10	1 P	452600	Armpolster für Seitenteil Standard, kpl.	Farbe, Kleiderschutz, Variante ab 02/2014
1	2	450007	Armauflage gerade 240x50x26-M5/164mm, schwarz incl. Montagematerial	
2-3	1P	452603	Halter für Armlehne kpl.	Links/rechts
3	2		Stopfen mit Lamellen für Rohr ø20x1-2, schwarz	
4-10	2	452699	Montageset Armpolster	Kleiderschutz
4	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x35	
5	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
6	2		Sattelscheibe ø 12/5x2.5	
7	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x8, Tuflok	
8	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x12	
9	2		Flanshmutter M5	
10	1		Stützscheibe für Armlehne	Bei Seitenteil standard, wenn kein Kleiderschutz

# Kleiderschutz

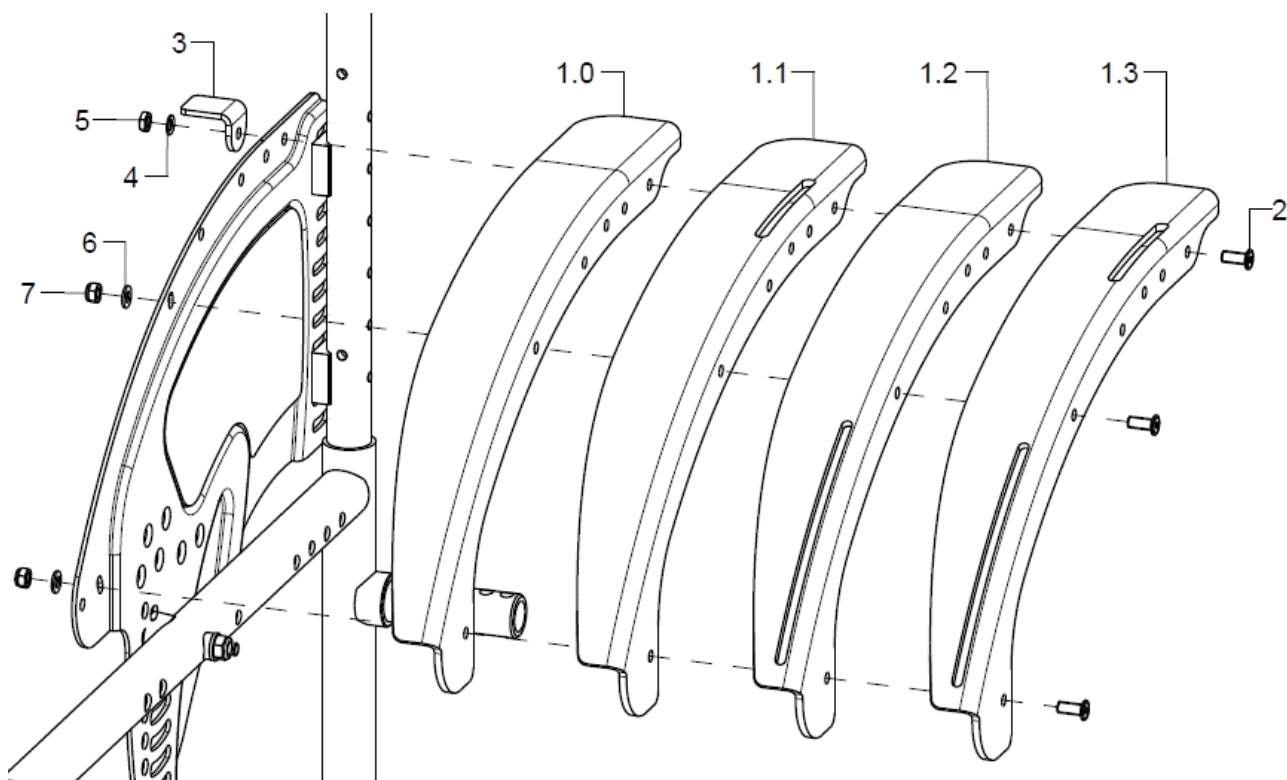

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	50240102	Kleiderschutz 22" Standard, rechts, inkl. Stützwinkel	
o.B.	1	50240101	Kleiderschutz 22" Standard, links, inkl. Stützwinkel	
altern.	1	50240202	Kleiderschutz 24" Standard, rechts, inkl. Stützwinkel	
altern.	1	50240201	Kleiderschutz 24" Standard, links, inkl. Stützwinkel	
1.1	1	50240302	Kleiderschutz 22" für Armlehne, rechts, inkl. Stützwinkel	
o.B.	1	50240301	Kleiderschutz 22" für Armlehne, links, inkl. Stützwinkel	
altern.	1	50240402	Kleiderschutz 24" für Armlehne, rechts, inkl. Stützwinkel	
altern.	1	50240401	Kleiderschutz 24" für Armlehne, links, inkl. Stützwinkel	
1.2	1	50240502	Kleiderschutz 22" für Seilzugbremse, rechts, inkl. Stützwinkel	
o.B.	1	50240501	Kleiderschutz 22" für Seilzugbremse, links, inkl. Stützwinkel	
altern.	1	50240602	Kleiderschutz 24" für Seilzugbremse, rechts, inkl. Stützwinkel	
altern.	1	50240601	Kleiderschutz 24" für Seilzugbremse, links, inkl. Stützwinkel	
1.3	1	50240702	Kleiderschutz 22" Seilzugbremse/Armauflage, rechts, inkl. Stützwinkel	
o.B.	1	50240701	Kleiderschutz 22" Seilzugbremse/Armauflage, links, inkl. Stützwinkel	
altern.	1	50240802	Kleiderschutz 24" Seilzugbremse/Armauflage, rechts, inkl. Stützwinkel	
altern.	1	50240801	Kleiderschutz 24" Seilzugbremse/Armauflage, links, inkl. Stützwinkel	
2-7	2	502499	Montageset Kleiderschutz	
2	3		Schmalkopfschraube Torx M5x12	
3	1	50240115	Stützwinkel 20x25 für Kleiderschutz inkl. Montagematerial	
4	1		Sicherungsscheibe S5 - FST	
5	1		Niedrige Sechskantmutter ISO 4035 (DIN 439) - M5 - 05 vz	
6	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3	
7	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5	

## Desk-Seitenteil

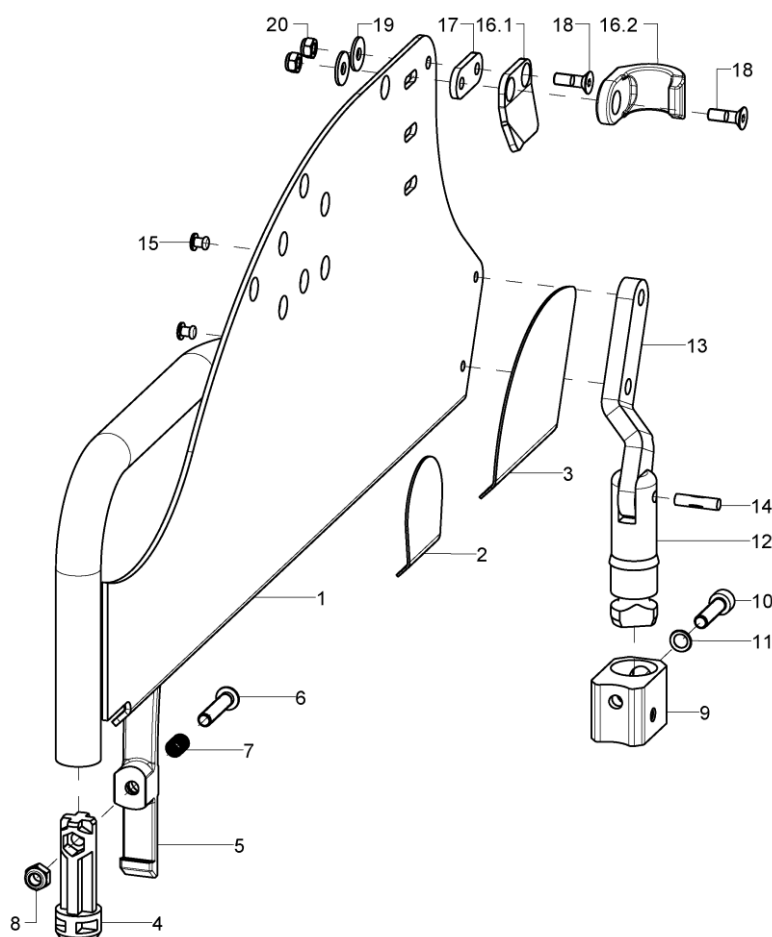

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	46100202	Desk-Seitenteil rechts	Farbe
o.B.	1	46100201	Desk-Seitenteil links	Farbe
altern.	1	46100302	Desk-Seitenteil rechts bei SA Rahmenvariante	Farbe
o.B.	1	46100301	Desk-Seitenteil SA links bei SA Rahmenvariante	Farbe
2	2	46100121	Schutzfolie Mitte bei Desk-Seitenteil	Nur bei umlegbarem Rücken
3	2	46100120	Schutzfolie hinten bei Desk-Seitenteil	Nur bei umlegbarem Rücken
o.B.	1	45170202	Kälteschutzteil rechts bei Desk-Seitenteil	
o.B.	1	45170201	Kälteschutzteil links bei Desk-Seitenteil	
4	2	46100113	Zapfen vorne bei Desk-/Langes Seitenteil	
5-8	2	46100114	Rasthebel bei Desk-/Langes Seitenteil incl. Montagematerial	
6	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30	
7	1		Druckfeder DIN 2098 0,7x7,65/9,05x21	
8	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
9-11	2	46100117	Aufnahme hinten für Desk-Seitenteil incl. Montagematerial	
10	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x25	
11	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	
12-15	2	46101802	Zapfen hinten für Desk-/Langes Seitenteil incl. Gelenklasche	
13	2		Gelenklasche Desk	
14	1		Kerbstift DIN 1475 - 5x20	
15	2		Blindniet F5x10 A2/A2	
16.1+18 -20	1	46101602	Haltekralle links für Desk-Seitenteil incl. Montagematerial	Bei umlegbarem Rücken
o.B.	1	46101601	Haltekralle rechts für Desk-Seitenteil incl. Montagematerial	Bei umlegbarem Rücken




16.2+18 2 -20	45260110	Seitenteilclip	Bei Standard Rücken
17	2	Distanz für Krallen	bei umlegbarem Rücken
18	2(1)	Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16	
19	2(1)	Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3	
20	2(1)	Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5	




## Kleiderschutz Desk-Seitenteil

(Bei Desk-Seitenteil und Desk-Seitenteil bei Gasdruckfeder-Rücken)

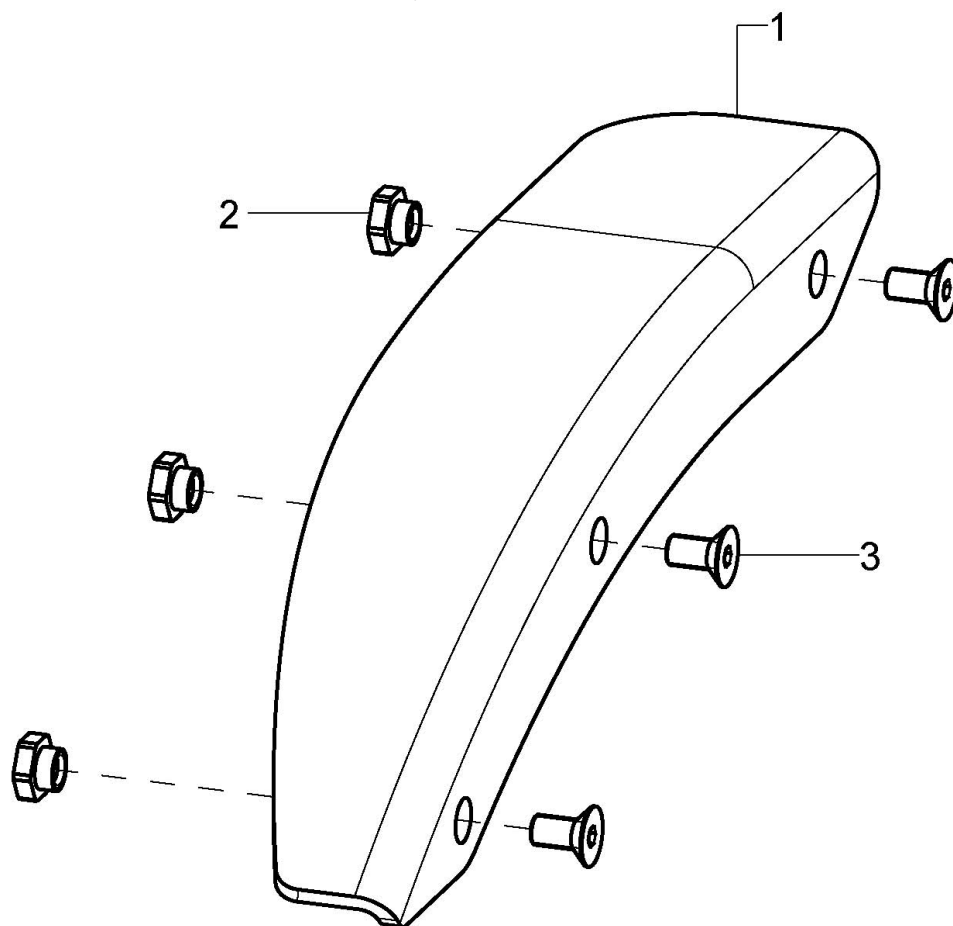


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-3	1	46100102	Kleiderschutz für Desk-Seitenteil rechts incl. Montagematerial	
o.B.	1	46100101	Kleiderschutz für Desk-Seitenteil links incl. Montagematerial	
2	3		Flanschmutter M5	
3	3		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x10	

## Armpolster für Desk-Seitenteil

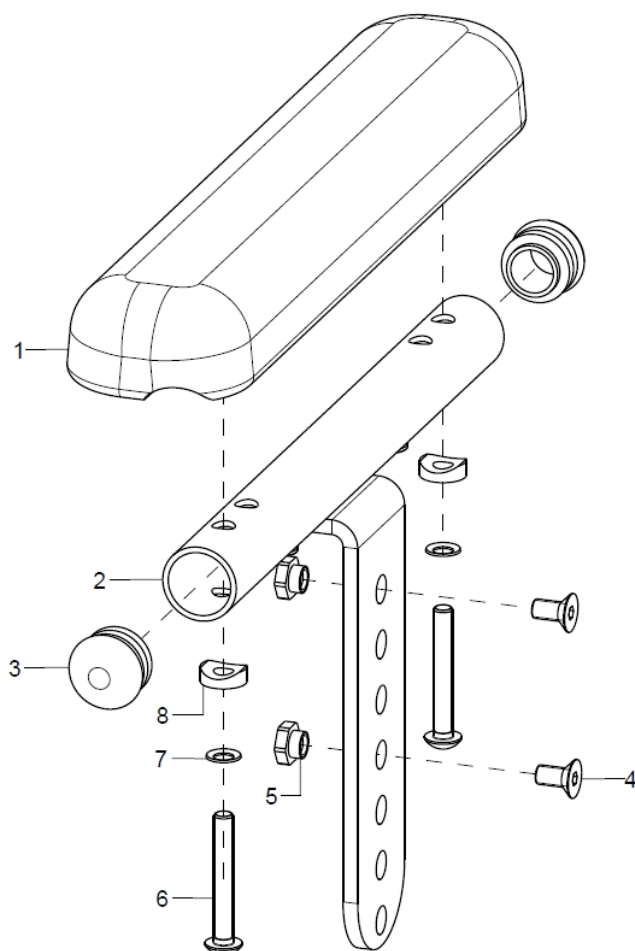

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-8	1	461005	Armlehne für Desk-Seitenteil	Farbe
1	1	450007	Armauflage gerade 240x50x26-M5/164mm, schwarz incl. Montagematerial	
2-5	1	461002	Halter Armlehne Desk	Farbe
3	2	620002	Stopfen mit Lamellen für Rohr ø20x1-2, schwarz	Set 2 Stück
4	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x8, Tuflok	
5	2		Flanschmutter M5	
6-8	1	452697	Montageset für Armpolster	
6	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x35	
7	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
8	2		Sattelscheibe ø 12/5x2.5	

## Langes Seitenteil

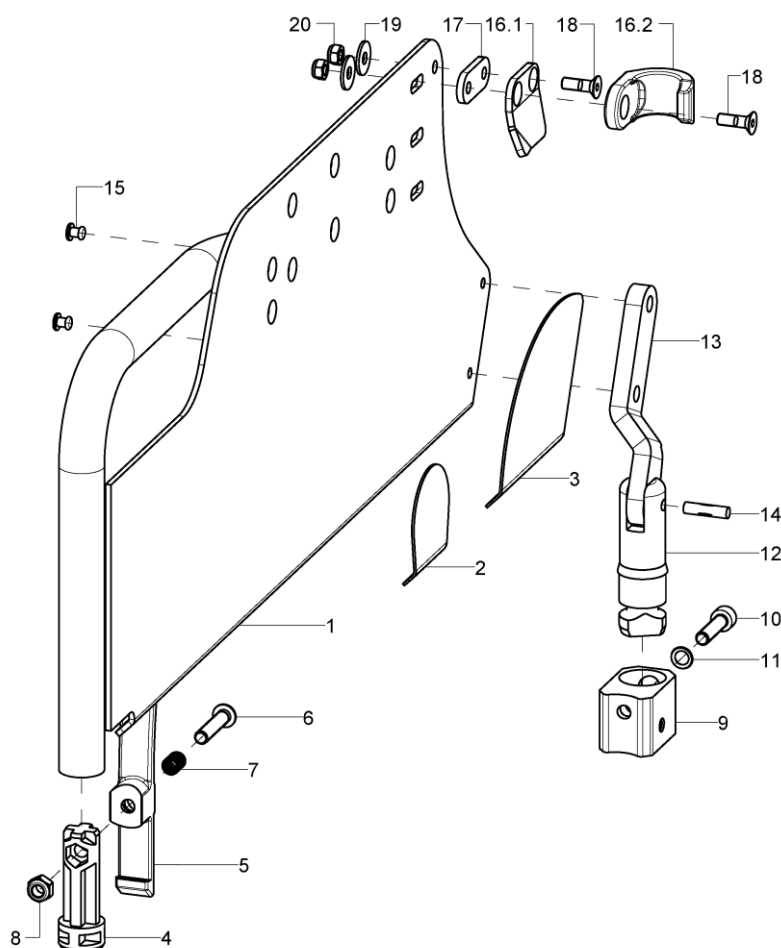


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	46110202	Langes Seitenteil rechts	Farbe
o.B.	1	46110201	Langes Seitenteil links	Farbe
altern.	1	46110302	Langes Seitentei rechts bei SA Rahmenvariante	Farbe, SA Rahmenvariante
o.B.	1	46110301	Langes Seitentei SA links bei SA Rahmenvariante	Farbe, SA Rahmenvariante
2	2	46100121	Schutzfolie Mitte bei Desk-Seitenteil	Nur bei umlegbarem Rücken
3	2	46100120	Schutzfolie hinten bei Desk-Seitenteil	Nur bei umlegbarem Rücken
o.B.	1	45170202	Kälteschutzteil rechts bei Desk-Seitenteil	
o.B.	1	45170201	Kälteschutzteil links bei Desk-Seitenteil	
4	2	46100113	Zapfen vorne bei Desk-/Langes Seitenteil	
5-8	2	46100114	Rasthebel bei Desk-/Langes Seitenteil incl. Montagematerial	
6	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30	
7	1		Druckfeder DIN 2098 0,7x7,65/9,05x21	
8	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
9-11	2	46100117	Aufnahme hinten für Desk-Seitenteil incl. Montagematerial	
10	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x25	
11	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	
12-15	2	46101802	Zapfen hinten für Desk-/Langes Seitenteil incl. Gelenklasche	
13	2		Gelenklasche Desk	
14	1		Kerbstift DIN 1475 - 5x20	
15	2		Blindniet F5x10 A2/A2	
16.1+18 -20	1	46101602	Haltekralle links für Desk-Seitenteil incl. Montagematerial	Bei umlegbarem Rücken
o.B.	1	46101601	Haltekralle rechts für Desk-Seitenteil incl. Montagematerial	Bei umlegbarem Rücken



16.2+18 2 -20	45260110	Seitenteilclip	Bei Standard Rücken
17	2	Distanz für Krallen	bei umlegbarem Rücken
18	2(1)	Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16	
19	2(1)	Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3	
20	2(1)	Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5	

# Armpolster für langes Seitenteil

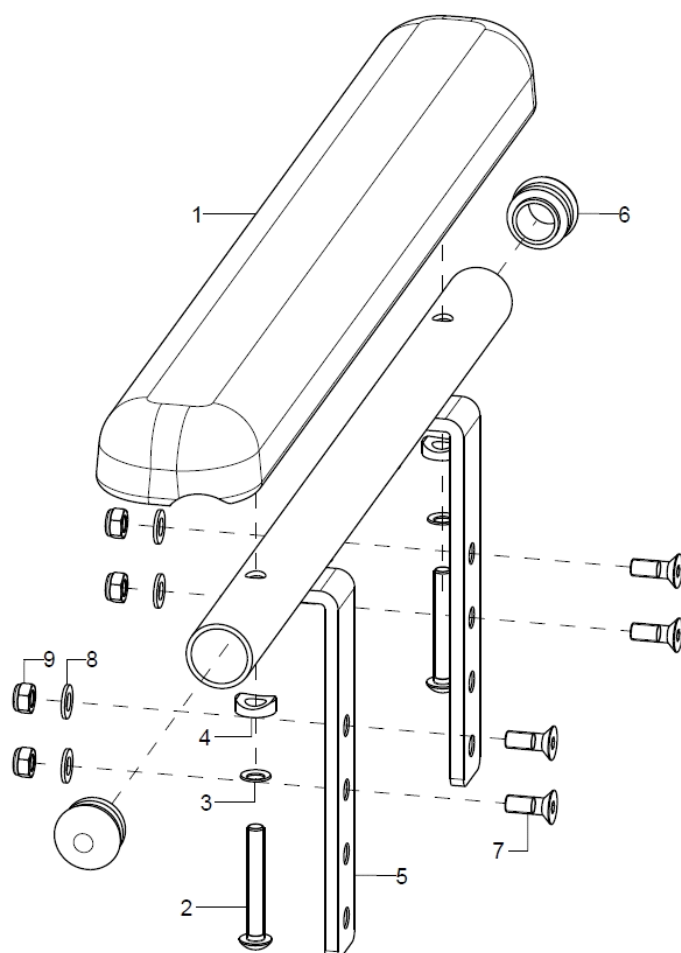


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-9	1P	452507	Armlehne für langes Seitenteil	Farbe, links/rechts
1	2	450010	Armauflage gerade 370mm	
2-4	1	45250799	Montageset für langes Armpolster	
2	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x35	
3	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
4	2		Sattelscheibe $\varnothing$ 12/5x2.5	
5-9	1	45250702	Halter Armlehne rechts	Farbe
o.B.	1	45250701	Halter Armlehne links	Farbe
6	2		Stopfen mit Lamellen für Rohr $\varnothing$ 20x1-2, schwarz	
7	4		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x14	
8	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3	
9	4		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5	

## Desk/langes Seitenteil, Aufnahme vorne

Bei abduzierten Rahmen (nicht bei XL Rahmen)  
Bis ST 42cm


Ab ST 44 cm

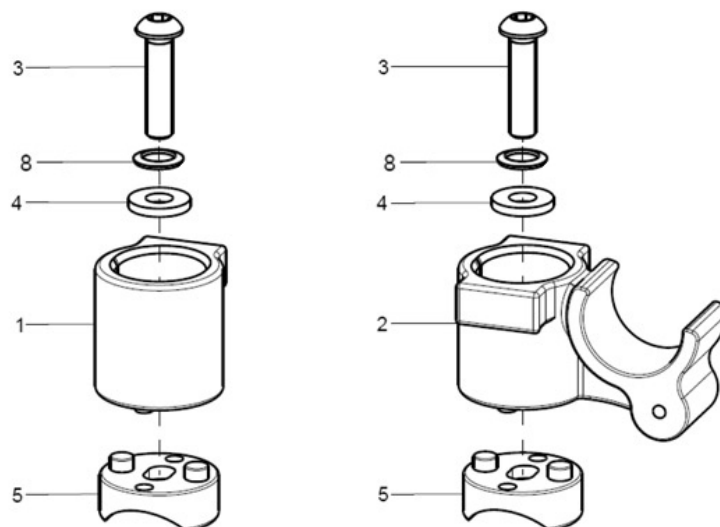

Bei abduzierten XL Rahmen  
Bis ST 42cm

Ab ST 44 cm

Bei geradem Rahmen

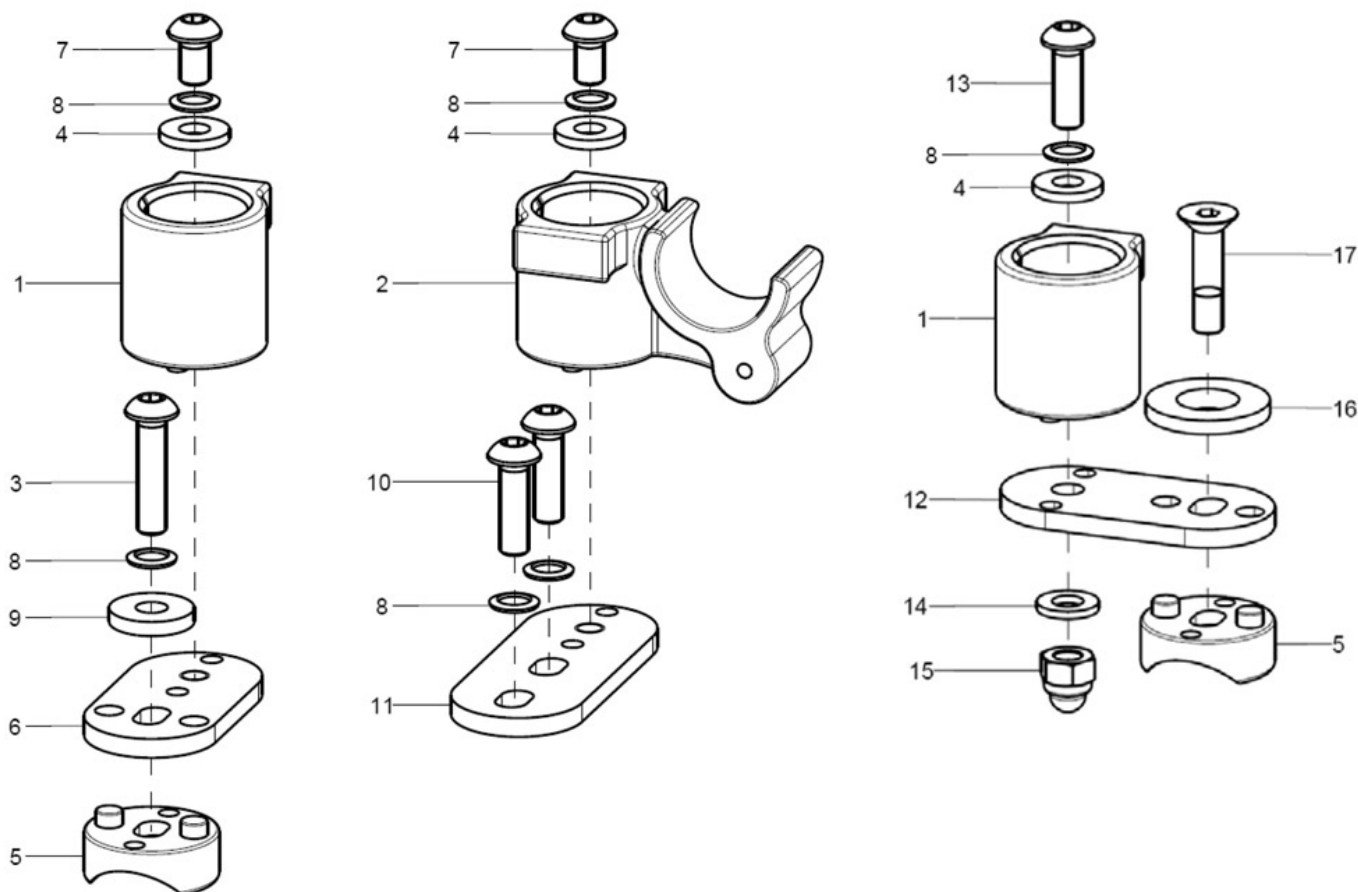




Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1+3-5+8	2	46100130	Deskaufnahme vorne bei abduziertem Rahmen kpl.	bis ST42 cm (nicht XL-Rahmen)
2-5+8	2	46100131	Deskaufnahme vorne bei abduziertem Rahmen kpl.	ab ST44cm (nicht XL-Rahmen)
1+3-9	2	46100132	Deskaufnahme vorne bei abduziertem XL-Rahmen bis ST42cm, kpl.	
2+4+7+ 8+10+1 1	2	46100133	Deskaufnahme vorne bei abduziertem XL-Rahmen ab ST44cm, kpl.	
1+4+5+ 8+12-17	2	46100134	Deskaufnahme vorne bei geradem Rahmen, kpl.	
1	1	46100110	Aufnahme vorne für Desk-/Langes Seitenteil	
2	1	46100111	Aufnahme Kombi vorne für Desk-/Langes Seitenteil	ab ST 44 cm
3	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25	
4	1		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	
5	1	46100112	Sattelscheibe für Desk-/Langes Seitenteil	
6	1	46100126	Lasche für Desk-/Langes Seitenteil bei XL abdu Rahmen	
7	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x10	
8	1(2)(3)		Sicherungsscheibe S6 - FST	
9	1		Scheibe DIN 7349 - 6,4	
7	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20	
11	1	46100127	Lasche für Desk-/Langes Seitenteil bei XL abdu Rahmen+ ST>44	
12	1	46100125	Lasche für Desk-/Langes Seitenteil bei geradem Rahmen	
13	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x18	
14	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
15	1		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6	
16	1	46100122	Stützscheibe mit Senkung M6 bei Desk-/Langem Seitenteil	
17	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x25	

## Rasterarmlehne


Geeignet für Desk-Seitenteil und langes Seitenteil

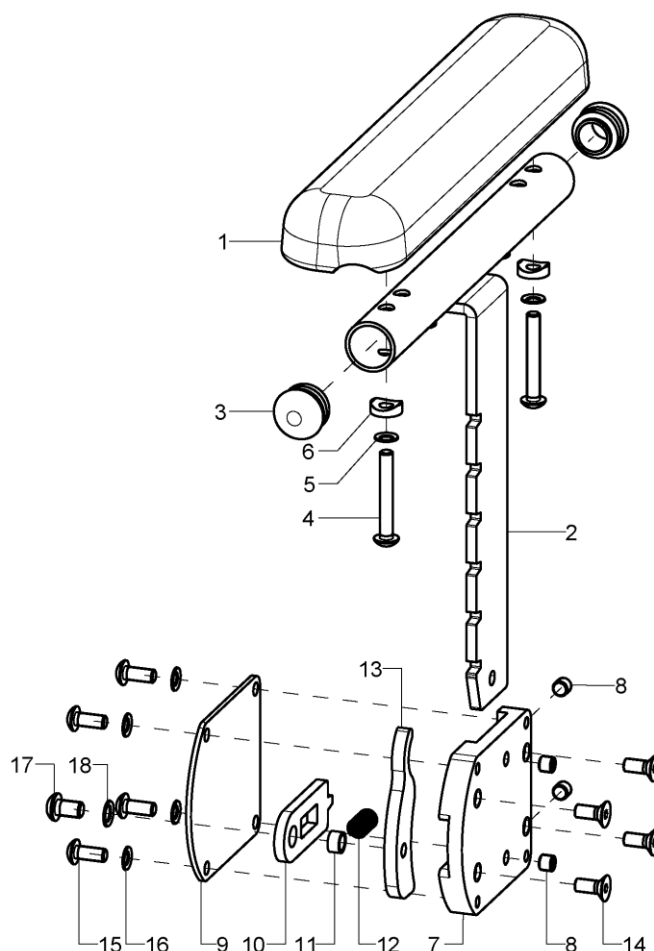

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-18	1	452506	Armpolster für Rasterarmlehne kpl.	links/rechts
1	1	450007	Armauflage gerade 240x50x26-M5/164mm, schwarz incl. Montagematerial	
2-3	1	45250611	Armlehnenhalter mit Raster, rechts incl. Stopfen	
o.B.	1	45250610	Armlehnenhalter mit Raster, links incl. Stopfen	
3	2		Stopfen mit Lamellen für Rohr ø20x1-2, schwarz	
4	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x35	
5	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
6	2		Sattelscheibe ø 12/5x2.5	
7-18	1	45250622	Rastereinheit vormontiert rechts für Rasterarmlehne	
o.B.	1	45250621	Rastereinheit vormontiert links für Rasterarmlehne	
7	1		Grundplatte	
8	4		Gewindestift m. Schlitz - M6X5 - PA	
9	1		Abdeckplatte	
10	1		Riegel für Rasterarmlehne	
11	1		Buchse 8x6x4,5	
12	1		Druckfeder DIN 2098 0,7x7,65/9,05x21	
13	1		Exzenterhebel	
14	4		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x12	
15	4		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x12	
16	4		Sicherungsscheibe S5 - FST	
17	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x10	
18	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	




# Seitenteil für Gasdruckfeder-Rücken

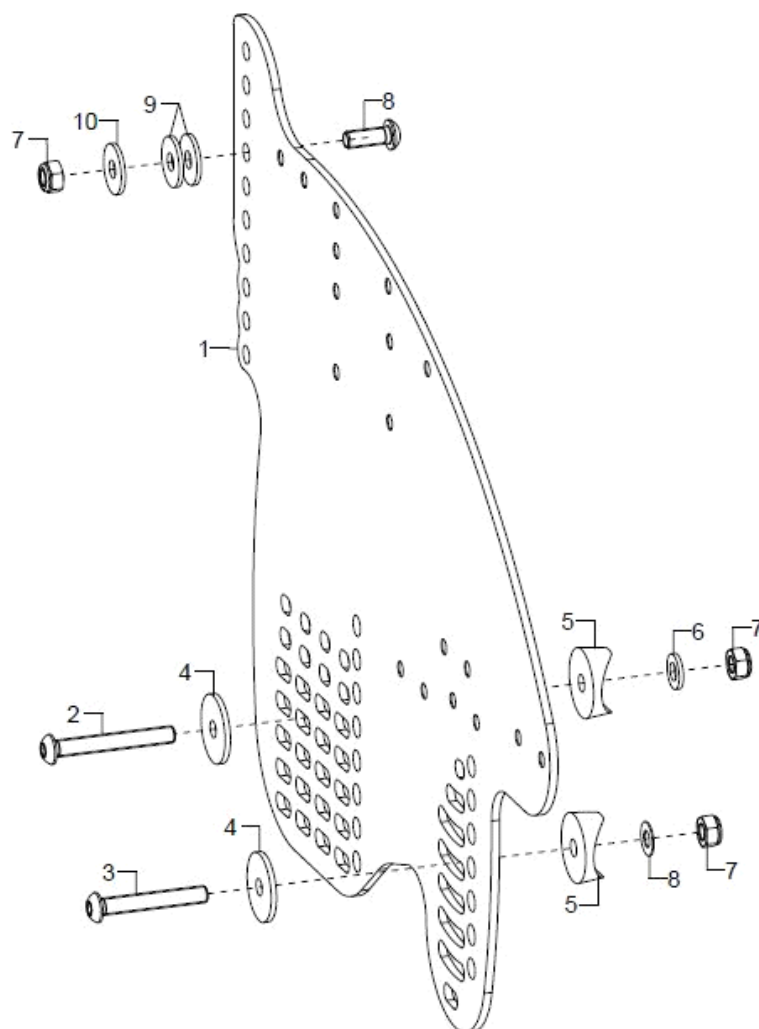


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	45252604	Seitenteil 26" rechts bei GDF-Rücken	Farbe
o.B.	1	45252603	Seitenteil 26" links bei GDF-Rücken	Farbe
altern.	1	45252404	Seitenteil 24" rechts bei GDF-Rücken	Farbe
o.B.	1	45252403	Seitenteil 24" links bei GDF-Rücken	Farbe
altern.	1	45252204	Seitenteil 22" rechts bei GDF-Rücken	Farbe
o.B.	1	45252203	Seitenteil 22" links bei GDF-Rücken	Farbe
2-11	2	452597	Montageset Seitenteil bei Gasdruckfeder-Rücken	
2	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45	
3	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40	
4	2		Distanzscheibe (Konus) Ø24,7x6x2	
5	2		Sattelscheibe schwarz Nenn-ø 24/8	
6	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
7	3		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
8	1		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
9	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20	
10	2		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 - PA	
11	1		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4	

## Desk-Seitenteil für Gasdruckfeder-Rücken

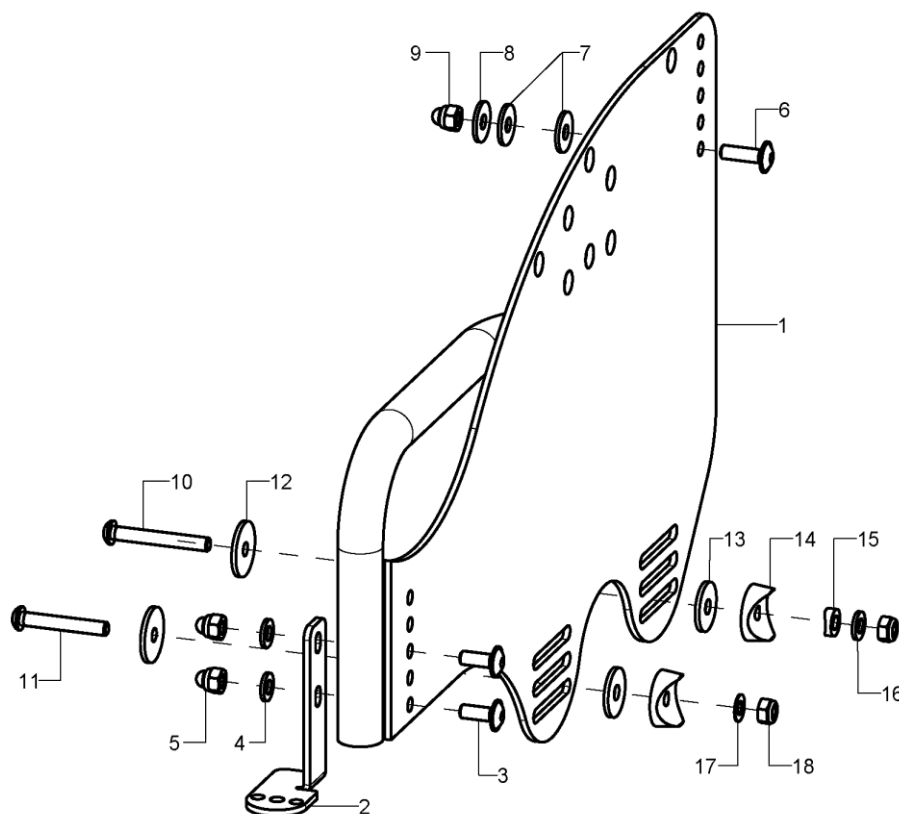


Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	46100402	Desk-Seitenteil rechts bei GDF-Rücken	Farbe
o.B.	1	46100401	Desk-Seitenteil links bei GDF-Rücken	Farbe
altern.	1	46100502	Desk-Seitenteil SA rechts bei GDF-Rücken	Farbe
o.B.	1	46100501	Desk-Seitenteil SA links bei GDF-Rücken	Farbe
2-5	1	46100404	Befestigungswinkel rechts	Rahmen abduziert
o.B.	1	46100403	Befestigungswinkel links	Rahmen abduziert
altern.	1	46100604	Befestigungswinkel gerader Rahmen rechts	Rahmen gerade
o.B.	1	46100603	Befestigungswinkel gerader Rahmen links	Rahmen gerade
3	2		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x16	
4	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
5	2		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6	
6-18	2	46100499	Montageset Desk-Seitenteil bei GDF-Rücken	
6	1		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x20	
7	2		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 - PA	
8	1		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4	
9	1		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6	
10	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45	
11	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40	
12	2		Distanzscheibe (Konus) Ø24,7x6x2	
13	2		Scheibe ISO 7094 (DIN 440), 6.6x22x2	
14	2		Sattelscheibe schwarz Nenn-Ø 24/8	
15	1		Sattelscheibe Ø12/6,2x2,5	
16	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
17	1		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
18	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	

## Langes Seitenteil für Gasdruckfeder-Rücken

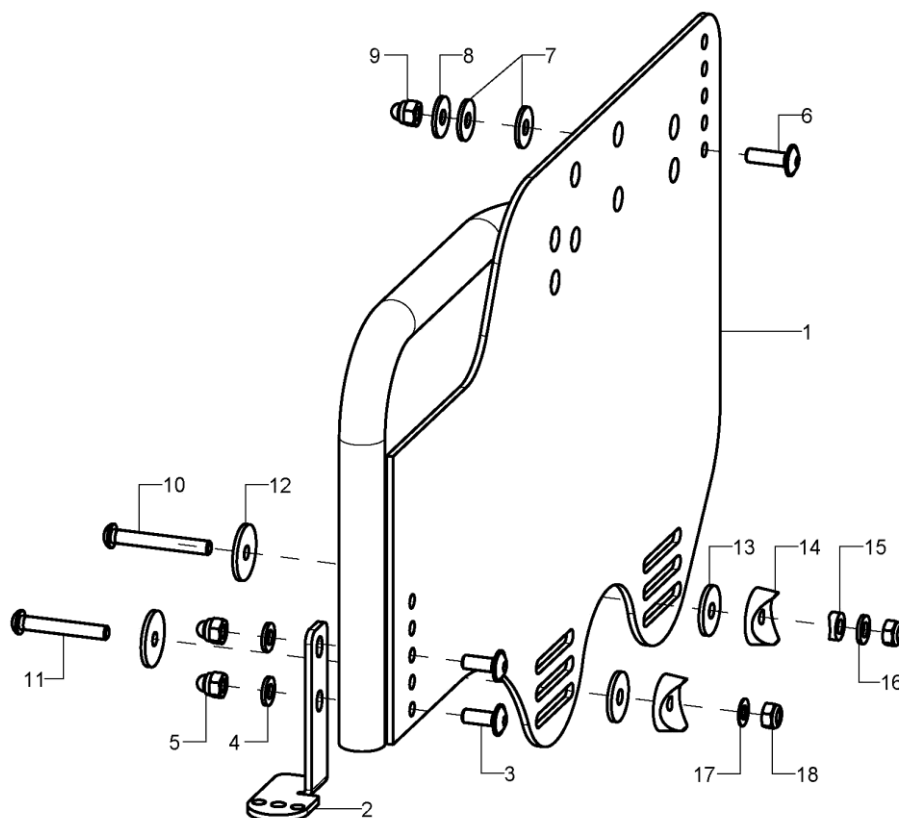

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	46110402	Langes Seitenteil rechts bei GDF-Rücken	Farbe
o.B.	1	46110401	Langes Seitenteil links bei GDF-Rücken	Farbe
altern.	1	46110502	Langes Seitenteil SA für GDF-Rücken rechts	Farbe
o.B.	1	46110501	Langes Seitenteil SA für GDF-Rücken links	Farbe
2-5	1	46100404	Befestigungswinkel rechts	Rahmen abduziert
o.B.	1	46100403	Befestigungswinkel links	Rahmen abduziert
altern.	1	46100604	Befestigungswinkel gerader Rahmen rechts	Rahmen gerade
o.B.	1	46100603	Befestigungswinkel gerader Rahmen links	Rahmen gerade
3	2		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x16	
4	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
5	2		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6	
6-18	2	46100499	Montageset Desk-Seitenteil bei GDF-Rücken	
6	1		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x20	
7	2		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 - PA	
8	1		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4	
9	1		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6	
10	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45	
11	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40	
12	2		Distanzscheibe (Konus) Ø24,7x6x2	
13	2		Scheibe ISO 7094 (DIN 440), 6.6x22x2	
14	2		Sattelscheibe schwarz Nenn-Ø 24/8	
15	1		Sattelscheibe Ø12/6,2x2,5	
16	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
17	1		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
18	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	

# Lenkradadapter

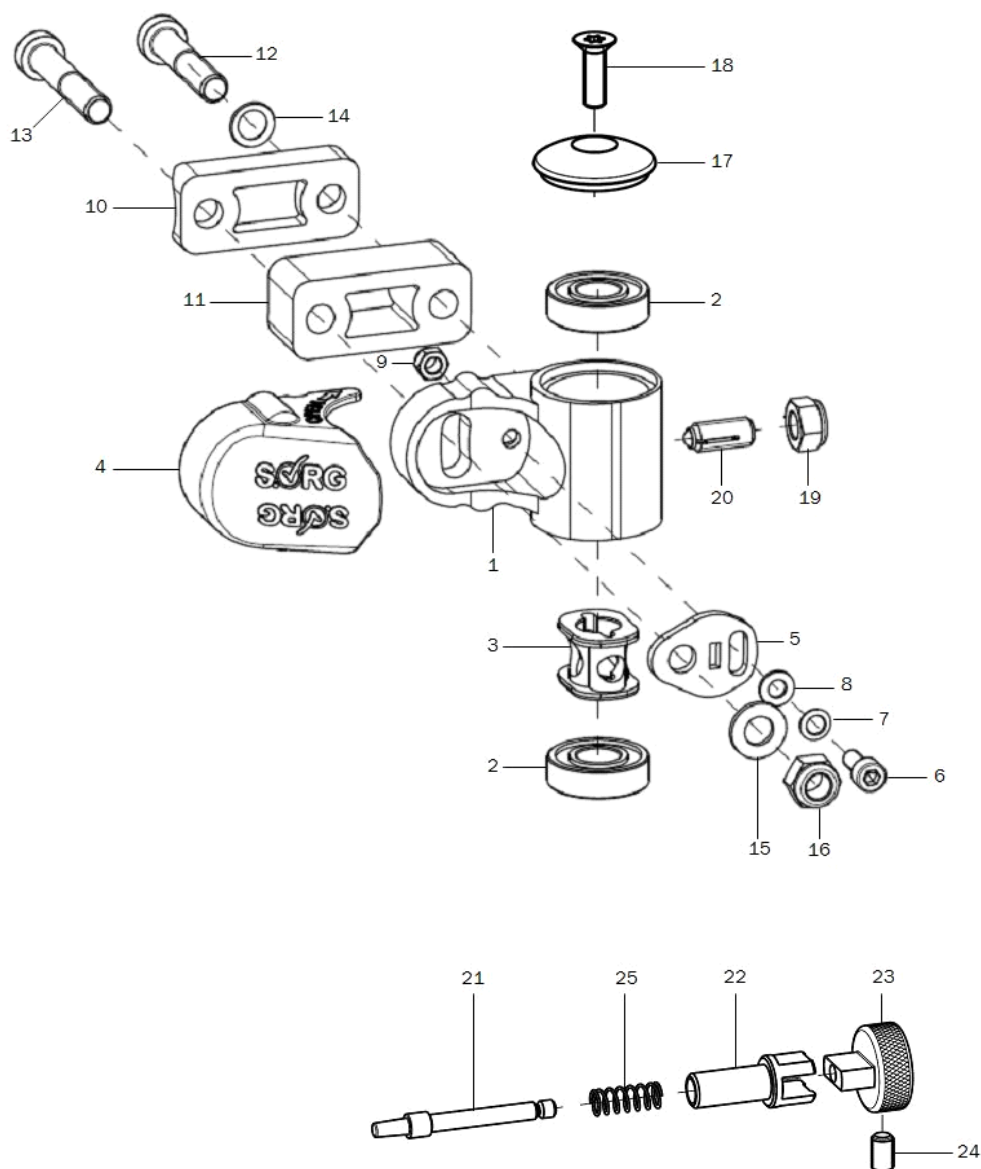


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-9+19-24	2	280506	Lenkradadapter Alu, Spurfixierung, kpl.	Spurfixierung,- Verriegelung
1-9	2	280500	Lenkradadapter Alu, kpl.	
1	1	280501	Lenkradadapter Aluminium	
altern.	1	280507	Lenkradadapter Alu, Spurfixierung,	Spurfixierung,- Verriegelung
2	2	200011	Rillenkugellager ø28/12x8 6001z	
3	1	280504	Dämpferelement	
4	1	280030	Abdeckkappe	
5	1	280503	Exzentrerscheibe	
6	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M5x12	
7	1		Sicherungsscheibe S5 - FST	
8	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3	
9	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5	



10+12-16	2	280510	Montageset Lenkradadapter Alu	
10+12-16	2	280511	Montageset Lenkradadapter Aluminium für Verbreiterung 20mm	
10+12-16	2	280512	Montageset Lenkradadapter Aluminium für Verbreiterung 40mm	
10	1	280502	Halbschale LRAD – R12	
11	1	280513	Spurverbreiterung 20mm	
altern.	1	280514	Spurverbreiterung 40mm	
12	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x40	
altern.	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x60	Spurverbreiterung 20mm
altern.	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x80	Spurverbreiterung 40mm
13	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x45	
altern.	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x65	Spurverbreiterung 20mm
altern.	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x85	Spurverbreiterung 40mm
14	1		Sicherungsscheibe S8 - FST	
15	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4	
16	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8	
17-18	1	282107	Kappe 35x10, schwarz eloxiert inkl. Montageschraube	Aluminium Lenkradadapter
18	1		Senkschraube mit Torx ISO 14581 M6x20 vz, schwarz	
19	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8	
20	2	285103	Druckfederstück M8x19 incl. Mutter und Kappe	Spurfixierung
21-25	2	285003	Spurverriegelung kpl.	Spurverriegelung
21	1		Fixierstift	Spurverriegelung
22	1		Aufnahme Fixierstift	Spurverriegelung
23	1		Zugknopf Lenkradverriegelung	Spurverriegelung
24	1		Gewindestift mit Innensechskant ISO 4026 (DIN 913), M5x8	
25	1		Druckfeder 0,55x5,5x23,7	


Achtung: Wenn eine Lenk- und Schiebehilfe oder Rückhalteösen am Rollstuhl angebaut sind, bitte bei Bestellungen von Ersatzteilen angeben.

## Adapter für niedrige Sitzhöhen

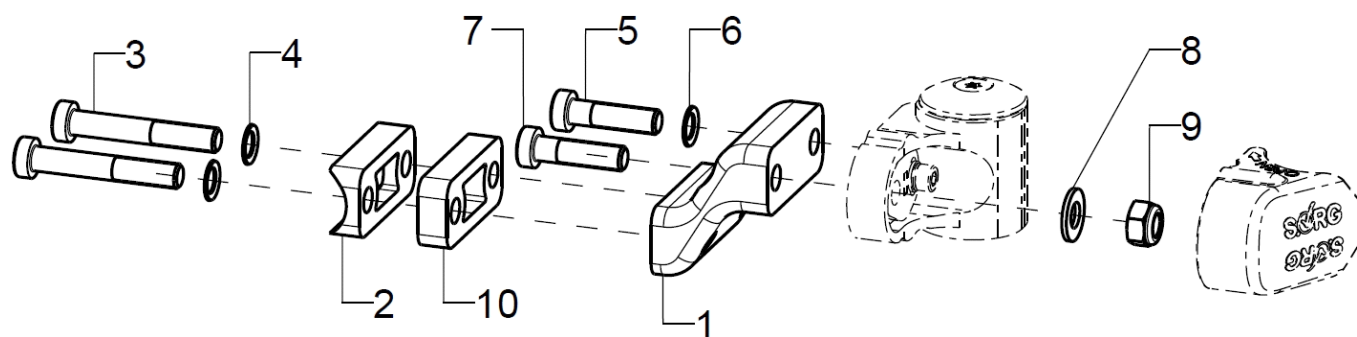

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	2	280525	Hemiadapter 25 mm für niedrige Sitzhöhen, schwarz incl. Montagematerial	
altern.	2	280526	Adapter 4", 40mm für niedrige Sitzhöhen	
2-9	2	280527	Montageset, Hemiadapter an Rahmen Ø24mm	
2	1	280502	Halbschale LRAD – R12	
3	2		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x40	
altern.	2		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x50	
4	2		Sicherungsscheibe S8 - FST	
5	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x30	
6	1		Sicherungsscheibe S8 - FST	
7	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x35	
8	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4	
9	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8	
10 (optional)	1	280515	Spurverbreiterung 10mm	

# Lenkradgabel

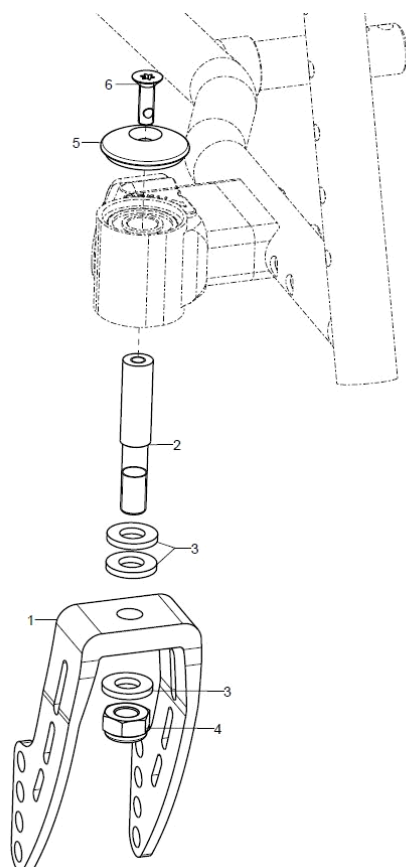

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	2	2841	Lenkrad-Gabel Alu lang 164x45 mm, 4 Loch	
o.B.	2	2842	Lenkrad-Gabel Alu mittel 126x45 mm, 4 Loch	
o.B.	2	2843	Lenkrad-Gabel Alu klein 100x45 mm, 2 Loch	
o.B.	2	2845	Lenkradgabel breit, Alu 130x60mm, 2-Loch	nur bei Artikel 2807
2	2	282104	Lenkachse $\varnothing 12 \times 65,1$ mm	
o.B.	2	285101	Lenkachse 65 mm für Spurfixierung	
o.B.	2	285001	Lenkachse 65 mm für Lenkradverriegelung	
3+4	2	282120	Montageset Lenkradachse an Lenkradgabel Alu (Scheiben, 6-kt Mutter)	
3	3		Scheibe DIN 1440 - 10x20x2,5	
4	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M10	
5-6	2	282107	Kappe 35x10, schwarz eloxiert inkl. Montageschraube	Aluminium Lenkradadapter
6	2		Senkschraube mit Torx ISO 14581 M6x20 vz, schwarz	




Lenkräder


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
o.B.	2	2812	Lenkrad 4 Zoll PU	
o.B.	2	2804	Lenkrad 4 Zoll Vollgummi	
o.B.	2	2820	Lenkrad 4 Zoll PU transparent mit Leuchtdioden	
o.B.	2	2835	Lenkrad 4 Zoll Vollgummi schwarz, mit Alufelge	
o.B.	2	2805	Lenkrad 5 Zoll PU	
o.B.	2	2809	Lenkrad 5 Zoll Vollgummi	
o.B.	2	2834	Lenkrad 5 Zoll PU transparent mit Leuchtdioden	
o.B.	2	2836	Lenkrad 5 Zoll Vollgummi schwarz, mit Alufelge	
o.B.	2	2802	Lenkrad 5,5 Zoll Vollgummi, grau	
o.B.	2	2803	Lenkrad 6 Zoll PU	
o.B.	2	2811	Lenkrad 6 Zoll Vollgummi	
o.B.	2	2808	Lenkrad 6 Zoll luftbereift	
o.B.	2	2838	Lenkrad 6 Zoll Vollgummi schwarz, mit Alufelge	
o.B.	2	2813	Lenkrad 7 Zoll Vollgummi	
o.B.	2	2807	Lenkrad 7 Zoll luftbereift	nur mit Lenkradgabel 2845
o.B.	2	289998	Montageset Lenkrad an Lenkradgabel (Schrauben, Distanzhülsen, Gewindebuchse)	Angepasst an Lenkrad / Lenkradgabel Kombination




## Lochplatte Antriebsrad Standard

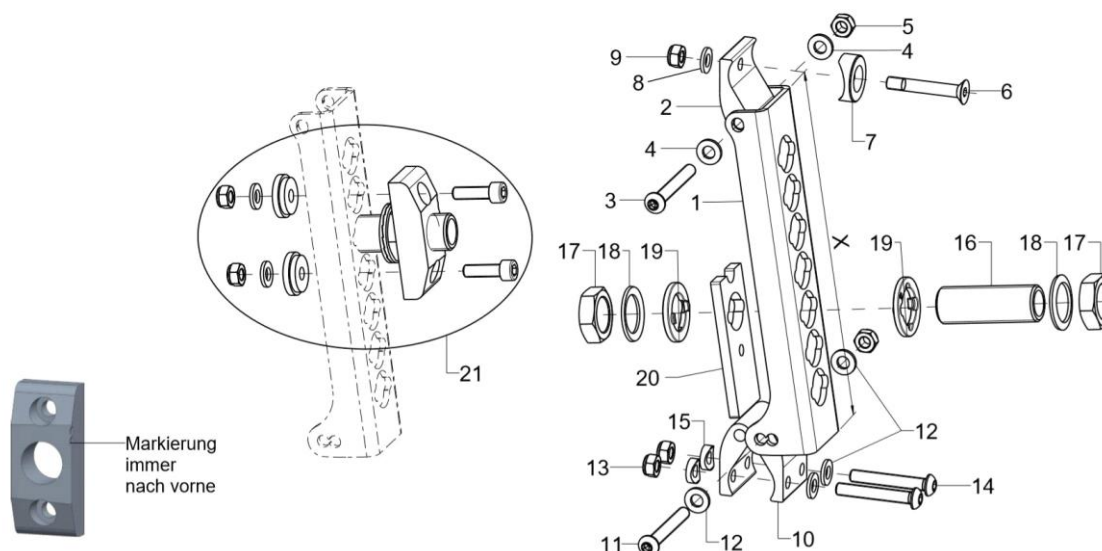


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	2	20150902	Lochplatte, X = 176,5 mm	
2	2	20150903	Aufhängung 1B oben	Standard-Rad: 0/2/5/8°, TRB-Rad: 0/2//8°
3-9	2	20150999	Montageset Aufhängung 1B oben	
3	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x50	
4	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
5	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
6	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x40	
7	1		Sattelscheibe Alu d=23x8	
8	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
9	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
10	2	20150913	Aufhängung 2B unten	Standard-Rad: 2/5/8°, TRB-Rad: 2/8°
o.B.	2	20150917	Aufhängung bei Trommelbremse 2B unten	Standard-Rad: 0°, TRB-Rad: 0/5°
11-15	2	20150998	Montageset Aufhängung 2B	
11	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x50	
12	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
13	3		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
14	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40	
15	2		Sattelscheibe ø12/6,2x2,5	
16-20	1	210024	Einschraubadapter M18x1 d=12	
17	2		Mutter M18x1 SW24	
18	2		Sicherungsscheibe S18 - FST	
19	2	20150501	Sturz-Vorspurscheibe 0,5°, Set (2 Stück)	0,5° Spurausgleich
o.B.	2	20150502	Sturz-Vorspurscheibe 1°	1° Spurausgleich
20	1	20150921	Verstärkung Lochplatte	
21	2	20150929	Distanzblock f. Radstandsverbreiterung inklusive Montageset	Bis zu 20mm Verbreiterung pro Seite möglich

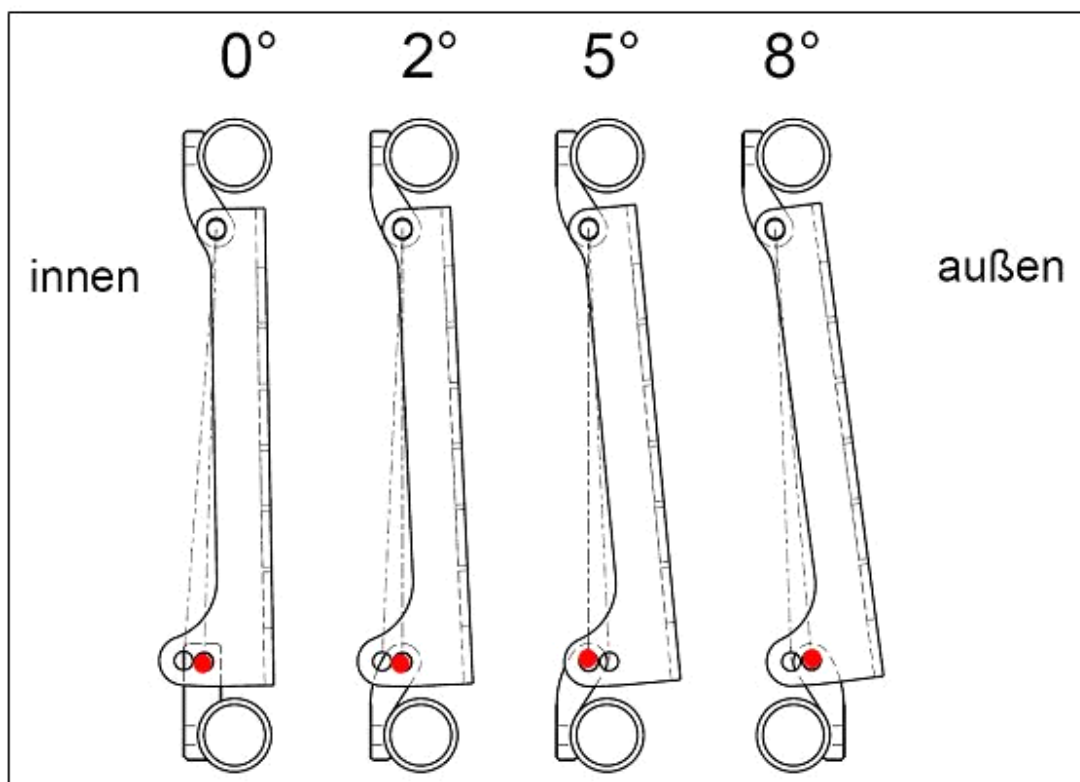

Einstellungen Radsturz bei Trommelbremsrädern - Stand: 25.02.14

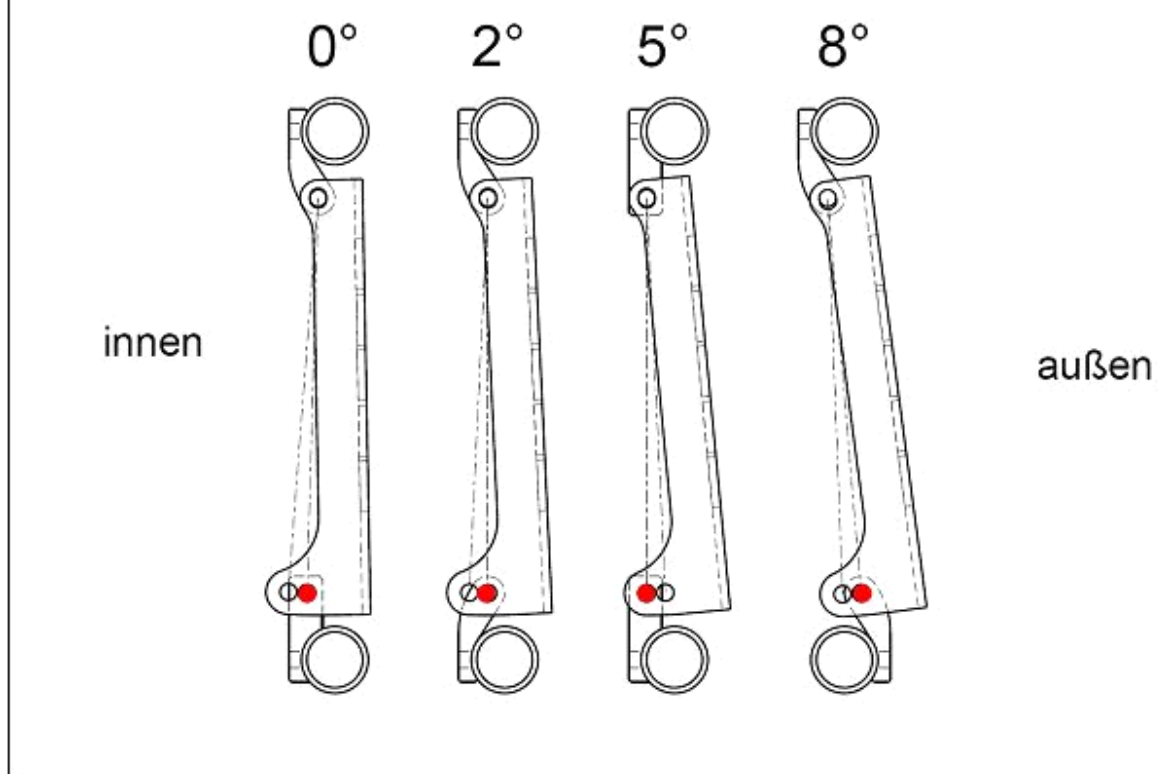


## Lochplatte Trommelbremsrad

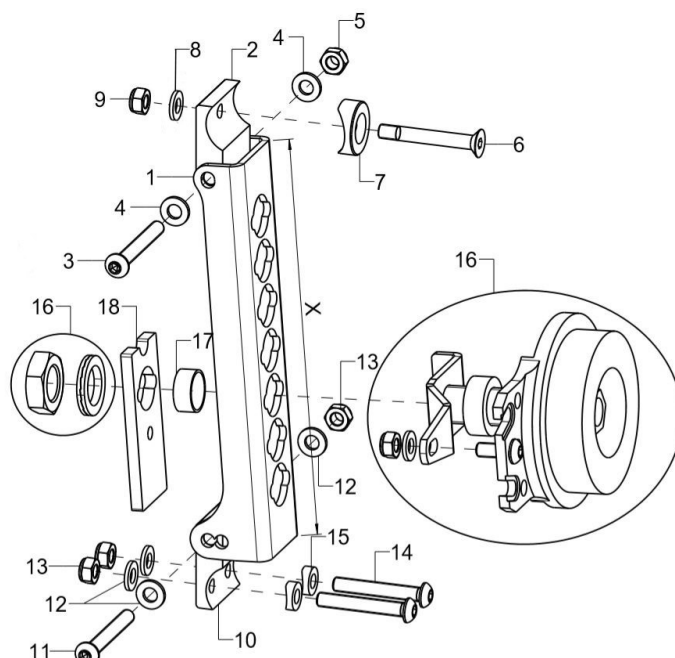

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	2	20150902	Lochplatte, X = 176,5 mm	
2	2	20150916	Aufhängung bei Trommelbremse 1B oben	TRB-Rad: 5°
o.B.	2	20150903	Aufhängung 1B oben	Standard-Rad: 0/2/5/8°, TRB-Rad: 0/2//8°
3-9	2	20150999	Montageset Aufhängung 1B oben	
3	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x50	
4	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
5	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
6	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x40	
7	1		Sattelscheibe Alu d=23x8	
8	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
9	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
10	2	20150917	Aufhängung bei Trommelbremse 2B unten	Standard-Rad: 0°, TRB-Rad: 0/5°
o.B.	2	20150913	Aufhängung 2B unten	Standard-Rad: 2/5/8°, TRB-Rad: 2/8°
11-15	2	20150998	Montageset Aufhängung 2B	
11	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x50	
12	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
13	3		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
14	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40	
15	2		Sattelscheibe ø12/6,2x2,5	
16-18	1	220005	Trommelbremskörper kpl., inkl. Einschraubadapter und Gegenhalter	links/rechts
o.B.	1	220013	Trommelbremskörper für LLR-TBR Rad, incl.Einschraubadapter und Gegenhalter(links/rechts angeben)	links/rechts
17	2	22001202	Reduzierbuchse 8mm	
18	2	20150921	Verstärkung Lochplatte	
o.B.	2	597492	Verbreiterungsset für Trommelbremsrad	

# Radstandsverlängerung 0°, 3°, 7°

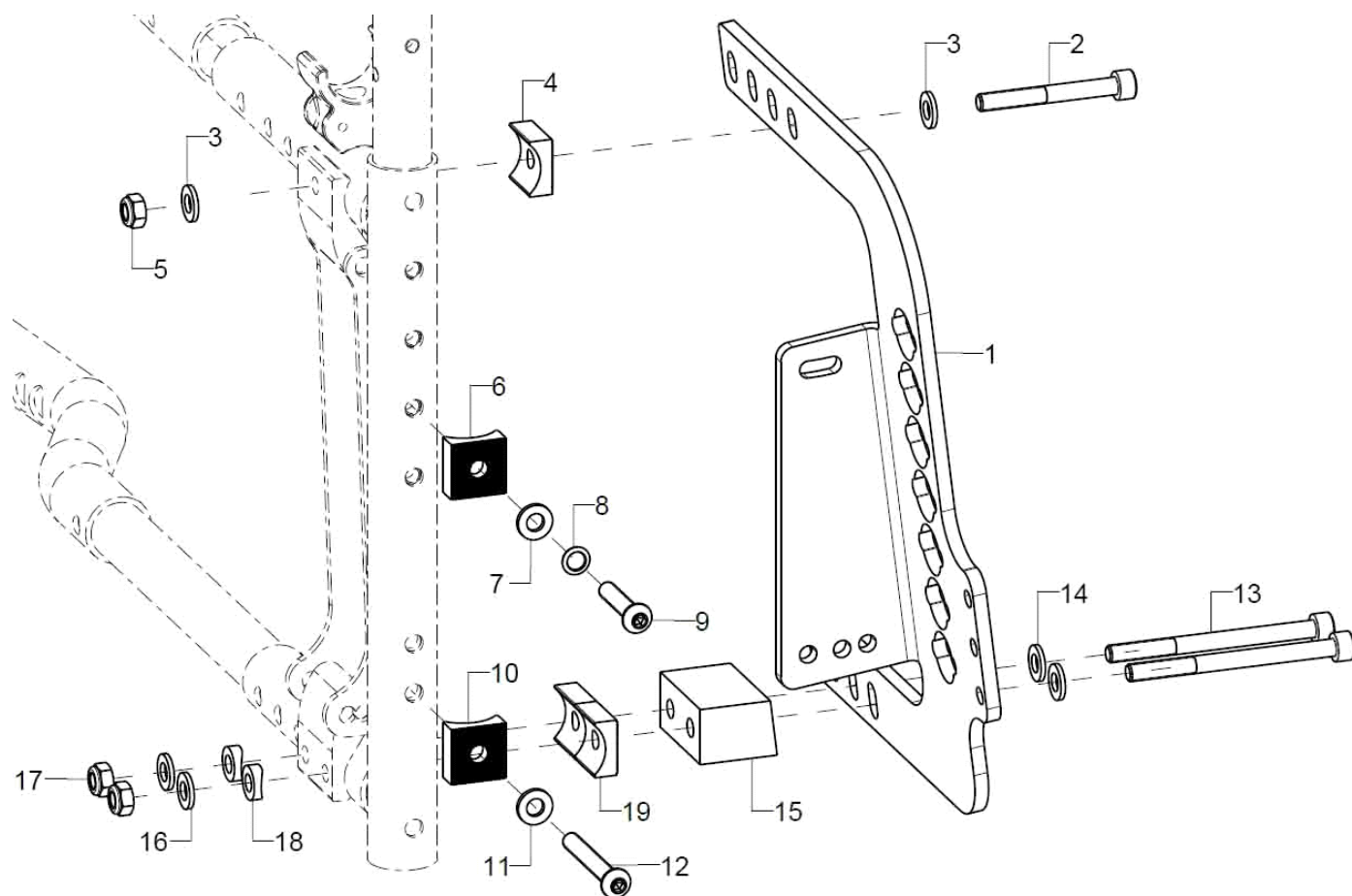


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-19	1P	7601	Radstandverlängerung, kpl.	Radsturz, Rahmengröße, Lochplattenmontage innen oder außen
1-19	1	76060202	Radstandsverlängerung Gr.2, rechts	bei Rahmenhöhe strd.
o.B.	1	76060201	Radstandsverlängerung Gr.2, links	bei Rahmenhöhe strd.
altern.	1	76060302	Radstandsverlängerung XL, rechts	bei Rahmenhöhe XL
o.B.	1	76060301	Radstandsverlängerung XL, links	bei Rahmenhöhe XL
2	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x50	
3	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
4	1		Halbschale 20, R12	
5	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
6	1		Halbschale 20, R12	
7	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
8	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	
9	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30	
10	1		Halbschale 20, R12	
11	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
12	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45	
13	2		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x45	Radsturz 0°
altern.	2		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x60	Radsturz 3°
altern.	2		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x75	Radsturz 7°
14	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
15-19	1	76060103	Radsturzkeil 3° inkl. Montageset	Lochplattenanbau innen oder außen
altern.	1	76060104	Radsturzkeil 7° inkl. Montageset	Lochplattenanbau innen oder außen



16	2	Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4
17	2	Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6
18	2	Sattelscheibe ø12/6,2x2,5
19	2	Halbschale 20, R12

**Achtung:**  
Bei dem Anbau der Radstandsverlängerung ist auch der Anbau der Bremsschiene für die Radstandsverlängerung erforderlich. Siehe Baugruppe Rahmen Sport.


## Antriebsräder

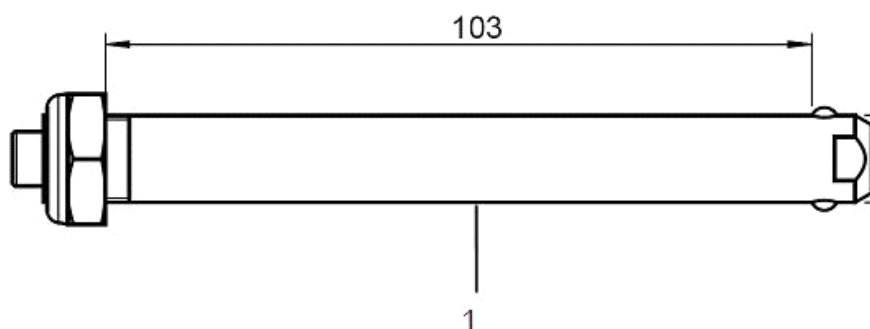

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
o.B.	2	212200	Antriebsradfelge 22 Zoll/Standard-Nabe	
o.B.	2	212400	Antriebsradfelge 24 Zoll/Standard-Nabe	
o.B.	2	222200	Antriebsradfelge 22 Zoll/Trommelbrems-Nabe	
o.B.	2	222400	Antriebsradfelge 24 Zoll/Trommelbrems-Nabe	
o.B.	2	222600	Antriebsradfelge 26 Zoll/Trommelbrems-Nabe	
o.B.	2	212240	Profilradfelge 22 Zoll/Standard-Nabe und integr. Greifring	
o.B.	2	212440	Profilradfelge 24 Zoll/Standard-Nabe und integr. Greifring	
o.B.	2	222240	Profilradfelge 22 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring	
o.B.	2	222440	Profilradfelge 24 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring	
o.B.	2	222640	Profilradfelge 26 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring	
o.B.	2	212277	Leichtlaufradfelge 22 Zoll/Standard-Nabe	
o.B.	2	212477	Leichtlaufradfelge 24 Zoll/Standard-Nabe	
o.B.	2	212281	Leichtlaufradfelge 22 Zoll/Trommelbrems-Nabe, schwarz	
o.B.	2	212481	Leichtlaufradfelge 24 Zoll/Trommelbrems-Nabe, schwarz	
o.B.	2	220001	Steckachse $\varnothing 12 \times 123$ , für Trommelbremsnabe	
o.B.	2	210003	Steckachse $\varnothing 12 \times 103$ mm für Standardnaben (bei Standard-, Profil- und Leichtlaufrad)	
o.B.	2	200011	Rillenkugellager $\varnothing 28/12 \times 8$ 6001z	


## Doppelgreifreifen Standard

Erst ab SB24 möglich.

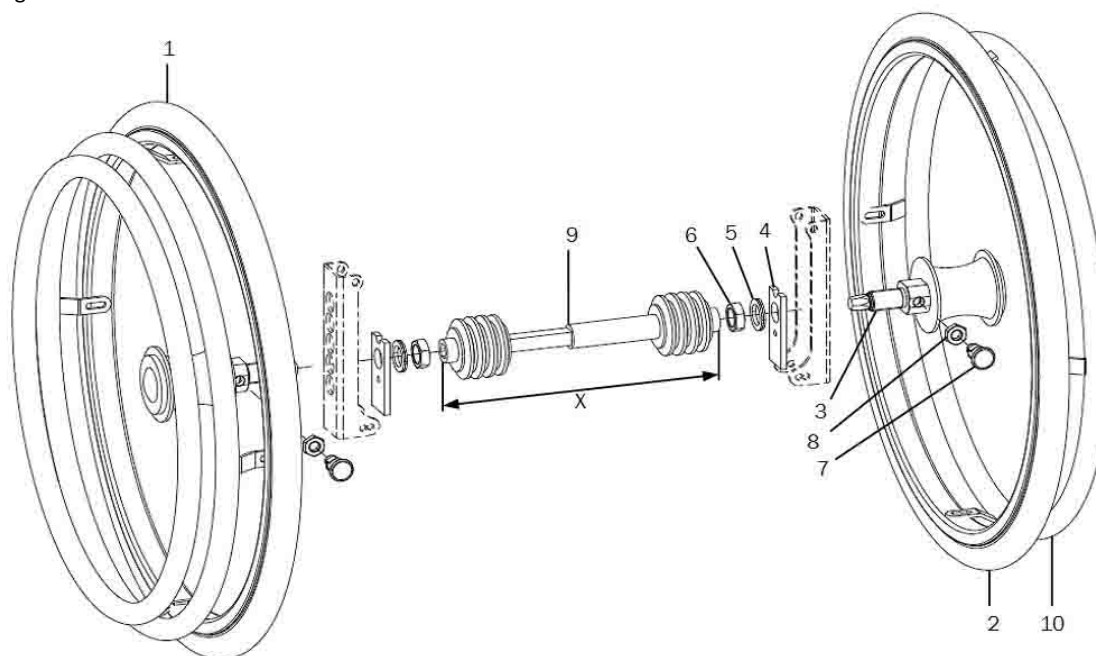

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-9	1	261403	Doppelgreifringssystem 22" für Standard-Nabe inkl. Bremsanker, Einschraubadapter, Gegenhalter und Teleskopstange	SB
o.B.	1	261405	Doppelgreifringssystem 24" für Standard-Nabe inkl. Bremsanker, Einschraubadapter, Gegenhalter und Teleskopstange	SB
1	1	261442	22" Doppelgreifringrad mit Standard-Nabe inkl. Steckachse, Antriebsseite	
o.B.	1	261444	24" Doppelgreifringrad mit Standard-Nabe inkl. Steckachse, Antriebsseite	
2	1	261443	22" Doppelgreifringrad mit Standard-Nabe inkl. Steckachse, Gegenseite	
o.B.	1	261445	24" Doppelgreifringrad mit Standard-Nabe inkl. Steckachse, Gegenseite	
3-8	1	261429	Montagezubehör DGR	
3	1		Einschraubadapter DGR Standard	
4	1	20150921	Verstärkung Lochplatte	
5	1		Sicherungsscheibe Nord-Lock M18	
6	1		Mutter M18x1 SW24	
7	1		Arretierbolzen mit Rastnut, M10x1	
8	1		Sechskantmutter ISO 4032 (DIN 934) - M10	
9	1	26140004	Teleskopstange 220-280mm für Doppelgreifringssystem	SB30+32
o.B.	1	26140005	Teleskopstange 270-330mm für Doppelgreifringssystem	SB34+36
o.B.	1	26140006	Teleskopstange 295-370mm für Doppelgreifringssystem	SB38+40
o.B.	1	26140007	Teleskopstange 350-460mm für Doppelgreifringssystem	SB42-50
10	1	261431	Greifring 22" für Gegenseite	
o.B.	1	261432	Greifring 24" für Gegenseite	

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
Die passenden Greifringüberzüge finden Sie im Kapitel "Greifringüberzüge"





## Doppelgreifreifen Trommelbremse


Erst ab SB24 möglich

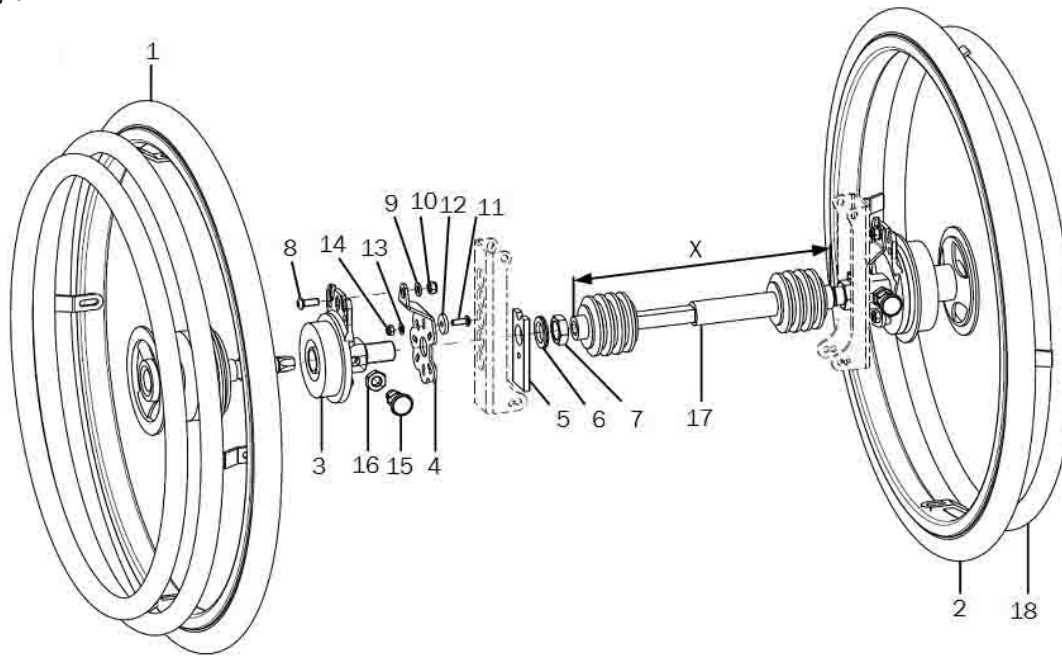

Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-17	1	261404	Doppelgreifringssystem 22" für TBR-Nabe inkl. Bremsanker, Einschraubadapter, Gegenhalter und Teleskopstange	SB
o.B.	1	261406	Doppelgreifringssystem 24" für TBR-Nabe inkl. Bremsanker, Einschraubadapter, Gegenhalter und Teleskopstange	SB
1	1	261452	22" Doppelgreifringrad mit Trommelbremse inkl. Steckachse, Antriebsseite	Anbau rechts oder links
o.B.	1	261454	24" Doppelgreifringrad mit Trommelbremse inkl. Steckachse, Antriebsseite	Anbau rechts oder links
2	1	261453	22" Doppelgreifringrad mit Trommelbremse inkl. Steckachse, Gegenseite	Anbau rechts oder links
o.B.	1	261455	24" Doppelgreifringrad mit Trommelbremse inkl. Steckachse, Gegenseite	Anbau rechts oder links
3-16	1	261428	Montagezubehör DGR Trommelbremse	Anbau rechts oder links
3	1		Bremsanker inkl. Einschraubadapter Fitting DGR	
4	1	220012	Trommelbremskörper schwarz für LLR incl. Gegenhalter, TBR-Distanz, Verschraubung (Radsturz/ links-rechts angeben)	Anbau rechts oder links
5	1	20150921	Verstärkung Lochplatte	
6	1		Sicherungsscheibe Nord-Lock M18	
7	1		Mutter M18x1 SW24	
8	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
9	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
10	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
11	1		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x14	
12	1		Scheibe, ø18/5,2x3 für Bremsgegenhalter DGR, schwarz	
13	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3	
14	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5	
15	1		Arretierbolzen mit Rastnut, M10x1	
16	1		Sechskantmutter ISO 4032 (DIN 934) - M10	
17	1	26140004	Teleskopstange 220-280mm für Doppelgreifringssystem	SB30+32
o.B.	1	26140005	Teleskopstange 270-330mm für Doppelgreifringssystem	SB34+36
o.B.	1	26140006	Teleskopstange 295-370mm für Doppelgreifringssystem	SB38+40
o.B.	1	26140007	Teleskopstange 350-460mm für Doppelgreifringssystem	SB42-50
18	1	261431	Greifring 22" für Gegenseite	
o.B.	1	261432	Greifring 24" für Gegenseite	



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Die passenden Greifringüberzüge finden Sie im Kapitel "Greifringüberzüge"





Bereifung

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
o.B.	2	202216	Luftbereifung 22 x1" Right Run schwarz (ETRTO-489)	
o.B.	2	202416	Luftbereifung 24 x1" Right Run schwarz (ETRTO-540)	
o.B.	2	202613	Luftbereifung 26 x 1" Right Run, grau/schwarz	
o.B.	2	202212	Luftbereifung 22 x 1" Marathon plus, schwarz	
o.B.	2	202412	Luftbereifung 24 x 1" Marathon plus, schwarz	
o.B.	2	202612	Luftbereifung 26 x 1" Marathon plus, schwarz	
o.B.	2	202221	Luftbereifung 22 x 1 3/8", grau (ETRTO-489)	
o.B.	2	202421	Luftbereifung 24 x 1 3/8", grau (ETRTO-540)	
o.B.	2	200522	Schlauch 22"	
o.B.	2	200524	Schlauch 24"	
o.B.	2	232213	Pannensichere Bereifung 22x1", schwarz	
o.B.	2	232413	Pannensichere Bereifung 24x1", schwarz	
o.B.	2	232214	Pannensichere Bereifung 22x1 3/8", schwarz	
o.B.	2	232414	Pannensichere Bereifung 24x1 3/8", schwarz	
o.B.	2	232212	Pannensichere Bereifung 22 x 1 Zoll, grau mit 16 mm Felgenbreite	
o.B.	2	232412	Pannensichere Bereifung 24 x 1 Zoll, grau mit 16 mm Felgenbreite	

Greifringe


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
o.B.	2	302201	Greifring, Edelstahl 22 Zoll standard (4 Laschen/ø465 mm)	Nur für Standardrad
o.B.	2	302301	Greifring, Edelstahl 22 Zoll hoch (4 Laschen/ø 515 mm)	Nur für Standardrad
o.B.	2	302401	Greifring, Edelstahl 24 Zoll standard (6 Laschen/ø515 mm)	Nur für Standardrad
o.B.	2	302501	Greifring, Edelstahl 24 Zoll hoch (6Laschen/ø 567 mm)	Nur für Standardrad
o.B.	2	302601	Greifring 26" Standard, Edelstahl poliert	Nur für Standardrad
o.B.	2	302701	Greifring 26" hoch, Edelstahl poliert	Nur für Standardrad
o.B.	2	3422	Greifring Maxgrepp Ergo-Para 22 Zoll mit 4 Laschen kpl.	Für Standard- + Leichtlaufrad
o.B.	2	3424	Greifring Maxgrepp Ergo-Para 24" Zoll mit 4 Laschen kpl.	Für Standard- + Leichtlaufrad
o.B.	2	3122	Greifring Edelstahl 22", 8 Noppen	Nur für Standardrad
o.B.	2	3124	Greifring Edelstahl 24", 8 Noppen	Nur für Standardrad
o.B.	2	312611	Greifring Edelstahl 26", 8 Noppen	Nur für Standardrad
o.B.	2	3322	Greifring Aluminium 22", schwarz; PVC beschichtet	Nicht für Profilräder
o.B.	2	3324	Greifring Aluminium 24", schwarz; PVC beschichtet	Nicht für Profilräder
o.B.	2	3326	Greifring Aluminium 26", schwarz; PVC-Ummantelung	Nicht für Profilräder
o.B.	2	342424	Greifring 24" mit ergonomischem Greifringprofil, schwarz eloxiert mit integriertem Griffgummi	Für Standard- + Leichtlaufrad
o.B.	2	302078	Greifring 20", Aluminium schwarz, 6 Laschen	für Leichtlaufrad mit Trommelbremse
o.B.	2	302278	Greifring 22", Aluminium schwarz, 6 Laschen	für Leichtlaufrad mit Trommelbremse
o.B.	2	302478	Greifring 24", Aluminium schwarz, 6 Laschen	für Leichtlaufrad mit Trommelbremse



Greifringüberzüge

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
o.B.	2	322002	Greifring-Überzug 20 Zoll Silikon für 20" Profilrad, 20" LLR hoch, 22" Greifring Std. Edelstahl, 20" Greifring hoch Edelstahl, DGR 24" Innenring (1400mm)	
o.B.	2	322202	Greifring-Überzug 22 Zoll Silikon für 22" Profilrad	
o.B.	2	322205	Greifring-Überzug 22 Zoll Silikon für 22" LLR Std, DGR 22" Außenring	
o.B.	2	322208	Greifring-Überzug 22 Zoll Silikon für DGR 22" Innenring	
o.B.	2	322402	Greifring-Überzug 24 Zoll Silikon für 24" Profilrad (1660mm)	
o.B.	2	322404	Greifring-Überzug 24 Zoll Silikon für 24" Greifring Std. Edelstahl, 22" LLR hoch	
o.B.	2	322405	Greifring-Überzug 24 Zoll Silikon für 24" LLR, DGR 24" Außenring	
o.B.	2	322603	Greifring-Überzug 24 Zoll Silikon für 24" LLR hoch, 24" Greifring Std. Edelstahl hoch, 26" Greifring Std. Edelstahl	
o.B.	2	322602	Greifring-Überzug 26 Zoll Silikon für 26" Profilrad, 26" Greifring hoch Edelstahl (1853mm)	
o.B.	2	322201	Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 22"	
o.B.	2	322401	Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 24"	
o.B.	2	322601	Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 26"	

## Speichenschutz

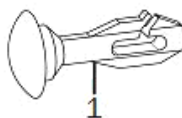

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	250001	Clip-Halter für transparenten Speichensch. Set=20 St.	
o.B.	2	252200	Speichenschutz 22", Unicolor transparent	
o.B.	2	252400	Speichenschutz 24", Unicolor transparent	
o.B.	2	252600	Speichenschutz 26", Unicolor transparent	


**Design-Dekor-Speichenschützer können Sie unter den folgenden Internetadressen wählen:**

[www.speichen-schutz.de](http://www.speichen-schutz.de)  
[www.wheelchairgadgets.com](http://www.wheelchairgadgets.com)

## Kniehebelbremse


Bitte wählen Sie zu jeder Bremsenvariante die benötigte Anbauvariante

### Bremsenvarianten

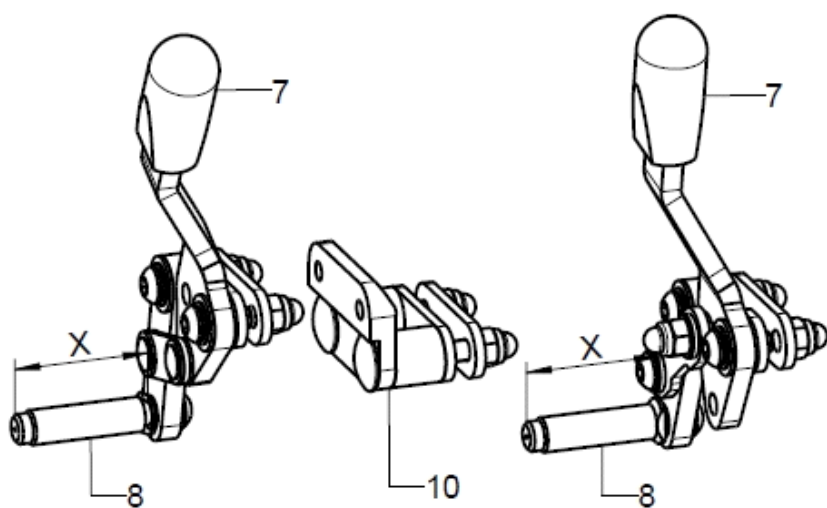


1  
KHB Standard


2  
KHB Pull to Lock

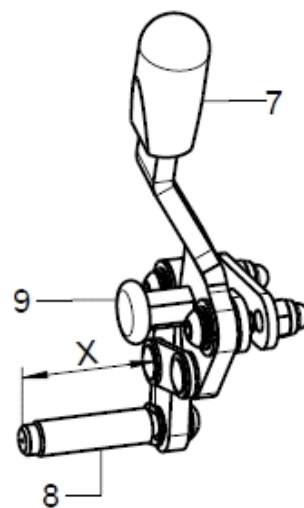


3  
KHB verriegelbar

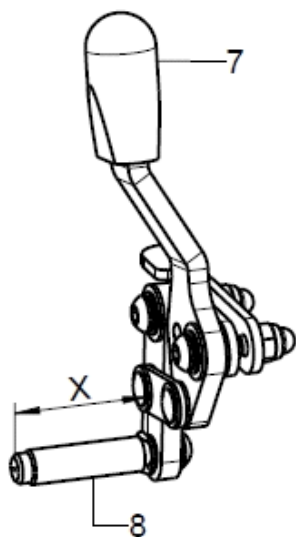

4  
KHB mit reduziertem  
Hebelweg

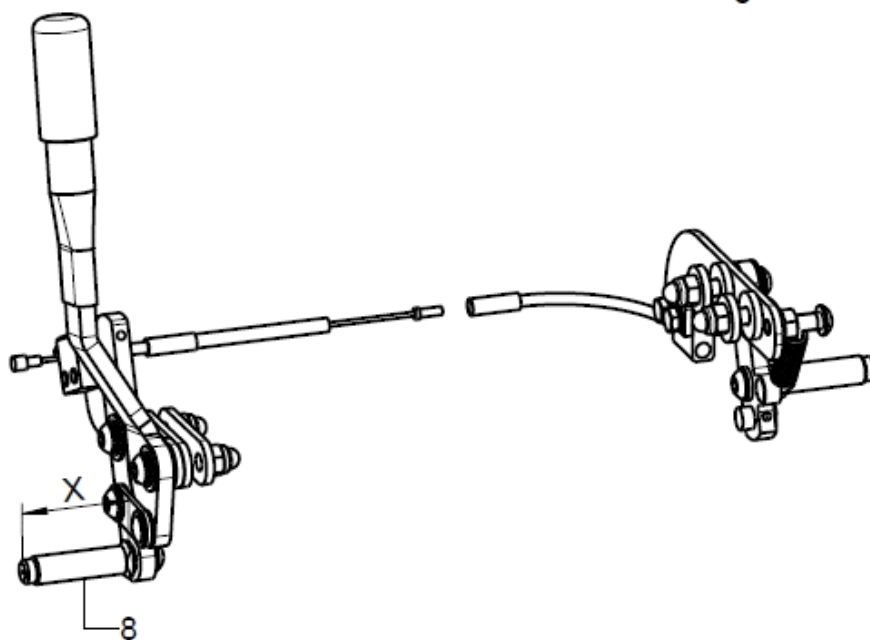

5  
Einhandbremse Bedienseite

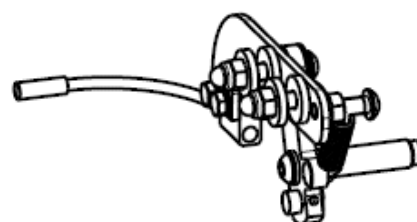


6  
Einhandbremse  
Nicht-Bedienseite




Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
Anbauvariante				
o.B.	1	357501	Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta BSA/Vector BSA mit geradem Rahmen incl. Bremserhöhung (Anbau Distanzen beachten)	
o.B.	1	357502	Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta BSA/Vector BSA mit geradem Rahmen incl. Bremserhöhung (Anbau Distanzen beachten)	
o.B.	1	357503	Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta BSA/Vector BSA mit abduziertem Rahmen incl. Bremserhöhung (Anbau Distanzen beachten)	
o.B.	1	357504	Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta BSA/Vector BSA mit abduziertem Rahmen und Desk-Seitenteil incl. Bremserhöhung (Anbau Distanzen beachten)	
o.B.	1	357505	Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta Sport mit geradem Rahmen (Anbau Distanzen beachten)	
o.B.	1	357506	Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta Sport mit geradem Rahmen und Desk-Seitenteil (Anbau Distanzen beachten)	
o.B.	1	357507	Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta Sport mit abduziertem Rahmen (Anbau Distanzen beachten)	
o.B.	1	357508	Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta Sport mit abduziertem Rahmen und Desk-Seiten (Anbau Distanzen beachten)teil	
Bremsenvariante				
1+7+8	1	352502	Kniehebelbremse Standard, rechts, kpl.	Länge X, Rahmenvariante
o.B.	1	352501	Kniehebelbremse Standard, links, kpl.	Länge X, Rahmenvariante
2+7+8	1	352902	Kniehebelbremse Pull-to-Lock, rechts, kpl.	Länge X, Rahmenvariante
o.B.	1	352901	Kniehebelbremse Pull-to-Lock, links, kpl.	Länge X, Rahmenvariante
3+7-9	1	351302	Kniehebelbremse verriegelbar, rechts kpl.	Länge X, Rahmenvariante
o.B.	1	351301	Kniehebelbremse verriegelbar, links, kpl.	Länge X, Rahmenvariante
4+7+8	1	353402	Kniehebelbremse BSH, rechts, kpl.	Beinstütze hochschwenkbar, Länge X, Rahmenvariante
o.B.	1	353401	Kniehebelbremse BSH, links, kpl.	Beinstütze hochschwenkbar, Länge X, Rahmenvariante
5+6+8	1	350902	Einhandbremse rechts, kpl, Bedienseite + Nichtbedienseite	Länge X, Rahmenvariante
o.B.	1	350901	Einhandbremse links, kpl, Bedienseite + Nichtbedienseite	Länge X, Rahmenvariante
5+8	1	350904	Einhandbremse Bedienseite rechts, kpl.	Länge X, Rahmenvariante
o.B.	1	350903	Einhandbremse Bedienseite links, kpl.	Länge X, Rahmenvariante
6+8	1	350912	Einhandbremse Nicht-Bedienseite, kpl.	Länge X, Rahmenvariante, links/rechts
7	2	350017	Abdeckkappe schwarz, 15x6,8	
8	1	352518	Bremsbolzen 40 mm Linksgew. inkl. Montagezubehör	Länge X, Rechte Seite
o.B.	1	352506	Bremsbolzen gerändelt 40 mm, inkl. Montagezubehör	Länge X, Linke Seite
o.B.	1	352519	Bremsbolzen 50 mm Linksgew. inkl. Montagezubehör	Länge X, Rechte Seite
o.B.	1	352507	Bremsbolzen gerändelt 50 mm, inkl. Montagezubehör	Länge X, Linke Seite
o.B.	1	352520	Bremsbolzen 60 mm Linksgew. inkl. Montagezubehör	Länge X, Rechte Seite
o.B.	1	352510	Bremsbolzen gerändelt 60 mm, inkl. Montagezubehör	Länge X, Linke Seite
9	1	350503	Zugschnapper M10 Ø6 mm arretierbar, schwarz	
10	2	35250301	Bremserhöhung für KHB kpl.	BSA-Rahmen




## Seilzugbremse Bremskörper/Andrückteil

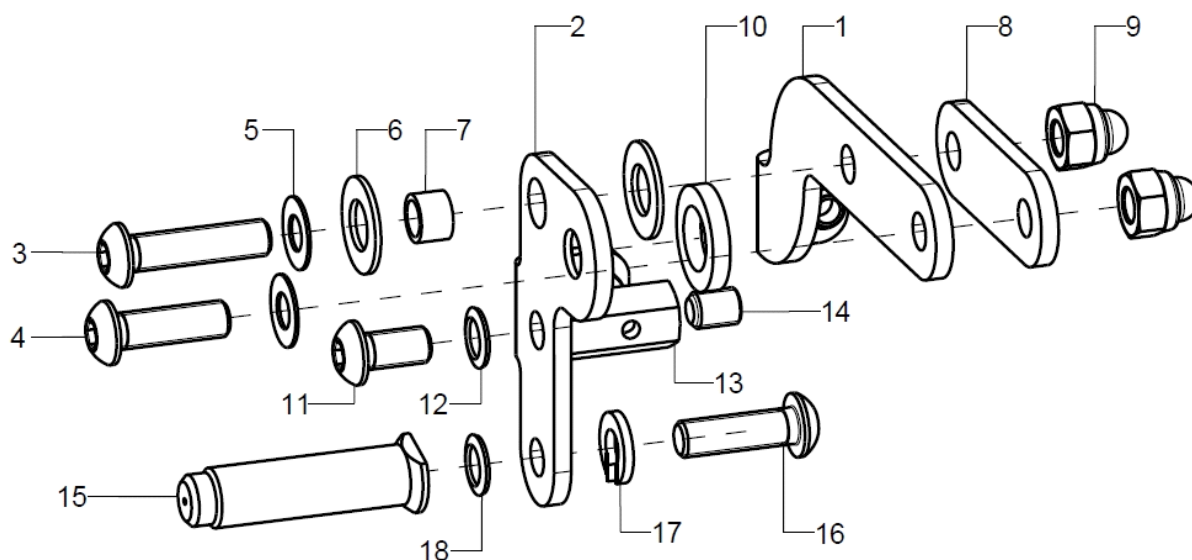

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-32	1	3531	Seilzugbremse im Seitenteil integriert kpl. (Bremskörper , Benutzerbedienung, Verschraubung)	Länge X, Rahmenvariante, links/rechts
1-14	1	353116	Seilzugbremse Bremskörper rechts, kpl.	
o.B.	1	353115	Seilzugbremse Bremskörper links, kpl.	
1	1	35310205	Basisteil, rechts	Benutzerbedienteil
o.B.	1	35310204	Basisteil, links	Benutzerbedienteil
2	1	35310202	Andrückteil, rechts	Benutzerbedienteil
o.B.	1	35310201	Andrückteil links	Benutzerbedienteil
3-14	2	353199	Montageset bei Bremskörper der Seilzugbremse	Rahmenvariante
3	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25	
o.B.	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35	
o.B.	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40	
o.B.	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x50	
4	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20	
o.B.	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30	
o.B.	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35	
o.B.	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45	
o.B.	1	352505	Lasche 34, Bd 16x3x50	
o.B.	2	35310209	Distanzbuchse Alu, schwarz Ø14x10 (Set 2 Stück)	
o.B.	2	35310207	Distanzbuchse Alu, schwarz Ø16x15 (Set 2 Stück)	
o.B.	2	35310208	Distanzbuchse Alu, schwarz Ø16x25 (Set 2 Stück)	
5	2		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
6	2		Kotflügelscheibe 8,4x16x1 PE	
7	1		Messingbuchse 8x6x5,5	
8	2	352505	Lasche 34, Bd 16x3x50	
o.B.	2		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4	
9	2		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6	
10	1		Scheibe PS 3xØ17,5/10,7 schwarz	
11	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12	
12	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	
13	1		Klemmnippelmuffe SW10 M6x20 mit Bohrung	
14	1		Gewindestift mit Innensechskant ISO 4026 (DIN 913), M6x8	
15-18	1	352518	Bremsbolzen 40 mm Linksgew. inkl. Montagezubehör	Länge X, Rechte Seite


		Ersatzteilkatalog Jump beta		Bremse	Seite 93 von 102
o.B.	1	352506	Bremsbolzen gerändelt 40 mm, inkl. Montagezubehör	Länge X, Linke Seite	
15-18	1	352519	Bremsbolzen 50 mm Linksgew. inkl. Montagezubehör	Länge X, Rechte Seite	
o.B.	1	352507	Bremsbolzen gerändelt 50 mm, inkl. Montagezubehör	Länge X, Linke Seite	
15-18	1	352520	Bremsbolzen 60 mm Linksgew. inkl. Montagezubehör	Länge X, Rechte Seite	
o.B.	1	352510	Bremsbolzen gerändelt 60 mm, inkl. Montagezubehör	Länge X, Linke Seite	
16	1		Li-schr. m. Innensechsk. ISO 7380, M6x20, Links-gew.		
o.B.	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20		
17	1		Federring DIN 127 - A 6		
18	1		Sicherungsscheibe S6 - FST		

## Seilzugbremse Benutzerbedienteil

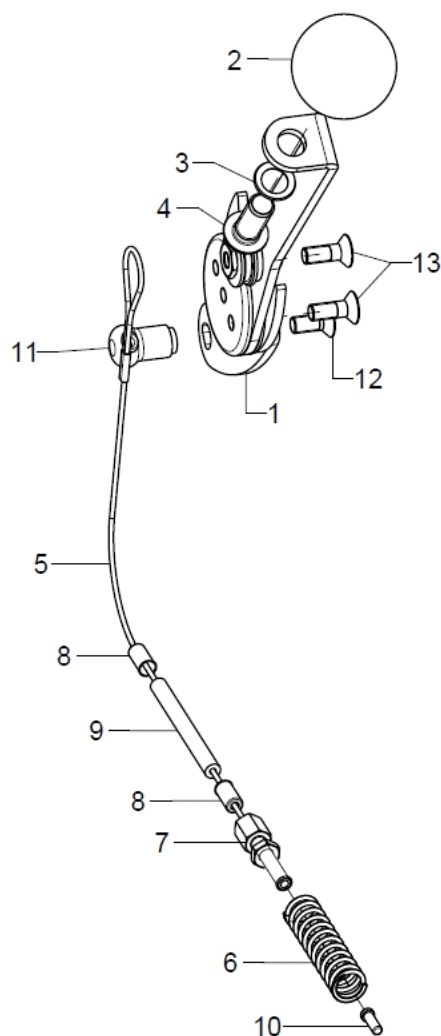


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-13	2	353103	Benutzerbedienung bei Seilzugbremse im Seitenteil integriert kpl.	rechts, links
1-4	1	353111	Bedienteil der Seilzugbremse, rechts - vormontiert	
o.B.	1	353112	Bedienteil der Seilzugbremse, links - vormontiert	
2-4	1	35310109	Kugelknopf $\varnothing 32/M8$ , Form C, schw., inkl. Montagezubehör	
3	1		Sicherungsscheibe S8 - FST	
4	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M8x20	
5-10	2	353105	Seilzug kpl. Bei Seilzugbremse	
5	1	35310301	Seilzug mit Schlaufe 90 cm	
6	1	352405	Druckfeder, 1,1x9,4x44,3	
7	1	352406	Einstellschraube f. Bowdenzug, M5x34 mm	
8	2	352412	Abschlußhülse gedreht aus Metall, $\varnothing 5$ , Endkappen	
9	1	35310303	Außenhülle für Bremszug schwarz, 38 cm lang	
10	1	352005	Endkappe für Innenzüge $\varnothing 1-1,5$ mm	Set 2 Stück
11	1		Seilzug-Durchführung	
12	1		Sicherungsscheibe S5 - FST	
13	1		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x12	
14	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x14	

# Bremsgriff bei Trommelbremse

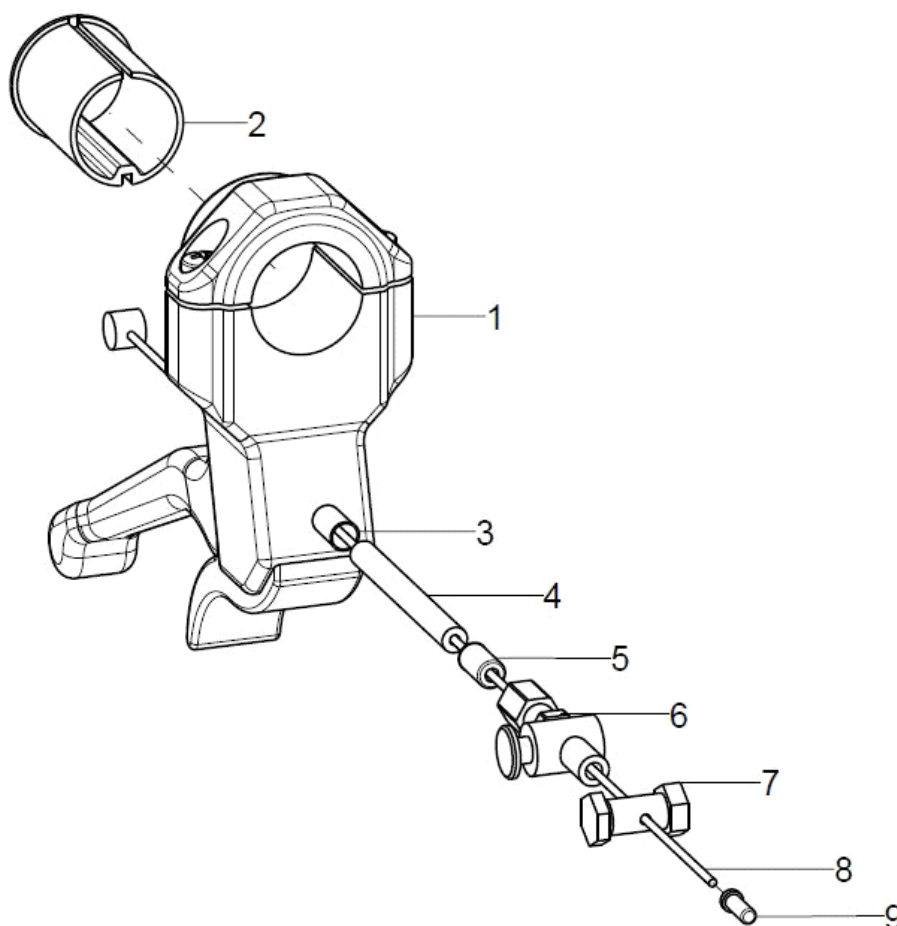



Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-9	2	352016	Handbremshebel kpl. mit Bedieneinheit (Hülle, Seilzug, Anschlussteile, Endkappen)	Schiebegriffvariante
1+2	1	352010	Handbremshebel schwarz, feststellbar	
2	1	352011	Klemmbuchse d/D=20/22 (30 mm) für Handbremshebel bei Profilrohr	Bei ausziehbaren Schiebegriffen und Schiebebügelgriff
3-9	2	352006	Bremsseilzug $\varnothing 1,5 \times 2250$ mm mit Hülle, Einstellschraube, Klemmschraube, Abschlusshülsen und Endkappe	
3	1		Endkappe für Bowdenzug	
4	1		Außenhülle für Bremszug schwarz, 150 cm lang	
5	1		Abschlußhülse gedreht aus Metall, $\varnothing 5$ , Endkappen	
6	1		Einstellschraube M6x40 mm inkl. Klemmschraube	
7	1		Klemmschraube für Bowdenzug	
8	1		Innenzug $\varnothing 1,5 \times 2250$ mm mit Doppelnippel	
9	1		Endkappe für Innenzüge $\varnothing 1-1,5$ mm	Set 2 Stück

# Bremshebelverlängerungen

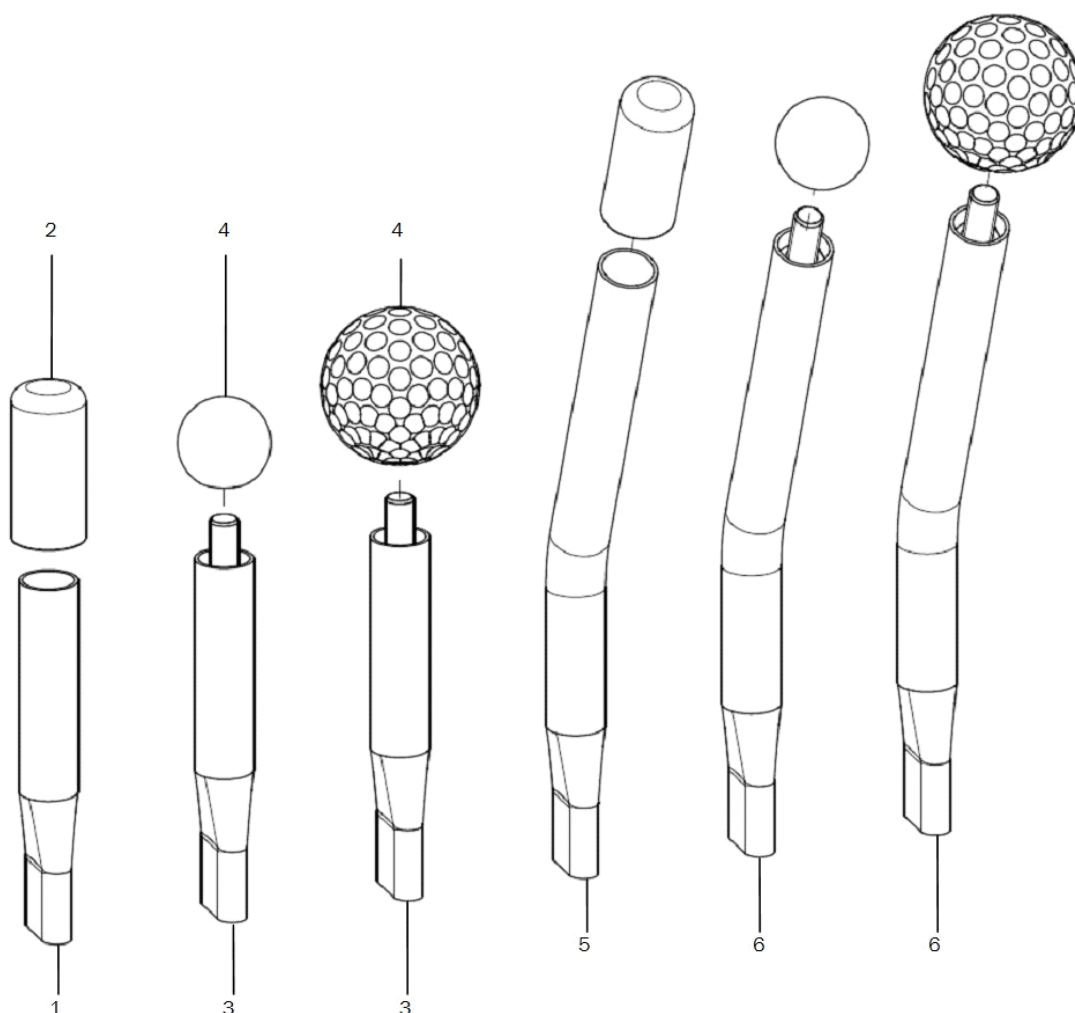


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-2	2	3510	Bremshebelverlängerung, 6 cm gerade mit Kappe	
2	2	351011	Rohrendkappe für Bremshebel-Verlängerung (2 Stück)	
3-4	2	3512	Bremshebelverlängerung 6 cm gerade mit Kugelknopf/Golfball	Kugelknopf, Golfball
4	2	351016	Kugelknopf ä. DIN319	
altern.	2	351211	Golfball	
5+2	2	3515	Bremshebelverlängerung 12 cm gekröpft mit Kappe	
6+4	2	3516	Bremshebelverlängerung 12 cm gekröpft mit Kugelknopf/Golfball	Kugelknopf, Golfball

# Caddy

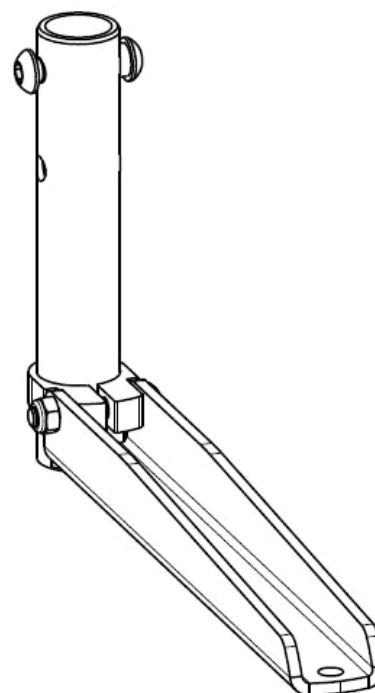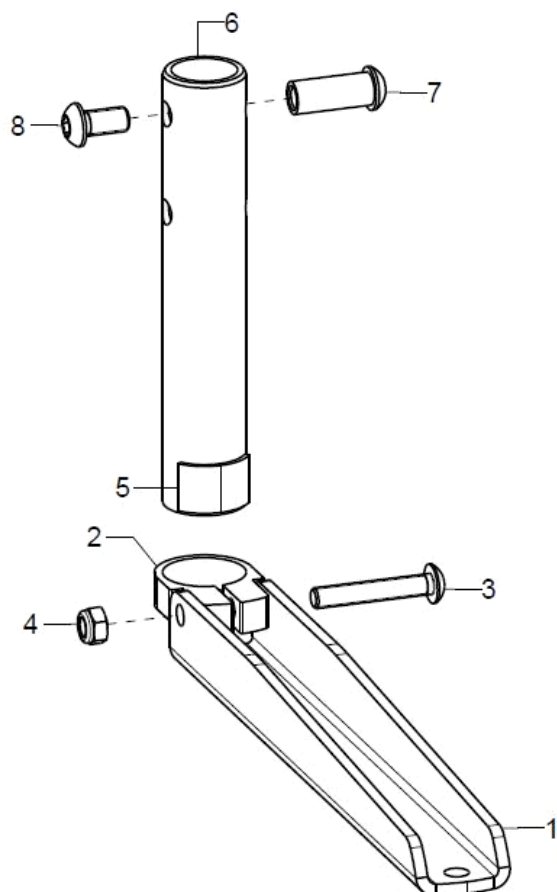

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-8	2	910112	Caddy für Beinstützenanbau innen, kpl.	
1-5	2	910110	Caddy für Beinstützenanbau außen, kpl.	
1	1	910101	Halter für Caddy	
2	1	910102	Klemmschelle ø29mm	
3	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x30	
4	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5	
5	1		Flauschband selbstklebend 20mm, schwarz	
6-8	1	910103	Rohradapter inkl. Montagematerial	
7	1		Gewindehülse M6x19,5 verklebt	
8	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x10	


## 2-Punkt-Beckengurt mit Kunststoffschloss

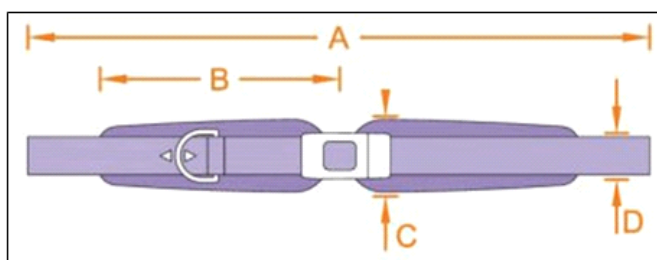

Größe	A	B	C	D
1	148	14	5	2,5
2	156	17	6	2,5
3	166	22	7	2,5

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	78050201	2-Punkt Beckengurt Gr.1 mit Kunststoffschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	78050202	2-Punkt Beckengurt Gr.2 mit Kunststoffschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	78050203	2-Punkt Beckengurt Gr.3 mit Kunststoffschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	780106	Rohrschellenset für Rohre 19-25 mm (2 Schellen)	
o.B.	1	780107	Klappschellenset (4 Stück) für Gurte mit 25 mm mit Bohrung	

## 2-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss

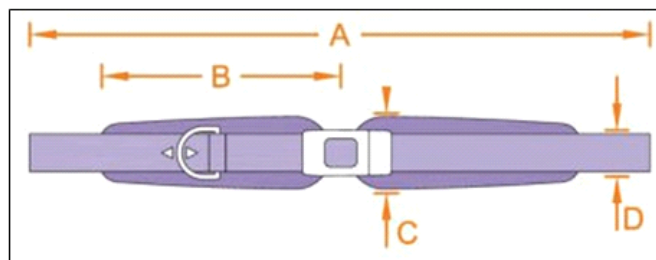


Größe	A	B	C	D
1	148	14	5	2,5
2	156	17	6	2,5
3	166	22	7	2,5

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	78050204	2-Punkt Beckengurt Gr.1 mit Metallschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	78050205	2-Punkt Beckengurt Gr.2 mit Metallschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	78050206	2-Punkt Beckengurt Gr.3 mit Metallschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	78050210	Sicherheits-Schutz-Kappe für Metallschloss	
o.B.	1	780106	Rohrschellenset für Rohre 19-25 mm (2 Schellen)	
o.B.	1	780107	Klappschellenset (4 Stück) für Gurte mit 25 mm mit Bohrung	




## 4-Punkt-Beckengurt mit Kunststoffschloss

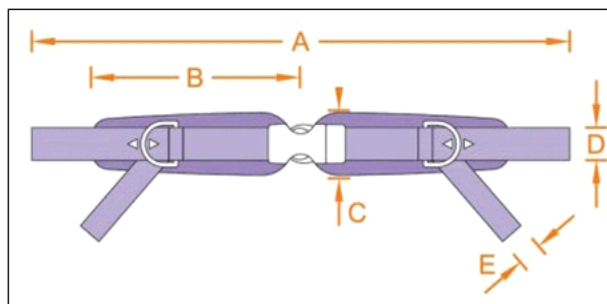

Größe	A	B	C	D	E
1	148	14	5	2,5	2,5
2	156	17	6	2,5	2,5
3	166	22	7	2,5	2,5

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	78050401	4-Punkt Beckengurt Gr.1 mit Kunststoffschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	78050402	4-Punkt Beckengurt Gr.2 mit Kunststoffschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	78050403	4-Punkt Beckengurt Gr.3 mit Kunststoffschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	780106	Rohrschellenset für Rohre 19-25 mm (2 Schellen)	
o.B.	1	780107	Klappschellenset (4 Stück) für Gurte mit 25 mm mit Bohrung	


4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss

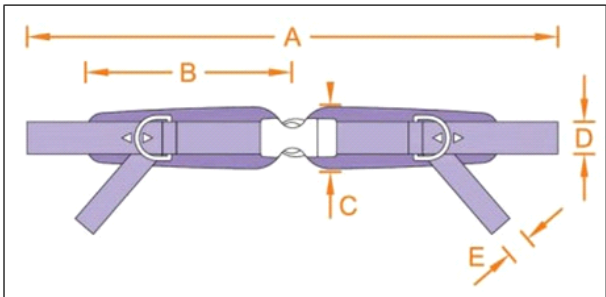

Größe	A	B	C	D	E
1	148	14	5	2,5	2,5
2	156	17	6	2,5	2,5
3	166	22	7	2,5	2,5

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	78050404	4-Punkt Beckengurt Gr.1 mit Metallschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	78050405	4-Punkt Beckengurt Gr.2 mit Metallschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	78050406	4-Punkt Beckengurt Gr.3 mit Metallschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	78050210	Sicherheits-Schutz-Kappe für Metallschloss	
o.B.	1	780106	Rohrschellenset für Rohre 19-25 mm (2 Schellen)	
o.B.	1	780107	Klappschellenset (4 Stück) für Gurte mit 25 mm mit Bohrung	

**Brustschultergurt**

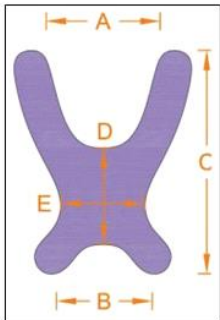

Größe	A	B	C	D	E
1	9	21	27	10	12
2	12	24	36	14	14
3	17	30	42	15	18
4	20	32	48	17	21

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	781001	Brustschultergurt Gr. 1 ohne Reißverschluß incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	781002	Brustschultergurt Gr. 2 ohne Reißverschluß incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	781003	Brustschultergurt Gr. 3 ohne Reißverschluß incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	781004	Brustschultergurt Gr. 4 ohne Reißverschluß incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	
o.B.	1	780106	Rohrschellenset für Rohre 19-25 mm (2 Schellen)	
o.B.	1	780107	Klappschellenset (4 Stück) für Gurte mit 25 mm mit Bohrung	